



Numéro d'article	250929
Prix HT	67,82 €
Prix TTC	82,06 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

L'Alcovisor CLICK est un testeur d'alcool qui s'adapte sur votre smartphone ! Vous le savez, ça ? Vous buvez un soir 2, 3... boissons et veut savoir si tu peux encore conduire. Avec le CLICK, vous pouvez suivre votre taux d'alcoolémie après chaque verre pendant la soirée. Les résultats du test sont - si vous le souhaitez - enregistrés sur votre téléphone. Avec chaque résultat, vous pouvez faire un commentaire, par exemple : "Après 1 verre de champagne et 1 verre de vin". De cette façon, vous pourrez mieux vous connaître. L'appareil calcule également combien de temps il faut pour atteindre la limite légale et quand tout l'alcool a disparu de votre corps.

Comment fonctionne le testeur d'alcool pour smartphones ?

Téléchargez gratuitement l'application Alcovisor depuis l'App Store ou Google Play. Ouvrez l'application, connectez votre Click à votre téléphone via le port audio et insérez l'appareil. Dès que vous voyez 'Prêt' à l'écran, soufflez dans l'embout buccal pendant environ 5 secondes et appuyez sur le petit bouton sur le côté long. L'appareil dira "clic" et vous verrez le résultat après quelques secondes.

Les propriétés les plus importantes d'Alcovisor - testeur d'alcool :

- Compact, de petite taille, si facile à ranger dans votre poche ou votre sac à main.
- Précis, grâce au capteur électrochimique
- Facile à utiliser
- Pochette de rangement pratique en caoutchouc, dans laquelle un embout buccal peut également être rangé.

ATTENTION : Chez Anroid, l'application ne fonctionne qu'à partir d'OS 4.2 / Pour l'iPhone, iOS 5.1 est le minimum requis (certains iPhones récents n'ont pas de port audio, donc malheureusement ce testeur ne peut pas être utilisé).

Informations techniques

Capteur	Électrochimique (pile à combustible)
Unité de mesure	‰
Plage de mesure en promille	0,00 - 3,00
Précision	± 10% à 1,00 ‰
Dimensions (h x l x d in cm)	7,8 x 4,8 x 1,6
Poids de l'appareil	23,6 g
Température ambiante	Utilisation: 0°C à 45°C
Temps d'échauffement (1er test)	< 30 sec
Échantillon respiratoire	4-5 sec. en continu et soufflage régulier
Contrôle de l'échantillon d'haleine	Oui
Temps d'analyse	< 10 sec à 1,00 ‰
Temps de récupération	15-30 secondes selon la quantité d'alcool
Écran d'affichage	Par smartphone
Canaux de mémoire	Oui, en principe illimité
Affichage du nombre de tests	Oui
Alimentation électrique	Pile bouton CR1025

Embouts buccaux	Code: MSCL05, MSCL25
Etalonnage	Après 1 an ou 500 tests

Afbeeldingen

