



<b>Numéro d'article</b>	170293
<b>Prix HT</b>	39,14 €
<b>Prix TTC</b>	47,36 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Les bandelettes réactives OneTouch<sup>®</sup> Verio<sup>®</sup> sont à utiliser avec les lecteurs OneTouch<sup>®</sup> Verio<sup>®</sup>, OneTouch<sup>®</sup> Verio<sup>®</sup> Pro et OneTouch<sup>®</sup> Verio<sup>®</sup> IQ pour mesurer la quantité de glucose dans le sang.

## Caractéristiques des bandelettes réactives OneTouch<sup>®</sup> Verio<sup>®</sup> :

- Bandelette réactive dont l'extrémité aspire automatiquement le sang
- Bandelette préhensible sur toute sa surface
- Échantillon de sang pouvant être appliqué sur l'un ou l'autre côté de la bandelette

Le lecteur OneTouch<sup>®</sup> Verio<sup>®</sup> Pro affiche des résultats calibrés sur plasma afin de faciliter la comparaison avec les méthodes de laboratoire.

## Conservation et manipulation :

- Conservez les bandelettes réactives dans un endroit frais et sec, à une température inférieure à 30°C. Protégez-les des rayons solaires directs et de toute source de chaleur. Ne les placez pas au réfrigérateur.
- Conservez toujours vos bandelettes réactives dans le flacon d'origine ; ne les transférez pas dans un autre flacon ou récipient.
- Après avoir retiré la bandelette réactive OneTouch® Verio® du flacon, remplacez immédiatement le bouchon du flacon et refermez-le bien.
- Utilisez chaque bandelette immédiatement après l'avoir retirée du flacon.
- N'utilisez pas les bandelettes qui proviennent d'un flacon abîmé ou qui a été exposé à l'air libre.
- Écrivez la date d'élimination sur le flacon lorsque vous l'ouvrez pour la première fois. Six mois après la première ouverture du flacon, jetez les bandelettes réactives OneTouch® Verio® restantes.
- Évitez de salir l'extrémité supérieure de la bandelette avec de la poussière ou de la nourriture. Vous pouvez toucher la bandelette sur toute sa surface avec des mains propres et sèches.
- N'utilisez pas les bandelettes réactives après la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Les bandelettes ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Ne réutiliser pas une bandelette qui a déjà servi pour faire un test avec une solution de contrôle ou du sang.
- Vérifiez que le lecteur et la bandelette sont proches en température avant d'effectuer un test.
- N'appliquez que la solution de contrôle OneTouch® Verio® ou du sang sur la bandelette.
- Ne pliez pas, ne coupez pas ou n'abîmez pas les bandelettes OneTouch® Verio®.

Attention: Lisez attentivement les notices d'utilisation avant d'utiliser ce produit.