

# Aniosyme X3 - avec doseur 25ml - 1 litre - nettoyage et pré-désinfection des instruments

07/10/2025 21:56:44



<b>Numéro d'article</b>	016220
<b>Prix HT</b>	24,93 €
<b>Prix TTC</b>	30,17 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Aniosyme X3 - avec doseur 25ml - 1 litre - nettoyage et pré-désinfection des instruments  
Pour en savoir plus sur le nettoyage et la désinfection des instruments, consultez notre blog. [Cliquez ici](#) Ce désinfectant est entièrement conforme aux directives (classe CE IIb conformément à la directive européenne 93/42 / CEE). Suivez les étapes suivantes:

Etape 1 Dilution à 0,5%. Versez 25 ml d'Anyosyme X3 dans de l'eau froide ou tiède.

Etape 2 Immergez complètement le dispositif ou les instruments médicaux. Nettoyez avec une brosse. Temps d'immersion recommandé: 5 minutes.

Etape 3 Nettoyez les instruments et rincez soigneusement à l'eau du robinet. Pour les instruments semi-critiques ou critiques, passez à l'étape suivante: la désinfection.

Etape 4 Pour les instruments non critiques, c'est la dernière étape: sécher avec un chiffon propre et stocker le matériel.