



Numéro d'article	016133
Prix HT	10,90 €
Prix TTC	13,19 €
Stock	en stock

Description

Flamirins Nettoyant pour plaies isotonique et tamponné. Flamirins s'utilise pour nettoyer les plaies et détacher les compresses adhérant à la plaie. Les plaies nettoyées guérissent mieux. Flamirins élimine mécaniquement de la plaie les particules étrangères et les tissus morts, ce qui réduit le risque d'infection.

Propriétés

Flamirins est une solution qui possède les propriétés suivantes :

- tamponnée (pH acide)
- isotonique

Ces propriétés assurent un rinçage aisé, rapide et complet des petites plaies. Après ouverture, Flamirins peut être utilisé à plusieurs reprises jusqu'à sa date de péremption.

Mode d'emploi

- Retirer le capuchon du flacon.
- Rincer la plaie en pressant fermement le flacon et en versant le liquide dans la plaie.
- Remettre le capuchon sur le flacon.
- Sécher la plaie en tamponnant doucement.
- Si nécessaire, recouvrir la plaie d'un pansement approprié.

Mesures de précaution

- Uniquement réservé à un usage externe.
- À conserver hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser en cas d'irritation ou d'allergie à l'un des composants.
- Ne pas utiliser comme solution antiseptique.
- Ne pas utiliser sur les paupières ou dans les yeux. Si Flamirins entre en contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau courante pendant 5 minutes.
- Consulter un médecin si l'état de la plaie s'aggrave.

Flamirins® est disponible en flacon pulvérisateur pour un traitement rapide, facile et hygiénique. La puissance du jet est réglable. Flamirins® convient aussi bien à l'environnement clinique qu'aux soins à domicile.