



<b>Numéro d'article</b>	075193
<b>Prix HT</b>	59,25 €
<b>Prix TTC</b>	71,69 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Le Doff n' Donner est un ballon d'eau de forme infinie qui est utilisé pour enfiler et retirer les bas de contention de tous types et de toutes classes de compression. Ce qui différencie le Doff n' Donner d'autres systèmes c'est qu'il est conçu pour enfiler les bas aussi bien que pour les retirer. Il est unique dans le fait que c'est un outil d'assistance qui s'adapte au bas de contention et non l'inverse. Cela prolonge significativement la durée de vie des bas. Le Doff n' Donner a été inventé dans l'esprit de faire glisser plutôt que de tirer le bas. il n'est plus nécessaire d'utiliser la force. Il est prévu pour un usage facile et confortable aussi bien pour l'utilisateur que pour le dispensateur de soins. Etant donné que le Doff n' Donner s'adapte au bas et à la forme de la jambe, il roule simplement et directement par-dessus les bandages, les jambes fraîchement lotionnées ou mouillées et même par-dessus les emplâtres.

# Avantages Rolly - Doff n' Donner:

- Peut être utilisé seul ou avec l'aide d'une autre personne.
- Peut également être utilisé sans les mains.
- La surface nervurée permet de positionner le bas sans l'endommager.
- Léger, compact, flexible, facile à transporter.
- Pour tous les types de bas et les soudures sous pression.
- Extrêmement confortable.
- Se roule facilement sur les bandages, les jambes mouillées ou graissées, etc.
- Prolonge la durée de vie du bas.
- Beaucoup moins de force nécessaire pour enfiler les bas ; encore plus facile de les enlever et de les remettre immédiatement.
- Gagnez du temps pour les soignants ; aidez vos patients plus rapidement et plus confortablement.
- Le bas est prêt à être remis en place immédiatement après l'avoir enlevé.

## Comment fonctionne le Rolly?

D'abord rouler le bas -

Diverses techniques de roulement permettent de préparer chaque bas pour le mettre.

Mettre la chaussette -

Il y a plusieurs possibilités pour cela ; vous pouvez le voir en détail dans le film ci-dessous.

Enlever le bas de contention -

Plus simple encore, choisissez l'un des moyens qui vous convient et, très commodément, après avoir retiré le bas, il est prêt à être remis en place.

Techniques et scénarios spéciaux -

Rouler sur des pansements ou des sparadraps? Deux bas de compression l'un sur l'autre? Des jambes mouillées ou tachées? Pas de problème avec le Doff n' Donner! Regardez les vidéos ci-dessous pour ces scénarios et d'autres encore.

Contre-indications: Tour de mollet supérieur à 51 cm N'utilisez pas cet appareil en cas de peau hyper-sensible ou de thrombose veineuse profonde.

## Avertissements et précautions:

- Ne pas chauffer ce produit
- Ne pas utiliser ce produit en cas de thrombose veineuse profonde
- Conserver ce produit hors de portée des enfants - Ce produit n'est pas un jouet
- Ne pas négliger ce produit
- Évitez les objets tranchants tels que les bijoux
- Consultez votre spécialiste avant toute utilisation
- Utilisation par une seule personne, sauf si le Rolly est correctement désinfecté

### Nettoyage et entretien:

- Le Rolly doit être conservé à température ambiante.
- Vous pouvez nettoyer le Rolly avec de l'eau et du savon normal, mais utilisez de préférence un savon antibactérien.
- Le Rolly peut être désinfecté avec de l'alcool isopropylique.

Le Rolly est rempli d'eau savonneuse. Il peut facilement être enlevé du tissu d'ameublement ou de la moquette en cas de fuite du Doff n' Donner.

**Voir ici comment fonctionne le Rolly**

# Afbeeldingen

---

