

Numéro d'article	071234
Prix HT	55,00 €
Prix TTC	66,55 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Chevillère ligamentaire à sanglage fonctionnel

- Tricot élastique
- Double sanglage de maintien latéral préservant la flexion-extension
- Sangle de renfort latéral amovible
- Dispositif anti-glisse sur le mollet

Indications

Entorse légère de la cheville (phase aiguë). Douleur et/ou œdème résiduel postopératoire, post-traumatique. Instabilité articulaire/laxité. Soutien proprioceptif à la rééducation. Reprise d'activités sportives. Compression pour cicatrisation plaies/brûlures.

Contre-indications

Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain. Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée ou une plaie ouverte sans pansement adapté. Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants. Antécédents de troubles veineux ou lymphatiques.

Précautions

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé. Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles. Il est recommandé qu'un professionnel de santé supervise la première application. Se

conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé. En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de variation du volume du membre, de sensations anormales ou de changement de couleur des extrémités, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé. Pour des raisons d'hygiène et de performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient. Ne pas utiliser le dispositif en cas d'application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels, patchs...). Si le dispositif est porté pour de longues périodes, s'assurer que la circulation sanguine n'est pas entravée. Il est recommandé de serrer de manière adéquate le dispositif afin d'assurer un maintien/une immobilisation sans limitation de la circulation sanguine.

Mode d'emploi

Enfiler la chevillère, la partie haute étant constituée par la patte de fermeture. Fermer cette patte (à l'aide de l'auto-agrippant) pour assurer une parfaite adaptation. Tirer la première sangle, l'entourer autour de la cheville et la fixer sur le feutre situé à sa base (schémas et). Répéter la même opération avec la seconde sangle (schéma) : la cheville doit être parfaitement maintenue latéralement tout en conservant la flexion-extension. Si nécessaire, le maintien de la cheville peut être renforcé. Pour ce faire, étaler la sangle amovible sur le sol, parties agrippantes vers le haut. Poser ensuite le pied sur sa partie médiane (schéma), et tirer ses deux extrémités vers le haut. Opérer un croisement en "8" au-dessus du pied et fixer les extrémités de cette sangle sur le feutre de la partie supérieure de la chevillère (schéma) ou l'une sur l'autre. Pour le confort du port, vérifier l'absence de plis éventuels sur les sangles.

Entretien

Produit lavable selon les conditions présentes sur cette notice et l'étiquetage. Lavable en machine à 40°C (cycle délicat). Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...). Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. Essorer par pression. Sécher à plat. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...).

Composition

Polyamide - Élasthanne - Polyester - Élastodiène - Polyuréthane.

Disponible en différentes tailles:

- Taille 1: circonférence de la cheville 19-21 cm
- Taille 2: circonférence de la cheville 21-23 cm
- Taille 3: circonférence de la cheville 23-25 cm
- Taille 4: circonférence de la cheville 25-27 cm
- Taille 5: circonférence de la cheville 27-30 cm