



<b>Numéro d'article</b>	190166
<b>Prix HT</b>	123,54 €
<b>Prix TTC</b>	149,48 €
<b>Stock</b>	Plus que 7 en stock

## Description

Le coussin d'assise Repose fonctionne selon le même principe que le matelas Repose et assure une répartition efficace et uniforme de la pression. Convient pour une utilisation dans un fauteuil roulant, sur une chaise ordinaire ou dans un fauteuil. Une bande élastique maintient le coussin du siège en position.

## Qu'est-ce que Repose?

Repose offre une solution globale pour prévenir et traiter les escarres. Repose est constitué de membranes remplies d'air et interconnectées, faites d'un film de polyuréthane. Le polyuréthane est très élastique: il peut être étiré jusqu'à six fois sans se déchirer ni perdre son élasticité. Le matériau est respirant, imperméable et neutre en température. La combinaison de l'air et du film de polyuréthane garantit la meilleure répartition possible de la pression par immersion et revêtement. Avec Repose, la pression, les forces de cisaillement, les forces de friction et le microclimat peuvent être traités efficacement.

## **Repose peut-il être facilement utilisé dans les soins à domicile?**

Oui, Repose peut être facilement utilisé dans les soins à domicile. Repose est petit, pratique et facile à transporter.

## **Avez-vous besoin de vérifier la pression de Repose?**

Lors du gonflage, la pression est automatiquement réglée de manière optimale grâce à la technologie SmartValve intégrée. La technologie brevetée permet d'obtenir une valeur optimale pour la répartition de la pression et l'efficacité clinique. Un clic audible confirme que la pression correcte a été atteinte et garantit que Repose est prêt à l'emploi et n'a pas été gonflé trop ou trop peu. La pression est la même pour tous les produits Repose. Un appareil Repose en service doit être contrôlé régulièrement pour vérifier la pression. Cela se fait rapidement et facilement pendant les soins quotidiens et vous pouvez donc être sûr que la pression est toujours correcte. Il peut être nécessaire de souffler un peu d'air tous les 7 à 10 jours.

## **Quel est le poids maximum du patient qui utilise Repose?**

Le poids maximum autorisé sur un produit Repose pour adultes est de 139 kg.

## **Un coussin Repose peut-il être utilisé dans une chaise?**

Oui, le coussin d'assise peut être utilisé dans le fauteuil, dans le fauteuil roulant, sur une chaise. Avec le coussin du siège, vous devez vous assurer que la valve est orientée vers le bas et que les cellules d'air se trouvent le long des cuisses, c'est-à-dire dans le sens de la longueur. Ainsi, les deux cellules extérieures apportent un soutien et un confort supplémentaires. Le coussin est également fixé par des rubans. Il est éventuellement disponible avec une housse en polyuréthane: pour un patient agité ou incontinent, cela est parfois utile. Ici aussi, la règle s'applique: ne posez pas de couches superflues sur l'oreiller car l'efficacité diminue à chaque couche superflue.

## **Comment est nettoyé Repose?**

Pour nettoyer Repose, utilisez les nettoyants ménagers habituels, tels que l'eau et le savon.