



Numéro d'article	190168
Prix HT	281,80 €
Prix TTC	340,98 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Efficacité prouvée pour une large application dans la prévention et le traitement des ulcères de pression / escarres. Le matelas Repose se compose de 16 chambres à air reliées entre elles. Ce dispositif réactif offre une redistribution optimale de la pression à chaque patient à haut risque. L'expérience nous a appris que les patients se couchent aussi très confortablement sur Repose. Surtout chez les patients très légers et sensibles à la douleur...

Caractéristiques Repose le matelas anti-escarres

Le matelas Repose est livré facilement et en toute sécurité dans un carton de protection spécial qui sert de pompe. L'excellente capacité d'étirement multidirectionnel des deux membranes en polyuréthane assure une répartition efficace et uniforme de la pression. Les forces de glissement et de frottement sont fortement réduites. Le patient est allongé de manière particulièrement confortable sur une surface lisse, douce, agréable pour la peau et perméable à la vapeur. Le polyuréthane, qui laisse passer les rayons X mais

repousse l'eau, peut être nettoyé/désinfecté de manière fiable et facile.

Qu'est-ce que Repose?

Repose offre une solution globale pour prévenir et traiter les escarres. La gamme comprend des coussins de siège, des matelas de soutien, des cales pour les talons, des protège-talons, etc. Des dispositifs spécialement adaptés ont également été développés pour les bébés et les jeunes enfants. Repose est constitué de membranes remplies d'air et interconnectées, faites d'un film de polyuréthane. Le polyuréthane est très élastique: il peut être étiré jusqu'à six fois sans se déchirer ni perdre son élasticité. Le matériau est respirant, imperméable et neutre en température. La combinaison de l'air et du film de polyuréthane garantit la meilleure répartition possible de la pression par immersion et revêtement. Avec Repose, la pression, les forces de cisaillement, les forces de friction et le microclimat peuvent être traités efficacement.

Repose peut-il être facilement utilisé dans les soins à domicile?

Oui, Repose peut être facilement utilisé dans les soins à domicile. Repose est petit, pratique et facile à transporter. Un sur-matelas ou un coussin de siège Repose est commodément emballé dans un tube qui est aussi la pompe. Le mode d'emploi se trouve sur chaque pompe Repose. Si nécessaire, vous les aurez toujours à portée de main. Faites sauter Repose! Il suffit de quelques minutes pour préparer un produit Repose à l'utilisation.

Avez-vous besoin de vérifier la pression de Repose?

Lors du gonflage, la pression est automatiquement réglée de manière optimale grâce à la technologie SmartValve intégrée. La technologie brevetée permet d'obtenir une valeur optimale pour la répartition de la pression et l'efficacité clinique. Un clic audible confirme que la pression correcte a été atteinte et garantit que Repose est prêt à l'emploi et n'a pas été gonflé trop ou trop peu. La pression est la même pour tous les produits Repose. Un appareil Repose en service doit être contrôlé régulièrement pour vérifier la pression. Cela se fait rapidement et facilement pendant les soins quotidiens et vous pouvez donc être sûr que la pression est toujours correcte. Il peut être nécessaire de souffler un peu d'air tous les 7 à 10 jours.

Repose peut-il être gonflé avec le patient sur le matelas ou l'oreiller?

Non. Repose doit être gonflé sans charge. La technologie SmartValve ne fonctionne que lorsque le patient n'est pas couché sur le matelas ou sur l'oreiller.

Quel est le poids maximum du patient qui utilise Repose?

Le poids maximum autorisé sur un produit Repose pour adultes est de 139 kg.

Sur quel type de matelas un matelas Repose peut-il être utilisé?

Un matelas Repose peut être placé sur n'importe quel matelas statique. Il peut donc facilement être utilisé à la maison. Même sur un lit double, un matelas Repose peut être attaché et utilisé par un patient sans déranger l'autre personne.

Quand peut-on utiliser Repose?

Repose peut être utilisé dès qu'il y a un risque d'escarres ou de blessure existante. Tenez également compte du confort du patient: le produit Repose augmente le confort en position couchée/assise et ne fait aucun bruit (pas besoin de moteur!). Repose peut donc également être utilisé en soins palliatifs.

Qu'en est-il de l'utilisation de feuilles en combinaison avec Repose?

Les draps peuvent normalement être utilisés sur un matelas Repose. Attention à ne pas provoquer d'effet de hamac: ne serrez pas trop les draps, et utilisez de préférence un drap souple (ajusté). Il est également préférable de ne pas multiplier le nombre de feuilles: l'efficacité de Repose diminue à mesure que le nombre de couches augmente ! Le changement de position doit-il encore être appliqué lorsque le patient utilise un produit Repose ? Oui, les lignes directrices habituelles pour la prévention et le traitement des escarres doivent toujours être suivies.

Comment est nettoyé Repose?

Pour nettoyer Repose, utilisez les produits d'entretien ménager habituels, tels que l'eau et le savon.

Combien de temps dure Repose?

Dans le cadre d'une utilisation normale, Repose est un produit durable et les gens l'apprécieront pendant de nombreuses années.