



<b>Numéro d'article</b>	023039
<b>Prix HT</b>	35,63 €
<b>Prix TTC</b>	43,11 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

L'ALGISITE M est un pansement stérile à base d'alginate de calcium et d'alginate de calcium dans lequel les fibres sont entrelacées d'une manière unique. Cela crée un pansement doux et souple et maintient son intégrité, même lorsqu'il est trempé.

**L'ALGISITE M profite des avantages de la cicatrisation humide, qui permet une cicatrisation rapide et non perturbée.**

- Très absorbant Le pansement peut rester en place jusqu'à 7 jours car il peut absorber 13 fois son propre poids dans le liquide de la plaie.
- Facile à enlever Lorsqu'il est utilisé dans les plaies à exsudation modérée à forte, l'ALGISITE M forme un gel flexible qui n'adhère pas aux tissus nouvellement formés dans le lit de la plaie.
- Cicatrisation rapide Le gel formé par le contact du liquide de la plaie avec les fibres d'alginate crée un environnement humide de la plaie, empêche la formation de

croûte et stimule la cicatrisation de la plaie sans perturbation. Le pansement permet la contraction de la plaie ainsi que l'échange d'oxygène et de CO<sub>2</sub>, nécessaire à une cicatrisation optimale.

- S'adapte à la plaie L'ALGISITE M est très souple et confortable et s'adapte à la surface de la plaie. La formation de gel assure un contact plus étroit avec la plaie.
- Entrelacement unique des fibres La plupart des pansements en alginate perdent leurs fibres lorsqu'ils sont manipulés. Des techniques avancées d'entrelacement de ces fibres permettent d'éviter ce problème. C'est un avantage majeur de l'ALGISITE M par rapport à des produits similaires.

## Indications

- Plaies superficielles, superficielles, profondes ou cavitaires (ulcères, plaies de pression, ulcères diabétiques, etc.), de modérées à très exsudatives.

## Contre-indications

- Consulter un médecin en cas d'utilisation sur des plaies infectées ou oncologiques ou sur des plaies causées par la tuberculose.
- Ne pas utiliser le pansement chez les patients allergiques à l'un des ingrédients du produit.
- Ne pas réutiliser l'ALGISITE M.
- Ne pas utiliser dans les plaies avec peu ou pas d'exsudat.