

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 040074 |
| Prix HT | 6,32 € |
| Prix TTC | 7,65 € |
| Stock | Plus que 5 en stock |

Description

Dermaplast Quick Aid - 6cm x 2m - Pansement autofixant élastique en mousse
Ne colli ni à la peau, ni aux poils, ni aux plaies

Quick Aid est autocollant, élastique, résistant à l'eau et ne colle pas à la peau, aux poils ou aux plaies. Pour un traitement facile des blessures mineures et pour une fixation sûre des pansements. Déchirez une pièce appropriée et enroulez-la autour de la blessure une ou deux fois. Le pansement peut être retiré sans douleur et ne laisse aucun résidu collant.

Absorbe le sang

Si l'hémorragie est importante, plier la bande et placer la sur la plaie. Appuyer légèrement pour fixer la bande. Appliquer le pansement avec pression moyenne. Si une perte de sang sévère se produit, formez un morceau de pansement Quick Aid tel qu'un «oreiller» pour former un bandage compressif. Utilisez plusieurs couches pour les saignements abondants.