



Numéro d'article	040689
Prix HT	14,33 €
Prix TTC	17,34 €
Stock	en stock

Description

Le pansement adhésif Evercare IV non tissé stérile 6x8 cm, est un sparadrap spécial pour la fixation des canules intraveineuses et des lignes de perfusion.

Pansement adhésif Evercare IV non tissé stérile 8x6cm

Comme le pansement adhésif recouvre la perfusion ou la canule d'un film transparent pour les plaies, une inspection d'insertion est possible. Le film est imperméable aux virus et aux bactéries. Le pansement est facile à utiliser grâce à sa méthode d'application simple avec une fente. Les bandes de fixation non tissées le long de la fente simplifient l'application et assurent le maintien en place de la canule ou du cathéter. Cela minimise le risque de déplacement de l'aiguille pendant les soins au patient. Le joint hermétique garantit une stérilité maximale du pansement adhésif IV. En combinaison avec ces pansements pour perfusion IV de haute qualité et notre gamme de [cathéters](#), la piqûre devient un jeu d'enfant.

Comment utiliser le sparadrap IV

- Retirez la plus grande feuille de protection du film adhésif. Utilisez les deux bandes sur le côté pour une application facile sur la plaie.
- Appliquez le film sparadrap IV sans tension sur la plaie.
- retirez ensuite le support des bandes latérales et pressez le film sur la peau autour de la plaie.
- Retirez également la feuille supérieure de protection en tirant doucement sur les deux extrémités qui dépassent dans le sens des flèches vertes.
- Lorsque vous retirez le plâtre, décollez soigneusement le pansement de la peau aux angles, en soutenant la peau avec votre main libre. Retirez le film parallèlement à la peau.
- Le pansement adhésif Evercare IV peut être laissé en place jusqu'à 7 jours.

Evercare

Cette gamme de produits comprend des alternatives de haute qualité aux matériaux traditionnels à un prix plus économique. Sparadrap IV, pansements pour îlots et toutes sortes de matériaux pour le soin des plaies. Les produits Evercare répondent aux normes CE, EO, EN et aux directives strictes des exigences de qualité ISO. Tous les produits Evercare sont soumis à un processus de contrôle de qualité approfondi. Cela comprend une inspection régulière des installations de production ainsi que des tests aléatoires.