



Numéro d'article	023128
Prix HT	65,46 €
Prix TTC	79,21 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Exufiber Ag+ est un pansement en fibre gélifiée à action antimicrobienne rapide pour les plaies fortement exsudatives. Exufiber® Ag+ avec la technologie Hydrolock® est un pansement stérile non tissé en fibre gélifiée avec une action antimicrobienne rapide pour une protection durable contre une large gamme de pathogènes, y compris les biofilms. Les données in vivo montrent qu'Exufiber Ag+ a un impact beaucoup plus important sur les biofilms bactériens, en particulier sur *Pseudomonas aeruginosa* et *Staphylococcus aureus* [MRSA], qu'Aquacel® Ag+ Extra. Au contact de l'exsudat, Exufiber Ag+ se transforme en gel. Le gel favorise la cicatrisation en milieu humide et reste en une seule pièce pour faciliter le retrait lors du changement de pansement. Sa grande capacité d'absorption et de rétention réduit le risque de fuite et de macération. Ce pansement convient au traitement des plaies modérément à fortement exsudatives. Vous pouvez utiliser Exufiber Ag+ en association avec Mepilex® Border Flex, une combinaison unique de la technologie Flex et de Safetac®.

- action antimicrobienne rapide jusqu'à sept jours (in vitro)

- tue une large gamme de pathogènes, y compris les biofilms (in vivo)
- grande capacité de confinement
- très absorbant, même sous compression

Quand utiliser Exufiber Ag+ ?

Exufiber Ag+ est indiqué pour le traitement des plaies modérément à sévèrement exsudatives. Il convient aux ulcères du pied diabétique et aux ulcères de jambe veineux. Exufiber Ag+ peut être utilisé en combinaison avec une thérapie de compression.

Comment utiliser Exufiber Ag+ ?

1. Nettoyer la plaie avec une solution saline ou de l'eau selon la pratique clinique courante. Sécher soigneusement la peau environnante. Retirer l'emballage de manière aseptique.
2. Appliquer un pansement Exufiber Ag+ sec sur la plaie. Le pansement doit couvrir la totalité de la plaie. Il doit recouvrir la peau sèche environnante d'au moins 1 à 2 cm pour les petites tailles et d'au moins 5 cm pour les tailles plus importantes. Le pansement se rétrécit à mesure qu'il absorbe le liquide de la plaie et commence à se gélifier.
3. Appliquez la mèche ou le pansement sans serrer sur la plaie afin de laisser suffisamment d'espace pour que le pansement puisse gonfler.
4. Fixer avec un pansement secondaire approprié. La thérapie par compression peut être appliquée en combinaison avec Exufiber Ag+.

De l'argent pour un pansement qui combat le biofilm Exufiber® Ag+ contient de fins cristaux de sulfate d'argent répartis uniformément sur le pansement. Lorsque l'exsudat entre en contact avec le pansement, les cristaux se dissolvent et libèrent des ions d'argent qui peuvent tuer une large gamme d'agents pathogènes. Technologie Hydrolock® pour un pansement qui se fixe et reste solide Contrairement aux pansements fibreux gélifiants traditionnels sur le marché, Exufiber Ag+ est un pansement non tissé avec des fibres PVA. Il se transforme en gel au contact de l'exsudat et s'adapte doucement au lit de la plaie. Au microscope, on peut voir que les pansements Exufiber sont constitués de fibres densément emballées pour minimiser l'espace libre où l'humidité ou l'exsudat peuvent rester piégés. Cette structure augmente simultanément l'intégrité de l'ensemble du pansement, sans qu'il soit nécessaire de renforcer les fibres pour le maintenir ensemble.