



Numéro d'article	0950051
Prix HT	21,33 €
Prix TTC	25,81 €
Stock	en stock

Description

Adhésif Histoacryl Octyl pour plaies: LA SOLUTION POUR LA FERMETURE DES PLAIES

Avantages de la colle Histoacryl Octyl:

- Fermeture de la plaie en moins d'une minute
- Séchage très rapide
- Temps de traitement court et convivial pour le patient
- Facile à appliquer et à doser
- Beaucoup moins de douleur que le matériel de suture
- Économies sur les sutures et les pansements
- L'adhésif pour plaie Histoacryl Octyl est résistant à l'humidité
- Barrière microbiologique efficace
- La couleur bleue devient translucide avec le temps
- Une couche suffit

- Libération après environ 5 à 10 jours
- Peut être conservé à température ambiante
- Emballage stérile

Mode d'emploi Histoacryl Octyl adhésif pour plaie

Étape 1: Le site de l'incision ou du traumatisme doit être propre et sec avant d'appliquer l'adhésif. Veillez à ce que les bords de la plaie soient facilement rapprochés

Étape 2: Visser l'embout de l'applicateur sur le tube fileté dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'applicateur soit serré et en place sur le tube. Une fois en place, l'applicateur percera la membrane d'aluminium du tube et l'adhésif pourra s'écouler.

Étape 3: Tenez l'extrémité du tube Micro vers le bas et la version 1 mm à l'horizontale. Pressez doucement le tube depuis le bas jusqu'à ce que l'adhésif devienne visible à travers le dispositif applicateur. Maintenez le dispositif orienté à l'opposé du patient, jusqu'à ce que vous soyez prêt à appliquer l'adhésif.

Étape 4: Tout en rapprochant les bords de la peau, appliquez l'adhésif en pressant doucement et continuellement le tube, tout en étalant l'adhésif d'avant en arrière sur le site de la plaie. Continuez à maintenir les bords de la plaie en les rapprochant jusqu'à ce que l'adhésif devienne collant - généralement moins de 20 secondes. Une couche d'adhésif lisse et uniforme est souhaitable.

Étape 5: Une fois l'adhésif complètement polymérisé (non collant), vous pouvez recouvrir le site avec un pansement secondaire. Si un bandage secondaire est utilisé, NE PAS appliquer sur la zone adhésive avant qu'elle ne soit complètement non collante. L'application de l'adhésif alors qu'il est collant peut entraîner le retrait de l'adhésif lors du retrait du pansement secondaire et éventuellement la déhiscence du site de la plaie.

Si vous préférez toujours les bandes adhésives (Steri-strips, Leukostrips, etc.), vous pouvez les trouver [ici](#).