



<b>Numéro d'article</b>	000623
<b>Prix HT</b>	11,87 €
<b>Prix TTC</b>	14,36 €
<b>Stock</b>	Plus que 8 en stock

## Description

Lomatuell Pro (maille de contact gélifiée) - Stérile - 5 x 5cm - 10 pièces Lomatuell Pro est une maille de contact gélifiée. Il réduit le risque d'adhérence de la couverture de la plaie avec la plaie et le bord de la plaie, et favorise le processus de cicatrisation. Lomatuell Pro se compose d'une maille grossière en fibres de polyester et d'une couche de matrice polymère (une masse de fixation élastique et déformable), de vaseline et d'hydrocolloïde. Lorsque les particules d'hydrocolloïde entrent en contact avec l'exsudat de la plaie, elles forment un gel et maintiennent ainsi l'environnement de la plaie humide. En outre, la vaseline a un effet de récupération de la graisse pour les zones sèches de la plaie et le bord de la plaie. Enfin, la structure ouverte de la gaze à grosses mailles stimule le drainage de l'excès d'exsudat dans un pansement secondaire. Lomatuell Pro est flexible et souple, peut être coupé à la taille voulue et peut être utilisé des deux côtés. Il est donc sûr et facile à utiliser. La couche de contact avec la plaie, composée de vaseline et d'hydrocolloïde, permet des changements de pansements pratiquement indolores et

atraumatiques : dans une étude internationale, 97,1% de tous les patients ont jugé le retrait atraumatique de Lomatuell® Pro comme "bon" à "très bon" après une moyenne de 2 à 4 jours d'utilisation !

## Intervalle entre les changements de pansements

L'intervalle recommandé entre les changements de pansement est généralement de 2 à 4 jours. En fonction du type de plaie et de l'évolution de la cicatrisation, le pansement peut être laissé sur la plaie plus longtemps (jusqu'à 7 jours) ou moins longtemps.

## Domaines d'application de Lomatuell Pro

- Phases de cicatrisation
  - Phase d'exsudation
  - Phase de granulation
  - Phase d'épithélialisation
- Plaies chroniques
  - ulcère crural
  - ulcère du pied diabétique
  - décubitus
- Plaies aiguës
  - lacérations, coupures et abrasions
  - brûlures au second degré
- plaies post-chirurgicales
  - plaies chirurgicales à cicatrisation secondaire
  - plaies à peau fendue
- à combiner avec la thérapie par pression négative en tant qu'espaceur de plaie (mesh\*)

\*) sur la base d'études in vitro

## Propriétés de Lomatuell Pro

- formation d'une couche de gel composée de vaseline et de particules hydrocolloïdes
- changement de pansement atraumatique
- application simple
- peut être utilisé des deux côtés
- peut être découpé pour s'adapter aux différentes tailles de plaies et aux différentes parties du corps
- favorise la cicatrisation des plaies
- le risque d'adhérence à la plaie est minimisé

- matériau flexible et souple
- bon drainage des exsudats dans le pansement secondaire
- changement de pansement pratiquement indolore

## Composition du produit Lomatuell Pro

Structure en filet de fibres de polyester imprégnée d'une masse d'enrobage composée d'une matrice polymère (masse de fixation élastique et déformable), de vaseline et d'hydrocolloïde.