

Numéro d'article	020720
Prix HT	47,57 €
Prix TTC	57,56 €
Stock	Plus que 7 en stock

Description

3M Tegaderm IV film, hydrofuge, transparent, pour la fixation des cathéters intraveineux, spécialement pour la fixation des cathéters intraveineux périphériques IV et des cathéters à aiguille ailée.

Le film stérile a une zone de plâtre renforcée avec une encoche profonde pour une plus grande stabilité du cathéter et une meilleure fixation.

Le film Tegaderm IV est renforcé par des bandes souples pour la fixation des cathéters IV périphériques et des cathéters à aiguille ailée. Deux bandes adhésives non tissées stériles sont utilisées pour la fixation supplémentaire du cathéter. Le film est doté d'un cadre d'application sans adhésif pour un positionnement précis et facile du film, même avec des gants. Comme le film est semi-perméable (perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau), le ramollissement de la peau est empêché. Le film est transparent, il y a une vue continue sur l'ouverture. Le film est hydrofuge, formant ainsi une barrière contre le risque d'infection par l'humidité, les bactéries et les virus de l'extérieur et peut rester en place jusqu'à 5 jours.

Spécifications:

- Plâtre renforcé avec encoches profondes;
- deux bandes adhésives non tissées;
- cadre applicatif;
- flagrant;

- semi-perméable;
- déperlant;
- stérile;
- taille 7 x 8.5cm.

Application:

- pour la fixation de cathéters IV périphériques et de cathéters à aiguille ailée.

Appliquez-le:

- enlever la bractée;
- placez le centre de la partie transparente sur l'ouverture;
- poussez les languettes souples sous le cathéter pour une bonne fixation du cathéter;
- frotter le film en douceur;
- retirez doucement le cadre tout en tenant le film;
- appliquer des bandes stériles pour une fixation supplémentaire de la lumière.

Enlever:

- soutenir la peau;
- enlevez toutes les bandes appliquées;
- enlever le film de peau, en commençant par le bord non tissé, en direction de l'ouverture d'insertion;
- évitez d'endommager la peau en décollant le film de la peau, donc ne l'arrachez pas.