



Numéro d'article	3013
Prix HT	73,83 €
Prix TTC	89,33 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Vacutex drain - 1 x 40cm - Stérile - 10 pièces Il est constitué de 3 couches de filaments de polyester et de polyester-coton qui agissent mécaniquement comme une « pompe » de faible niveau par action capillaire. Des recherches indépendantes ont montré que la hauteur de la pression négative générée par Vacutex est de 68 mmHG ! Fonctionnement

- Aspiration : aspire activement et verticalement le liquide de la plaie par l'intermédiaire des canaux capillaires. Pour les plaies profondes, plusieurs couches peuvent être utilisées pour une absorption optimale.
- Drainage : l'humidité est dirigée vers la couche centrale via un drainage horizontal, en gardant le côté peau sec et le côté lit de la plaie légèrement humide pour éviter le ramollissement des bords de la plaie.

- Élimination : l'excès d'humidité est déplacé vers la couche externe et absorbé ou évaporé.

Avantages

- Cicatrisation accélérée : réduit l'œdème et améliore la microcirculation, accélérant ainsi la cicatrisation.
- Amélioration de l'oxygénation : augmente les niveaux d'oxygène dans la plaie, ce qui favorise la formation du tissu de granulation.
- Débridement : élimine les débris, ce qui favorise une cicatrisation optimale.

Indications

- Plaies diabétiques
- Plaies de décubitus
- Ulcères de jambe veineux
- Fistules
- Brûlures
- Plaies aiguës avec œdème

Contre-indications

- Saignement artériel
- Allergie au polyester
- Pansements à base de vaseline
- Malignité de la plaie
- Ostéomyélite non traitée
- Fistules non explorées
- Tissu nécrotique avec formation de croûtes
- Vaisseaux sanguins ou organes détachés

Utilisation d'anticoagulants Le Vacutex drain favorise la cicatrisation des plaies complexes en absorbant efficacement les liquides et en améliorant l'état de la plaie.

Afbeeldingen



HET WERKINGSMECHANISME VAN EEN WONDVERBAND MET EEN STERKE CAPILLAIRE WERKING:

1

CONTINUUM ZWAARTOCHT

Wondvloeistof wordt door de VACUTEX™ wondverbanden gezogen in de 100% zachte, maar het VACUTEX™ wondverband houdt. Zwaartocht en continue capillaire werking. Wanneer vloeistof in de VACUTEX™ wondverbanden is opgenomen, worden de wondvloeistof en de wondvloeistof in de wondverbanden gezogen. Het is een continu proces. Het VACUTEX™ wondverband houdt de wondvloeistof in de wondverbanden. Het VACUTEX™ wondverband houdt de wondvloeistof in de wondverbanden.

2

DROOGMAK

Zwaartocht van de wondvloeistof in de wondverbanden. Het VACUTEX™ wondverband houdt de wondvloeistof in de wondverbanden. Het VACUTEX™ wondverband houdt de wondvloeistof in de wondverbanden. Het VACUTEX™ wondverband houdt de wondvloeistof in de wondverbanden.

3

DROOGMAK EN VERWIJDEREN

Zwaartocht van de wondvloeistof in de wondverbanden. Het VACUTEX™ wondverband houdt de wondvloeistof in de wondverbanden. Het VACUTEX™ wondverband houdt de wondvloeistof in de wondverbanden. Het VACUTEX™ wondverband houdt de wondvloeistof in de wondverbanden.

