

Numéro d'article	0106091
Prix HT	4,45 €
Prix TTC	5,38 €
Stock	en stock

Description

Une valve de cathéter est une sorte de robinet qui peut être connecté à votre cathéter. La valve de cathéter est utilisée pour la fermeture temporaire d'un cathéter, avec possibilité de vidange. La valve est adaptée à la vidange de la vessie chez les patients équipés de cathéters ordinaires et de cathéters sus-pubiens. Il peut être utilisé pendant la journée pour remplacer une poche à urine. La valve réduit le risque de fuites urinaires et d'infection. Il est recommandé à toute personne qui peut sentir une vessie pleine, qui est mentalement consciente et qui peut actionner la valve elle-même.

Avantages d'une valve de cathéter

- Facile à utiliser d'une seule main
- Peut être utilisé sans le sac à urine pour plus de mobilité.
- Discret sous les vêtements, car le robinet peut tourner à 180°.
- Sûr, car le connecteur spécialement conçu maintient fermement le robinet dans le cathéter.
- Peut être utilisé jusqu'à 7 jours
- Convient pour l'apprentissage de la vessie
- Convient pour être placé entre le cathéter et la poche à urine
- Changement hygiénique et rapide des sacs à urine
- La valve du cathéter est emballée de manière stérile.

Comment l'utiliser?

- Videz régulièrement la vessie selon les instructions du médecin. Cela se produit généralement vers 3 ou 4 heures. Videz également la vessie avant d'aller à la selle. Cela permet d'éviter les fuites de l'extérieur du cathéter dues à l'écrasement.
- Lavez-vous les mains avant et après avoir utilisé la valve du cathéter.
- Ouvrez la vanne en poussant le levier vert vers le bas.
- Videz l'urine dans les toilettes ou dans un récipient.
- Fermez la vanne en poussant le levier vert vers le haut.
- Nettoyez le tube avec de l'eau tiède.

Changement

- Lavez vos mains et séchez-les soigneusement.
- Ouvrez le paquet.
- Saisissez le cathéter d'une main et pliez-le (comme un tuyau d'arrosage) pour empêcher l'urine de s'écouler.
- Déconnectez la valve du cathéter usagé du cathéter.
- Désinfectez le point de connexion du cathéter avec de l'alcool.
- De l'autre main, prenez la valve propre du cathéter et connectez-la au cathéter.
- Jetez la valve du cathéter usagé dans la poubelle.