



Numéro d'article	040054
Prix HT	5,19 €
Prix TTC	6,28 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Hansaplast Pansements Cors - Soulagement immédiat de la pression

- Soulage immédiatement la douleur et la pression
- Aide à enlever les cors avec de l'acide salicylique

Enlèvement facile et pratique par les pansements cors Hansaplast

Les pansements Cors Hansaplast soulagent immédiatement la douleur due à la pression et à la friction et aident à enlever le cor. L'anneau doux et intégré protège la zone de la peau affectée, tandis que l'acide salicylique qu'il contient ramollit le cor pour faciliter son retrait.

Utilisation suggérée:

Nettoyez et séchez soigneusement la zone de la peau affectée. Appliquez le pansement cor de manière à ce que le cor tombe au milieu de l'anneau de caoutchouc moussé. Remplacez le plâtre après 2 jours. Au bout de 4 jours, le cor, désormais mou, peut être

retiré dans un bain chaud avec du sel ou du savon. Répétez si nécessaire.

- Un pansement cor contient 0,04 g d'acide salicylique.
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'acide salicylique, aux salicylates, au caoutchouc ou si la peau est endommagée ou affectée. En cas de diabète, il est conseillé de consulter votre médecin ou votre spécialiste médical avant d'utiliser le pansement cor Hansaplast. Ne convient pas pour le traitement des enfants en bas âge.
- En cas de fonction rénale limitée, il convient de consulter d'abord un médecin.
- Le plâtre ne doit pas entrer en contact avec les muqueuses.
- Surtout, évitez tout contact avec les yeux. L'acide salicylique peut augmenter la capacité d'absorption des médicaments appliqués localement sur la peau. Les irritations cutanées locales (sensation de brûlure, rougeur de la peau) sont rares. Dans certains cas, des réactions cutanées allergiques peuvent se produire.
- N'utilisez pas plusieurs pansements en même temps pendant une longue période sans avis médical.
- Conserver dans un endroit sec, à une température ne dépassant pas 25°C.
- Pour usage externe uniquement.
- A usage unique. Pour chaque nouvelle application, utilisez un nouvel enduit au maïs pour maintenir l'effet décrit du produit.

Produit	Type	Dimensions	Contenu
Pansements Cors		6,8 cm x 1,9 cm	8 pièces