



<b>Numéro d'article</b>	015007
<b>Prix HT</b>	7,75 €
<b>Prix TTC</b>	9,38 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Garrot élastique avec fermeture en plastique (Tourniquet) Un garrot - ou un tourniquet - est un bandage placé autour d'un membre pour arrêter un saignement grave. Un garrot ne doit être utilisé que lorsqu'il y a un risque d'hémorragie mortelle. Le tourniquet peut causer des dommages puisque le membre est complètement coupé de la circulation sanguine. Par conséquent, le garrot n'est utilisé qu'en dernier recours. Si une grande quantité de sang rouge vif s'écoule de la plaie et que l'hémorragie ne peut être arrêtée, il est possible que le patient se vide de son sang. Dans ce cas, le tourniquet est d'une grande utilité. En outre, le patient doit être emmené à l'hôpital. Appliquez le garrot entre la plaie et le cœur. Placez-le à 10-15 cm de la plaie et ne le placez jamais sur une plaie, une fracture (os) ou une articulation. Notez le moment où le tourniquet est appliqué.

## Afbeeldingen

---

