



Artikelnummer	010121
Prijs excl. BTW	€ 7,30
Prijs incl. BTW	€ 8,83
Voorraad	Nog slechts 7 op voorraad

Omschrijving

Blunt Fill - stompe naald - 18G1 1/2 (1.2 x40mm) rood - 100st Bevestig de BD Blunt Fill optreknaald op de spuit. Draai en druk tot de naald stevig vastzit. Neem de naaldbescherming aan het uiteinde vast en verwijder deze in één beweging. De spuit is klaar voor gebruik met:

- Single-dosis en multi-dosis flacons
- Ampullen

Belangrijk: De BD Blunt Filter optreknaald werkt enkelzijdig. NIET hergebruiken voor injectie in bereidingsvloeistof. Verwijdering: Maak de BD Blunt Fill of BD Blunt Filter optreknaald los van de spuit en deponeer deze in een naaldencontainer. Kenmerk: Door de specifieke slijping van de BD Blunt Fill en BD Blunt Filter optreknaalden in een hoek van 45°, is er 10x meer kracht nodig om door de huid te prikken dan met de klassieke optreknaald. Dit voorkomt het risico op prikaccidenten.