



Artikelnummer	170084
Prijs excl. BTW	€ 16,84
Prijs incl. BTW	€ 20,38
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

De Accu-Chek® Softclix II lancetten worden gebruikt bij de Accu-Chek® Softclix prikpen. De lancetten hebben een siliconenlaagje waardoor het binnendringen in de huid gemakkelijker gaat. De speciale 3-vlaks-slijping zorgt ervoor dat voldoende bloed beschikbaar komt om uw bloedglucose te kunnen meten. De Accu-Chek® Softclix is instelbaar op 11 prikdieptes en heeft speciale lancetten die voorzien zijn van een zacht siliconenlaagje.

Accu-Chek® Softclix zorgt voor een druppeltje bloed zonder venijnige pijn.

- Gepersonaliseerd comfort. Met de comfortknop met 11 indringdieptes kunt u het lancet aanpassen aan uw huidtype en een voldoende hoeveelheid bloed verkrijgen om een nauwkeurige bloedglucosetest uit te voeren.
- Gepatenteerde Clixmotion-technologie. Clixmotion is het principe van tweerichtingsbeweging, wat betekent dat de beweging heen en weer nauwkeurig

wordt geregeld zonder trillingen of oscillatie. Deze speciale beweging is het principe van zachte bloedafname.

- Precies vervaardigde lancetten. De speciaal ontworpen lancetten van Accu-Chek[®] zijn het resultaat van uitgebreid en gedetailleerd onderzoek. De speciale inkeping van de lancet en het homogene en gepolijste oppervlak zorgen voor een gladde en pijnloze penetratie.

HOE MOET IK EEN ACCU-CHEK SOFTCLIX PRIKPEN GEBRUIKEN?

De Accu-Chek Softclix prikpen is klein en eenvoudig te bedienen.

1. Trek de kap eraf. Plaats een nieuwe lancet in de lancettenhouder en druk aan totdat die vastklikt.
2. Plaats de kap er opnieuw op totdat die vastklikt.
3. Draai de kap totdat de gewenste diepte-instelling is bereikt.
4. Druk de aanspanknop erop totdat die vastklikt.
5. Druk de prikpen stevig tegen de zijkant van de vingertop.
6. Druk op de gele ontspanknop.
7. Trek na het meten van je bloedglucose de kap eraf en schuif het uitwerpsysteem naar voren om de lancet te verwijderen.