



Artikelnummer	1750091
Prijs excl. BTW	€ 3,57
Prijs incl. BTW	€ 4,32
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Covid antigen zelftest / sneltest. Kwalitatieve detectie van Sars-Cov-2 Antigen. Resultaat binnen 15 minuten. Nauwkeurigheid $\geq 95\%$. Deze BOSON antigen sneltest werd goedgekeurd voor een geldige staalafname via de neus. Op deze manier kan de sneltest uitgevoerd worden door de swab *slechts 2 à 3 cm in de neus in te brengen*, wat een stuk aangenamer is dan 10 à 15 cm in de neus in te brengen. Omdat de staalafname van deze swab niet diep in de neus hoeft afgenomen te worden, kan men deze test bij zichzelf afnemen als zelftest.

Deze antigen sneltest is erkend als zelftest

- Hij bevat een CE-markering gevolgd door vier cijfers van de aangemelde instantie die de antigen sneltest beoordeeld heeft.
- De distributeur is geregistreerd bij het FAGG.
- De verpakking en de handleiding van de sneltest zijn in de drie landstalen (NL-FR-DE)

De producent is Xiamen Boson Biotech. De producent en sneltest staan op de lijst van betrouwbaar testmateriaal, opgemaakt door het FAGG. Inhoud:

- sneltesten
- steriele swaps
- extractietubes
- buffervloeistof
- extractietube houder
- handleiding

Sensitiviteit en specificiteit

De Rapid SARS-CoV-2-antigeen testkaart is met de bevestigde klinische diagnose vergeleken. In de studie werden 156 proeven getest.

- Sensitiviteit 96,77%
- Specificiteit 99,20%
- Nauwkeurigheid 98,72%

Gebruikersdoel van deze sneltest

De test is geschikt voor personen van alle leeftijden. De aangewezen leeftijd voor het zelf uitvoeren van de test is vanaf 14 tot 90 jaar. Kinderen jonger dan 14 jaar moeten door een volwassene getest worden. Zet de test niet verder als het kind pijn voelt. Procedure: trek de wattenstaafjesverpakking open en neem het wattenstaafje er voorzichtig uit. Steek het wattenstaafje voorzichtig in een neusgat. De wattenstaafjespunt dient ten minste 2,5 cm diep vanaf de rand van het neusgat te worden ingestoken. Draai het langs het slijmvlies in het neusgat om te verzekeren dat er zowel slijm als cellen worden verzameld. Draai het wattenstaafje 3 - 4 keer. Laat het uitstrijkwattenstaafje enkele seconden in het neusgat. Herhaal de procedure met hetzelfde wattenstaafje in het andere neusgat. Steek het uitstrijkwattenstaafje met de proef in het extractiebuisje. Draai het wattenstaafje nu drie tot vijf (3 - 5) keer. Laat het uitstrijkje 1 minuut in de extractiebuffer zitten. (Zie handleiding voor de uitgebreide gebruiksaanwijzing)