

Artikelnummer	175002
Prijs excl. BTW	€ 5,58
Prijs incl. BTW	€ 6,75
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Fluorecare COMBO test 4 in 1: Covid - Influenza A en B - RSV De Fluorecare Combittest geeft 4 resultaten in één test: SARS-CoV-2 Influenza A Influenza B RSV De verschillende symptomen zijn moeilijk te onderscheiden tussen die van Covid-19, Influenza A/B of RSV. Daarom is testen belangrijk om tot diagnose te komen en om te bepalen welke behandeling geschikt is. Deze combi-test bespaart kostbare tijd en vergemakkelijkt tegelijkertijd de diagnose. De test heeft het CE2934 keurmerk voor zelftesten.

Inhoud van een testkit

– Testcassette – Korte neusswab – Buffervloeistof buisje – Handleiding in 4 talen (NL, DE, FR, ENG)

Handleiding voor de Fluorecare

– Desinfecteer uw handen voor gebruik. – Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. – Gebruik de test op kamertemperatuur (20-25°C). 1. Draai de dop de monsterextractiebuis en verwijder de binnenste blauwe stop. 2. Plaats het buisje in het doosje (geperforeerde kruisje) zodat het stevig rechtop blijft staan. 3. Open de sealverpakking en haal de testcassette eruit. 4. Haal de korte neuswisser uit de verpakking en steek deze ongeveer 2,5 cm in uw linker neusgat. 5. Draai het staafje 5 keer om een adequate bemonstering te garanderen. 6. Herhaal dit proces in het rechter neusgat. 7. Plaats de neuswisser in het testbuisje en breek het staafje af bij de breeklijn, draai de dop op het buisje en knijp 10x in het monsterbuisje. Wacht 1 minuut tot de vloeistof zijn werking heeft gedaan. 8. Draai het bovenste gedeelte van de dop los zodat de druppelneus zichtbaar wordt. 9. Plaats 2

druppels in ieder samplevak (S). Wacht tot de test gaat vloeien, plaats eventueel extra vloeistof als de teststrip niet vloeit. 10. Wacht 15 minuten en lees het resultaat af. De test heeft een overal klinisch geteste sensitiviteit (correct positief) van 90,91 % en een overal klinisch geteste specificiteit (correct negatief) van 100,00 %