

Artikelnummer	0106091
Prijs excl. BTW	€ 4,45
Prijs incl. BTW	€ 5,38
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Een katheterventiel is een soort kraantje dat kan worden aangesloten op uw katheter. De katheterventiel wordt gebruikt voor het tijdelijk afsluiten van een katheter, met aftapmogelijkheid. Het katheterventiel is geschikt voor lediging van de blaas bij patiënten met gewone katheter en suprapubische katheters. Dit kan gebruikt worden overdag ter vervanging van een urinezak. De kraantje verlaagt het risico op vermindering van de blaascapaciteit en infecties. Dit artikel is een aanrader voor iedereen die een volle blaas kan voelen, verstandelijk bewust is en het ventiel zelf kan bedienen.

Voordelen van een katheterventiel

- Eenvoudig met één hand te bedienen
- Te gebruiken zonder urinezak voor extra mobiliteit
- Discreet onder kleding, doordat de kraan 180° kan draaien
- Veilig, door de speciaal ontwikkelde connector zit de tap flow stevig in de katheter
- Maximaal 7 dagen te gebruiken
- Geschikt voor blaastraining
- Geschikt om tussen katheter en urinezak te plaatsen
- Hygiënisch en snel urinezakken verwisselen
- De katheterventiel is steriel verpakt

Hoe te gebruiken?

- Maak de blaas regelmatig leeg zoals de arts heeft voorgeschreven. Dit gebeurt meestal rond de 3 à 4 uur. Maak de blaas ook leeg voordat u ontlasting krijgt. Zo voorkomt u lekkage langs de buitenkant van de katheter door het persen.
- Was de handen voor en na het gebruik van het katheterventiel.
- Open het kraantje door de groene hendel naar beneden te duwen.
- Laat de urine in het toilet of in een opvangbak aflopen.
- Sluit het kraantje door de groene hendel naar boven te duwen.
- Maak het buisje schoon met lauw water.

Wisselen van het katheterventiel

- Was de handen en droog deze zorgvuldig.
- Open de verpakking.
- Pak met een hand de katheter vast en knik deze (zoals bv. een tuinslang) zodat er geen urine uit kan lopen.
- Ontkoppel het gebruikte katheterventiel van de katheter.
- Desinfecteer het aansluitpunt van de katheter met alcohol.
- Pak met de andere hand het schone katheterventiel en sluit deze aan op de katheter.
- Gooi het gebruikte katheterventiel in de afvalbak.