

Uro-Tainer Solutio R (6%) voor onderhoud urinekatheter - 100ml - per stuk

07/10/2025 20:27:02



Artikelnummer	010428
Prijs excl. BTW	€ 3,46
Prijs incl. BTW	€ 4,19
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Bij blaasspoelen wordt de blaas gespoeld (gereinigd) met een speciale spoelvloeistof. Door het spoelen kan een infectie in de blaas of aanslag in de katheter worden voorkomen. Een licht hypotone vloeistof die door de hogere concentratie citroenzuur en gluconolacton speciaal bedoeld is voor katheters die hardnekkig verkalken en waarbij Suby G niet voldoende resultaat geeft. Daarnaast minimaliseert deze vloeistof het trauma bij het verwijderen van de verblijfskatheter.

Hoe werkt de Solutio R[®] blaasspoeling?

- Breng de vloeistof op lichaamstemperatuur door het zakje ± 15 min in een bak handwarm water te leggen.
- Was uw handen vóór de handeling. Zorg dat het katheteruiteinde en het uiteinde van de katheterzak vrij liggen op een schone ondergrond (schone handdoek).

- Haal het zakje met vloeistof uit de verpakking. Sluit met het klemmetje de canule (slangetje) van het spoelzakje af. Verwijder de veiligheidsring.
- Trek het beschermkapje van de canulepunt van het spoelzakje.
- Sluit het zakje vervolgens aan op de katheter. Open de toevoer van het zakje door de klem terug te schuiven.
- Door het zakje hoger te houden dan blaasniveau of voorzichtig te knijpen, loopt de vloeistof via de katheter in de blaas.
- Nadat het zakje leeg is, houdt u het zakje weer lager en dan stroomt de urine vanuit de blaas weer in het zakje (Suby G[®] en Solutio R[®] moeten ongeveer 2 minuten inwerken).

Samenstelling: Per 100 ml: citroenzuur monohydraat 6,0 g, gluconolacton 0,6 g, licht magnesiumcarbonaat 2,8 g, natriumedetaat 2H₂O 0,01 g in water voor injecties. pH=4