


Uro-Tainer Suby G (3,23%) voor onderhoud urinekatheter - 100ml - per stuk

08/10/2025 00:52:20

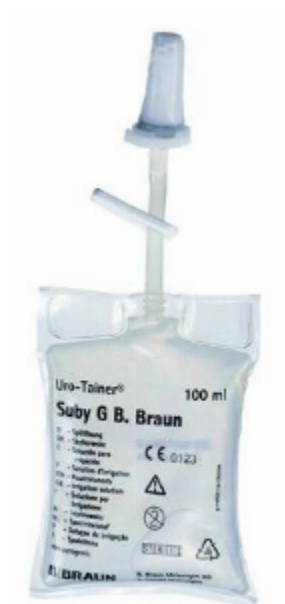

Artikelnummer	010426
Prijs excl. BTW	€ 3,85
Prijs incl. BTW	€ 4,66
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Bij blaasspoelen wordt de blaas gespoeld(gereinigd) met een speciale spoelvloeistof. Door het spoelen kan een infectie in de blaas of aanslag in de katheter worden voorkomen. Een licht hypotone vloeistof die minder irriterend is door toevoeging van magnesium. Deze vloeistof is speciaal bedoeld ter voorkoming van kristallisatie van fosfaten en voor het oplossen van bestaande verkalking bij de verblijfskatheter.

Hoe te werk gaan met de Blaasspoeling Suby G[®]:

- Breng de vloeistof op lichaamstemperatuur door het zakje ± 15 min in een bak handwarm water te leggen.
- Was uw handen vóór de handeling. Zorg dat het katheteruiteinde en het uiteinde van de katheterzak vrij liggen op een schone ondergrond (schone handdoek).
- Haal het zakje met vloeistof uit de verpakking. Sluit met het klemmetje de canule (slangetje) van het spoelzakje af. Verwijder de veiligheidsring.

- Trek het beschermkapje van de canulepunt van het spoelzakje.
- Sluit het zakje vervolgens aan op de katheter. Open de toevoer van het zakje door de klem terug te schuiven.
- Door het zakje hoger te houden dan blaasniveau of voorzichtig te knijpen, loopt de vloeistof via de katheter in de blaas.
- Nadat het zakje leeg is, houdt u het zakje weerlager en dan stroomt de urine vanuit de blaas weer in het zakje (Suby G[®] en Solutio R[®] moeten ongeveer 2 minuten inwerken).

Samenstelling: Per 100 ml: citroenzuur monohydraat 3,23 g; licht magnesiumoxyde, 0,38 g; natrium-bicarbonaat 0,7 g; natriumedetaat 2H₂O 0,01 g in water voor injectie. pH=4.2