



Artikelnummer	016133
Prijs excl. BTW	€ 10,90
Prijs incl. BTW	€ 13,19
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Flamirins[®] wordt gebruikt om de wond te reinigen en vastzittende kompressen los te maken. Flamirins[®] is een isotone oplossing om wonden te reinigen. Schoongemaakte wonden genezen beter. Flamirins[®] verwijdert mechanisch vreemde deeltjes en dood weefsel uit de wond, waardoor het risico op infectie verminderd wordt.

Eigenschappen van Flamirins[®]

- gebufferd (zure pH)
- isotoon

Deze eigenschappen zorgen ervoor dat elke kleine wond eenvoudig, snel en grondig gereinigd kan worden. Na opening kan Flamirins[®] nog meermaals tot vervaldatum gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing voor Flamirins[®]

- Verwijder de dop van de fles.
- Reinig de wond door de fles stevig samen te drukken en vloeistof in de wond te sproeien.
- Doe de dop weer op de fles.
- Dep de wond voorzichtig droog.
- Indien nodig, dek de wond af met een geschikt verband.

Voorzorgsmaatregelen voor Flamirins[®]

- Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet gebruiken bij irritatie of allergie voor een van de bestanddelen.
- Niet als antisepticum gebruiken.
- Niet gebruiken op de oogleden of in de ogen. Als Flamirins[®] met de ogen in contact komt, spoel dan ten minste 5 minuten met stromend water.
- Neem contact op met een arts als de wond verergert.

Flamirins[®] is verkrijgbaar in een sprayfles voor een snelle, makkelijke en hygiënische behandeling. De kracht van de spray is aanpasbaar. Flamirins[®] is geschikt voor zowel de klinische omgeving en de thuiszorg.