



Artikelnummer	016214
Prijs excl. BTW	€ 22,32
Prijs incl. BTW	€ 27,01
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Steranios 2% is een hoge kwaliteit ontsmettingsmiddel dat gebruikt wordt voor de desinfectie van medische hulpmiddelen, chirurgische en medische materiaal, medische endoscopie apparatuur en warmtegevoelige materiaal. Steranios 2% zorgt voor een volledige, koude desinfectie door onderdompeling van medische apparatuur of instrumenten.

Steranios 2% is een heldere, groene oplossing zonder activator en is dus gebruiksklaar.

Deze oplossing is in een uur actief tegen bacteriën, gisten, schimmels, virussen en mycobacteriën in 20 minuten. De doeltreffendheid van het bad kan om de 4 uur met een specifiek strip gecontroleerd worden. Het bad kan tot 7 dagen bewaard worden (overeenkomstig nota DGS 591 van 17/12/2003). Steranios 2% heeft een brede compatibiliteit met alle soorten materialen. Het kan met elk type voordesinfectie

reinigingsmiddel gecombineerd worden.

Specificaties van ontsmettingsmiddel Steranios 2%

- Eenvoudig te gebruiken
- Neutrale pH
- Maakt het volledige, koude desinfectie mogelijk voor warmtegevoelige instrumenten
- Zonder verdunning
- Verwezen producten in de positieve lijst S.F.H.H
- Doorzichtige, groene oplossing
- Actief tegen *Helicobacter pylori*
- Gebufferde glutaraldehydeoplossing (2%, pH 6, natriumcitraat)
- Steranios 2% ECS bevatten ingrediënten die de verdamping van glutaraldehyde beperken en beheersen.
- Compleet sporendodend (5 log reductie)
- Grote compatibiliteit met elk type materiaal
- Houdbaarheid: 3 jaar na de productiedatum
- Wordt gebruikt in combinatie met een pré-desinfecterend reinigend product

Gebruiksaanwijzingen voor ontsmettingsmiddel Steranios 2%

Voor het gebruiken van het ontsmettingsmiddel Steranios 2%, dient het medisch apparaat gereinigd te worden met een type product: Aniosyme DD1, Hexanios G+R, of Aniosyme PLA II. Spoel het apparaat zorgvuldig uit. Spoel de endoscopische apparatuur zorgvuldig uit en ga erover met een doekje. Om het medische apparaat te desinfecteren giet je het ontsmettingsmiddel Steranios 2% in een bak en bedek je de bak. Laat het, afhankelijk van de gewenste activiteit, 10 minuten of een uur poseren en spoel het daarna grondig af met steriel of gefiltreerd (0.2µm) water. Spoel endoscopische instrumenten goed af aan de binnen- en buitenkant. Droog ten slotte het medisch apparaat af met een doek voor éénmalig gebruik. Bewaar het medisch apparaat zo aseptisch mogelijk tot het volgende gebruik. OPGELET!! De ontsmettingsmiddel Steranios 2% wordt als een gevaarlijke oplossing beschouwd! Houd U aan de voorzorgsmaatregelen! Opslagtemperatuur: van +5°C tot +35°C

Samenstelling

Steranios 2% ECS bevatten 2 ingrediënten die samen de verdamping van glutaraldehyde beperken.. Steranios 2% - Desinfectiemiddel voor medisch materiaal

- Steranios 2% is een hoge kwaliteit ontsmettingsmiddel dat gebruikt wordt voor de desinfectie van medische hulpmiddelen, chirurgische en medische materiaal,

medische endoscopie apparatuur en warmtegevoelige materiaal. Dit ontsmettingsmiddel zorgt voor een volledige, koude desinfectie door onderdompeling van medische apparatuur of instrumenten.

- Steranios 2% is een heldere, groene oplossing zonder activator en is dus gebruiksklaar.
- Deze oplossing is actief tegen bacteriën, gisten, schimmels, virussen en mycobacteriën in 20 minuten.
- Deze oplossing is in een uur actief tegen bacteriële sporen.
- De doeltreffendheid van het bad kan om de 4 uur met een specifiek strip gecontroleerd worden.
- Het bad kan tot 7 dagen bewaard worden (overeenkomstig nota DGS 591 van 17/12/2003).
- Het ontsmettingsmiddel Steranios 2% kan gedurende 3 jaar, vanaf de fabricagedatum, gebruikt worden.