



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | S1003       |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 2,01      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 2,43      |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

De Swash Perineum Wipes zijn vochtige 3-in-1 reinigingsdoekjes, speciaal ontwikkeld voor de gevoelige huid. Elk doekje is geïmpregneerd met een parfumvrije lotion die 3% Dimethicone bevat – een huidbeschermend ingrediënt dat verzorgt én beschermt. Dankzij de 3-in-1 werking (reinigen, verzorgen én beschermen) verlopen zorgmomenten efficiënt, comfortabel en hygiënisch. Het extra lange en zachte doekje is huidvriendelijk en verwijdert zelfs harde of korrelige ontlasting moeiteloos, zonder de huid te irriteren.

Belangrijkste voordelen:

- 3-in-1 werking: reinigt, verzorgt en beschermt
- Bevat 3% Dimethicone voor huidbescherming
- Parfumvrij – geschikt voor de gevoelige huid
- Zacht, extra lang doekje voor een comfortabele toepassing
- Verwijdert zelfs hardnekkige ontlasting op een milde manier

- Ideaal voor gebruik bij dagelijkse incontinentiezorg

## Gebruiksaanwijzing

- Indien gewenst, kan het pakketje vóór gebruik (gesloten verpakking) 20 seconden op 800 watt worden verwarmd in de magnetron.
- Controleer vóór gebruik de temperatuur van de wasdoekjes.
- Verwijder nat en vuil incontinentiemateriaal. Indien nodig kunnen grote hoeveelheden ontlasting voorzichtig worden weggenomen met het incontinentiemateriaal, tissues of doekjes.
- Open de Swash-verpakking en haal een doekje eruit.
- Reinig de vervuilde perineumstreek met een Swash Perineum doekje van voor naar achter. Gebruik zoveel doekjes als nodig.
- Gebruik de doekjes eenmalig.
- Zorg dat de huid droog is voor nieuw incontinentiemateriaal wordt aangetrokken.
- Herhaal deze stappen na elke urine- of ontlastingsincontinentie-episode.
- Ieder pakketje dient persoonsgebonden te worden gebruikt.