



Artikelnummer	265239
Prijs excl. BTW	€ 2,52
Prijs incl. BTW	€ 3,05
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Swash Shampoo Cap: shampoo & conditioner Was elk haartype comfortabel, snel en gemakkelijk, zonder onder de douche te stappen! Met de Swash Shampoo Cap kan het haar van cliënt/patiënt gemakkelijk en zonder geknoei gewassen worden, terwijl de patiënt daarvoor niet uit bed hoeft. Met de Swash Shampoo Cap is het mogelijk om elk haartype te wassen in 75% minder tijd dan traditionele wasmethodes. De cap is geïmpregneerd met een lotion die het haar grondig reinigt, pH-huidneutraal is en een positief effect heeft op huidirritaties. In slechts 3 minuten en zonder uit te spoelen, is het haar schoon en fris!

Gebruiksaanwijzingen

- Indien gewenst, verwarm de Shampoo Cap vóór gebruik (gesloten verpakking) 20 seconden op 800 watt.
- Controleer de temperatuur van een verwarmde Shampoo Cap.

- Plaats de Shampoo Cap op het hoofd en zorg dat alle haren bedekt zijn. Laat de oren vrij.
- Masseer het haar 2 tot 3 minuten zachtjes.
- Verwijder voorzichtig de Shampoo Cap van het hoofd (spoel de lotion niet uit).
- Droog het haar met een handdoek.
- Kam het haar met een fijne kam.
- Breng het haar op de gebruikelijke wijze in model.
- Gooi de Shampoo Cap na gebruik direct weg.