



Artikelnummer	071064
Prijs excl. BTW	€ 64,34
Prijs incl. BTW	€ 77,85
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

De Genu Pro Comfort kniebrace is voorzien van een knieschijf insert in siliconenmateriaal. De proprioceptie wordt verzekerd door elastisch compressieweefsel. De Genu Pro comfort is extra comfortabel met super rekbaar weefsel aan de achterkant. De kniebrace is aan de binnenzijde afgewerkt met antislip aan de zijkanten in siliconenmateriaal. Hierdoor blijft de kniebrace nog beter op zijn plaats.

Indicaties Genu Pro Comfort:

- Pijn in knie- of aan knieschijf
- Lichte patella instabiliteit
- Patella tendinopathie (jumper's knee)
- Pijn en/of zwelling in de knie
- Lichte tot matige artrose van de knie

Werking Genu Pro Comfort :

- Adaptieve flex air pelotte om de patella (knie-schijf) te ondersteunen
- Gestandaardiseerd elastisch compressiebreiwerk (23-32 mmHg) dat steun en proprioceptie biedt
- Specifieke constructie van het breiwerk om de pasvorm te vergemakkelijken
- Het achterpand van de kniebrace en de oorstukjes zijn van specifieke materialen gemaakt om het aantrekken te vergemakkelijken
- Viscose draad toegepast voor meer zachtheid
- Kniebrace die op zijn plaats wordt gehouden op het been dankzij de flexibele balleinen en de anti-slip systeem

Product eigenschappen:

Het hulpmiddel is uitsluitend bestemd voor de behandeling van de vermelde indicaties en voor patiënten van waarvan de maten overeenkomen met de maattabel. Het product kan beiderzijds gedragen worden en is verkrijgbaar in 7 maten. De kniebrace bestaat uit :

- Een verwijderbaar patella-inzetstuk
- Anatomisch geweven materiaal met een zachte en comfortabele maas aan de achterkant van de kniebrace
- Twee flexibele laterale balleinen

Gebruiksaanwijzing:

Het wordt aanbevolen de brace direct op de huid te dragen, behalve bij contra-indicaties.

• Laat de patiënt op de rand van een stoel zitten en vraag om de knie te buigen met een flexie van 30-60°. Om het aanbrengen te vergemakkelijken, gebruikt u de trekflappen aan de bovenkant van de kniebrace . • Trek de kniebrace over het been heen terwijl de voet gestrekt is. • Zorg ervoor dat de patella (knie-schijf) op de juiste manier in het midden van de insert geplaatst is . • Zorg ervoor dat de kniebrace perfect op het been wordt gespannen

Goed om te weten:

- Machinewasbaar op 30°C (fijnwasprogramma). Gebruik een wasnet als het kan.
- Het wordt aanbevolen het patella-inzetstuk te verwijderen voor het wassen. Let op de positie bij het terugplaatsen: plat gedeelte aan de buitenkant en breedste deel van het patella-inzetstuk aan de bovenzijde van de kniebrace.
- Was het apparaat niet meer dan 20 keer in de machine.
- Gebruik geen detergents, wasverzachters of agressieve producten (chloorhoudende producten, enz.).
- Uitwringen door druk en laten drogen drogen zonder direct in contact met een warmtebron (dus niet aan de radiator, in de volle zon, met een föhn, in de

wasdroger).

- Als het apparaat wordt blootgesteld aan zeewater of chloorwater, goed afspoelen met schoon water.