



Artikelnummer	150230
Prijs excl. BTW	€ 46,27
Prijs incl. BTW	€ 55,99
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Een draaischijf zorgt ervoor dat de rug van de verzorger minder belast wordt bij het verplaatsen van een patiënt. Een draaischijf vergemakkelijkt de verplaatsing uit de rolstoel of het bed. Omdat de draaischijf meedraait wordt het verplaatsen van bijvoorbeeld het bed naar de rolstoel eenvoudiger. De draaischijf is geschikt voor personen die nog wel over een stafunctie en voldoende stabiliteit beschikken, maar die verder moeilijk te been zijn.

Gebruiksaanwijzing van de draaischijf

- Plaats de draaischijf op de vloer onder de voeten van de zittende zorgontvanger.
- Verhinder het ongewild draaien van de draaischijf door de voet op de draaischijf te plaatsen met de hiel op de grond.
- Breng de patiënt tot staan.

- Via een duwende beweging van de voet wordt de draaischijf nu gedraaid.
- Blokkeer opnieuw de draaischijf met de voet vooraleer de patiënt te laten zitten.

Afbeeldingen

