

Medische visco-elastische matras - ergonomisch gevormd - 195 x 90 x 14cm

08/10/2025 11:49:43



Artikelnummer	150281
Prijs excl. BTW	€ 334,10
Prijs incl. BTW	€ 404,26
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

De Alova-matras is een statische matras voor de preventie en de behandeling van bedzweren. De preventie van bedzweren bestaat er op de eerste plaats in om de steunpunten van het lichaam op de matras gemiddeld elke drie uur te veranderen om een te langdurige druk van de bloedvaten en de beenderen te vermijden en om een goede circulatie van de weefsels toe te staan. De lakens op het bed niet te strak aanspannen zodat de matras doeltreffend blijft. Het visco-elastische schuimrubber van Alova met een lage veerkracht beschikt over 3 verschillende punten met extra draagvermogen die de druk van het lichaam op de matras verminderen. Een steunvlak dat in het oppervlak van de Alova-matras is geïntegreerd in dat deel waar er contact is met de onderste ledematen zorgt voor een ontlasting van de hielen. De combinatie van deze principes verbeteren de bloedcirculatie en vermindert de druk op de zones die het grootste risico op bedzweren vertonen.

Indicaties van de anti-décubitus matras

Voor ligpatiënten met een beperkte mobiliteit en met een «gemiddeld tot hoog» risico op bedzweren (volgens de schaal van Braden of een andere geldige schaal en volgens de opinie van de arts). Helpt bij de behandeling van bedzweren 1 tot 2 volgens EPUAP.

Advies bij gebruik en contra-indicaties van de anti-décubitus matras

Er bestaan geen specifieke contra-indicaties voor de gebruikswijze en -plaats. De druk op een passieve matras gaat nooit helemaal weg. Magere personen of personen met letsels aan de wervelkolom kunnen dit product ook gebruiken. De matras is gemaakt om geïnstalleerd te worden op een medisch onderbed dat hierop is voorzien. De matras moet worden gebruikt met de meegeleverde schuimrubber. Als u een bed met een reling gebruikt moet de minimale afstand tussen de hoogte van de matras en de hoogte van de reling minstens 22 cm bedragen. Als u een bed met verschillende functies gebruikt, dient u na te gaan dat de druk goed verdeeld is.

Verwijderbare en afwasbare hoes van de anti-décubitus matras

De bedoeling van de meegeleverde, verwijderbare hoes is om de matras te beschermen tegen besmetting door afvalvloeistoffen. Als de hoes vlekken heeft dient u ze te vervangen en zorg ervoor dat u de matras niet gebruikt zonder hoes. De hoes kan worden gewassen en gedesinfecteerd in de wasmachine op 90° C. De hoes kan worden gedesinfecteerd met courant verkrijgbare EG-gehomologeerde ontsmettingsproducten (geen bijtende middelen gebruiken). De hoes mag niet worden gestreken of in de droogkast worden gedroogd. De bedoeling van het gebruik van de hoes is om het risico op kruiscontaminatie te beperken.

Verpakking en opstelling van de anti-décubitus matras

De matras wordt geleverd met een verwijderbare hoes met rits. Het product kan onmiddellijk worden gebruikt. Plaats de matras met het genaaide etiket op het gedeelte van de hoes dat voor het hoofd is bedoeld of met de zeefdruk van de pictogrammen op het bovenoppervlak van de hoes. Het laken mag niet zijn vastgemaakt aan de matras zodat de correcte werking van de matras niet wordt tegengehouden. De matras moet worden geïnstalleerd met de visco-elastische stof op de bovenkant. Het bovenste gedeelte is gemarkeerd en is makkelijk zichtbaar op de matras. De hoes is ook gemarkeerd. Het gedeelte voor de ontlasting van de hielen is dat deel waar de vorm van de voeten is ingedrukt.