



Artikelnummer	108399
Prijs excl. BTW	€ 97,58
Prijs incl. BTW	€ 118,07
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Aesculap Collin nietjesverwijderaar wordt gebruikt voor het verwijderen van nietjes bij chirurgische incisies.

Wat is een nietjesverwijderaar?

Chirurgische nietjes worden gebruikt voor het sluiten van chirurgische incisies en wonden met redelijk rechte randen. Hoe lang de nietjes op hun plaats worden gelaten hangt af van de wond en de snelheid waarmee de patiënt geneest. De nietjes worden meestal verwijderd bij een huisartsenpraktijk of in een ziekenhuis. Aan de hand van een nietjesverwijderaar wordt ieder nietje apart met de nieltang verwijderd. De nieltang is opnieuw steriliseerbaar.

Hoe gaat u het best te werk?

Bij agraves, kleine nietjes die vaak gebruikt worden bij chirurgische incisie wordt met een

speciale tang de nietjes verwijderd. Meestal zijn het veel nietjes en is het een geduldig karwei, niet geheel vrij van pijn die toch goed te dragen is. Na het verwijderen van de nietjes kan nog door de arts beslist worden om een verband aan te brengen.

- Maak de wond schoon. Afhankelijk van hoe goed de incisie geheeld is, moet je een fysiologische zoutoplossing gebruiken, een antiseptisch middel zoals alcohol, of gesteriliseerde wattenstaafjes om vuil of opgedroogde vloeistoffen om en uit de wond te verwijderen.
- Schuif het onderste gedeelte van de nietjesverwijderaar onder het midden van het nietje. Begin bij één eind van de geheelde incisie.
- Knijp de handvatten van de niettang helemaal op elkaar. Het bovenste stuk van de agravetang zal het midden van het nietje naar beneden drukken, waardoor de uiteinden van het nietje uit de incisie komen.
- Verwijder het nietje door de handvatten niet langer samen te drukken. Laat verwijderde nietjes vallen in een wegwerpbakje of -zakje.
- Trek het chirurgische nietje in dezelfde richting eruit als het erin ging, om te voorkomen dat je de huid kapotmaakt.
- Het kan zijn dat je een licht kneepje of steekje voelt, of een licht gevoel alsof er aan je huid wordt getrokken. Dit is normaal.
- Gebruik de nietjesverwijderaar om alle andere nietjes verder te verwijderen.

Zodra je het einde van de incisie hebt bereikt, moet je de omgeving van de wond opnieuw inspecteren op nietjes die je misschien hebt gemist. Dit zal helpen bij het voorkomen van toekomstige huidirritatie en infectie van de wond. Maak de wond opnieuw schoon met een antiseptisch middel en dek af met een verband indien nodig.