


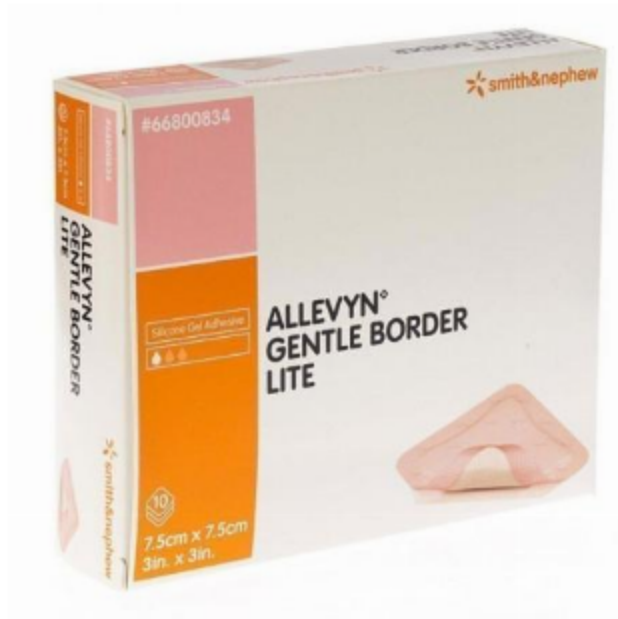

Artikelnummer	023003
Prijs excl. BTW	€ 23,17
Prijs incl. BTW	€ 28,04
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

ALLEVYN™ Gentle Border Lite is een extra-dun siliconen hydro cellulair schuimverband voor alle wonden met weinig wondvocht. Het is ontworpen voor een efficiënte wondzorg bij dagelijks voorkomende wonden.

Kenmerken & voordelen:

- Aanpasbaar, voor een betere hechting
- Vermindering van het risico van bacteriële besmetting dankzij de OPSITE film, ondoorlaatbaar voor water en bacteriën
- Pijnloos en atraumatisch te verwijderen dankzij de siliconengel kleeflaag, aangepast aan het gebruik op een fragiele huid.
- Laat douchen toe
- Gemakkelijk aan te brengen, ook op moeilijke plaatsen op het lichaam
- Eenvoudige applicatie, kan opgetild en opnieuw aangebracht worden zonder zijn hechtende eigenschap te verliezen

- Alle voordelen van de Triple-Action-Technology voor een optimale genezing in een vochtig wond milieu.

Indicaties:

Voor secundaire genezing van acute en chronische oppervlakkige of diepere wonden met weinig tot matige hoeveelheid wondvocht zoals:

- Skin tears
- Eerste- en tweedegraads brandwonden
- Chirurgische wonden
- Donorplaatsen
- ...

ALLEVYN Gentle Border Lite is niet aangewezen voor gebruik op het sacrum.

Aanbrengen:

- Kies een kompres van de juiste afmeting.
- Reinig de huid rond de wond door overtollig vocht te verwijderen.
- Verwijder één deel van het schutblad van ALLEVYN Gentle Border Lite en plaats het verband op de huid.
- Strijk het verband vlak over de wond om te zorgen dat er geen plooien in zitten.

ALLEVYN Gentle Border Lite application Frequentie van verbandwisseling: Tijdens de eerste stadia van de wondgenezing dienen ALLEVYN Gentle Border Lite verbanden regelmatig te worden geïnspecteerd. Het verband kan maximaal 7 dagen ter plaatse blijven, afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht en het plaatselijk protocol.

Verwijderen: Om het ALLEVYN Gentle Border Lite verband te verwijderen, tilt u een hoekpunt op en trekt u het verband voorzichtig los totdat het volledig van de wond verwijderd is. Voorzorgsmaatregelen: Gebruik ALLEVYN Gentle Border Lite niet met oxiderende stoffen zoals hypochlorietoplossingen (bv. DAKIN) of waterstofperoxide, aangezien deze de absorberende polyurethaan componenten van het verband kunnen afbreken. Stop met het gebruik als roodheid of overgevoeligheid optreedt. ALLEVYN Gentle Border Lite is een product voor eenmalig gebruik. Het gebruik bij meer dan één patiënt kan aanleiding geven tot kruisbesmetting of infectie. Door de verpakking te openen, wordt de steriele barrière verbroken. Daarom dient u geen geopend verband te bewaren voor gebruik op een later tijdstip.

Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

R	Afmeting	Foam oppervlakte	Verpak.	CNK
	<i>Vierkanten vormen</i>			
66800834	7,5 x 7,5 cm	5 x 5 cm	10	2825-750

66800835	10 x 10 cm	7,5 7,5 cm	10	2825-784
66800840	15 x 15 cm	12,5 x 12,5 cm	10	2825-842
	<i>Rechthoekige vormen</i>			
66800836	5,5 x 12 cm	3 x 9,5 cm	10	2825-800