



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 020150      |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 13,05     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 15,79     |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

Nexcare ColdHot pack is een herbruikbare koude en warmte pack die de pijn zowel koud als warm op natuurlijke wijze verlicht.

**Nexcare ColdHot is een herbruikbaar thermisch kussen, ontworpen voor de behandeling van blauwe plekken, ontstekingen & rug- en buikpijn te verlichten.**

Uitstekende natuurlijke therapie. Natuurvriendelijk product: De gel in het kussen is 99% biologisch afbreekbaar. Soepel en flexibel, de gel past zich rond elk pijnlijk gebied dat moet behandeld worden.

- Koud gebruik - bij zwellingen, ontstekingen en pijn Bewaar het kompres in uw diepvries. Gebruik het kompres niet langer dan 20 minuten en laat de behandelde plaats ook 20 minuten rusten vooraleer u het kompres opnieuw aanbrengt.
- Warm gebruik - pijnlijke spieren en stijfheid *Warmwaterbad*: Laat voldoende water koken en dompel het kompres 6 à 8 minuten in het water wanneer u deze van het

vuur haalt. *Magnetron*: Leg het kompres in de magnetron en verwarm volgens de opwarmsymbolen op de bijsluiter. Kompres op de te behandelen plaats aanbrengen. Na 30 minuten zal het kompres opnieuw opgewarmd moeten worden. Breng het kompres nooit rechtstreeks op de huid aan.