



Artikelnummer	31111
Prijs excl. BTW	€ 250,16
Prijs incl. BTW	€ 302,69
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

CPR Uni-padz met reanimatiefeedback voor AED 3 (incl. accessoirekit)

De CPR Uni-padz met reanimatiefeedback voor AED 3 zijn universele elektroden uitsluitend bedoeld voor gebruik met de ZOLL AED 3 defibrillator.

Productinformatie

- Universele elektroden, zowel voor volwassenen en kinderen bruikbaar: met de kinderknop kunt u eenvoudig en snel overschakelen van reanimatie van een volwassene naar reanimatie van een kind. Er hoeven geen andere elektroden te worden aangesloten. Geen sleutel nodig.
 - Kinderen: 8 jaar of jonger, of lichter dan 25 kg

- Uitsluitend bedoeld voor gebruik met de ZOLL-AED 3 defibrillator.
- CPR Uni-Padz wordt vooraf aangesloten op de ZOLL-AED om ze snel te kunnen gebruiken
- Levensduur van vijf jaar vanaf de installatie.
- Uitgebreide feedback over de reanimatie (Real CPR Help)

Real CPR Help

Bij reanimatie is het niet ongevoerd dat compressies qua tempo en diepte niet behoorlijk worden uitgevoerd. Volwassen slachtoffers hebben ten minste 100 compressies per minuut en een diepte van ten minste 5 cm (2 inches) nodig. De compressies moeten goed worden uitgevoerd om bloed en zuurstof efficiënt aan te voeren. De ZOLL AED Plus zet compressiegegevens onmiddellijk om vanaf de CPR Uni-padz en verstrekt een adaptieve metronoom die de hulpverlener helpt om het juiste tempo en de juiste diepte aan te houden, met boodschappen zoals "Harder drukken" of "Goede compressies". Ook de compressiediepte van de reanimatie wordt op het displayscherm weergegeven. De AED Plus van ZOLL is de enige AED die de hulpverlener helpt om tijdens de reanimatie het juiste tempo en de juiste diepte van de borstcompressies aan te houden. Geen enkele andere AED bezit deze eigenschap.

Bijbehorende accessoireskit

Elke set CPR Uni-padz wordt geleverd met een bijbehorende accessoireskit voor reanimatie, wat alles bevat wat u nodig heeft voor de redding. Hierin zitten

- een schaar om de kleding van het slachtoffer open te knippen en de borstkas vrij te maken
- handschoenen (niet van latex) en een beademingsmasker ter bescherming van de hulpverlener
- een papieren doekje om te zorgen dat de contactpunten met de elektroden droog zijn
- een scheermesje om eventueel haar te verwijderen
- en een doekje voor schoonmaken achteraf.