



Artikelnummer	040702
Prijs excl. BTW	€ 10,35
Prijs incl. BTW	€ 12,52
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Lamiderm emulsie - Wondheling. Emulsie die de genezing van snijwonden en brandwonden versnelt.

Wanneer Lamiderm emulsie gebruiken?

- 1^e en 2de graadsbrandwonden
- Niet-geïnfekteerde wonden
- Zonnebrand
- Roodheid van de huid door radiotherapie

Eigenschappen van Lamiderm emulsie

- Gel crème
- Vocht inbrengend
- Verzachtend

- Helend
- Herstelt de huid

Gebruiksaanwijzing van Lamiderm

- Opening van de tube Bij het eerste gebruik, de verzegeling van de tube doorprikken met de bovenkant van de dop.
- 1e graadsbrandwonden en zonnebrand Breng Lamiderm aan in een dikke laag en laat indringen zonder te wrijven. Dit 2 à 4 maal per dag herhalen.
- 2e graadsbrandwonden en niet-geïnfecteerde wonden Breng na reinigen van de brandwonde of de niet-geïnfecteerde wonde een dikke laag Lamiderm aan en doe dit meerdere malen per dag. Als nodig afdekken met een vochtig kompres. Gebruik geen droog absorberend verband.
- Roodheid van de huid door radiotherapie Breng dagelijks 2 à 3 maal Lamiderm aan volgens de aanbevelingen van de dokter en laat indringen door een lichte massage.

Voorzorgen voor gebruik

- Niet gebruiken
 - Bij een bloedende wonde
 - Bij een geïnfecteerde wonde
- Dit medisch hulpmiddel biedt geen zonnebescherming.
- Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid aan één van de bestanddelen van dit product.
- Buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaren in de doos, beschermd tegen warmte.
- De uiterste gebruiksdatum die duidelijk vermeld staat op de verpakking en de tube niet overschrijden.

Studies van Lamiderm emulsie

- Zorgt voor een vochtig milieu wat de genezing bevordert (studie 1. 2008)
- Herstelt oppervlakkige brandwonden (studie 2 SSD. 2004)
- Gel t.o.v. emulsie even effectief bij bestraling (studie 3. 2008)
- Vermindert bij bestraling significant de intensiteit van acute dermatitis (studie 4. 2012)
- Versnelt de genezing van snij-en brandwonden (studie Arch Derm Res. 2015)
- Versnelt de vorming van macrofagen in de wonde 4 à 24 uur ipv 48 à 96 u: verbetert wondheling in ondiepe epiderm wonden (Coulomb studie 1997)
- Snellere genezing bij chirurgische ingrepen (Mohs) met Lamiderm dan met bacitracine (Kircik studie 2007)

- Efficiënt bij wondheling na Cryotherapie en electro desiccation (uitdroging) en curettage (Del Rosso studie 2007)

Samenstelling van Lamiderm emulsie

Gezuiverd water, ethyleenglycolstearaat, paraffine dun vloeibaar, pentaandiol, stearinezuur, vaste paraffine, perhydrosqualeen, avocado-olie, natriumalginaat, trolamine, cetylpalmitaat, kaliumsorbaat, parfum honelia.