



Oogspoelfles/oogdouche met oogdop - Gevuld met 0,9% NaCl - 250ml

08/10/2025 07:23:12

Artikelnummer	410165
Prijs excl. BTW	€ 8,46
Prijs incl. BTW	€ 10,24
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Oogdouche met oogdop gevuld met 0,9% NaCl

Waarom is oogspoeling belangrijk?

De ogen zijn gevoelig voor schade van buitenaf. Denk hierbij aan een bijtende vloeistof die in de ogen terecht komt of stofdeeltjes. De ogen kunnen blijvend beschadigd raken wanneer er niet direct behandeld wordt. Een oogspoeling voorkomt verdere schade aan de ogen door schadelijke stoffen uit het oog weg te spoelen.

Hoe gebruik je de oogspoeling?

Een oogspoeling bestaat uit een knijpfles met een verlengstuk eraan. Het uiteinde past precies om het oog. Dit gedeelte wordt op het oog gezet terwijl het hoofd licht achterover gebogen wordt. Het oog wordt open gehouden terwijl de vloeistof in het oog wordt gespoten. Soms is het nodig dit meerdere malen te herhalen.

Voordelen van het oogspoelsysteem:

- Werkzame spoeloplossingen Geschikt bij het binnendringen van schadelijke deeltjes en ter neutralisatie van chemische stoffen in het oog of op het lichaam.
- Flexibele systeemoplossing Door verschillende flesgroottes en stations is het systeem geschikt voor de inzet bij de directe bedreigde werkplek of als mobiele oplossing.

- Steriel en hygiënisch Ongeopend tot 3 jaar houdbaar. Er is geen onderhoud en reiniging van de flessen noodzakelijk. Zo kan extra werktijd en dus kosten bespaard worden. De houdbaarheidsdatum bevindt zich op het etiket.
- Eenvoudig en snel gebruik In geval van eerste hulp is de spoeling in het oog of op/over het lichaam binnen enkele seconden mogelijk. Duidelijke en begrijpelijke gebruiksaanwijzingen met tekst en pictogram bevinden zich op het etiket.
- Hoge functie-zekerheid De ergonomisch gevormde oogdop past zich aan het oog aan en maakt een zachte alsook gelijkmatigespoeling mogelijk. Een CE-certificering conform de eisen voor medische uitrusting is aanwezig. De flessen voldoen aan de DIN 1293.