



Artikelnummer	3012
Prijs excl. BTW	€ 35,12
Prijs incl. BTW	€ 42,50
Voorraad	Nog slechts 9 op voorraad

Omschrijving

Vacutex wondverband - steriel - 10 stuks

Vacutex wondverband - steriel - 10 stuks is een speciaal wondverband dat bestaat uit 3 lagen van Polyester en Polyester-katoen filamenten die mechanisch werken als een laag niveau "pomp" d.m.v. capillaire werking. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de hoogte van de negatieve druk die Vacutex genereert 68mmHG is! Werking van Vacutex wondverband - steriel - 10 stuks

- Continue zuigkracht: Wondvocht wordt uit de wond gezogen in de eerste laag van het Vacutex wondverband. Wondvocht wordt 100% verticaal en actief uit het wondbed gezogen. De zuigkracht van Vacutex werkt alleen als de capillaire kanalen in contact komen met wondvocht. Voor diepe of ondermijnde wonden kunnen meerdere lagen Vacutex wondverband gebruikt worden om het wondvocht uit de wond te zuigen

- Drainage: Door middel van horizontale drainage wordt het afgezogen wondvocht vanuit de eerste laag opgesloten en verspreid in de centrale (middelste) 2e laag. Vacutex blijft droog aan de huidcontactzijde,, enkel binnen het wondbed blijft het verband licht vochtig. Op deze manier kan het wondvocht de randen niet verweken
- Drainage en verwijdering: Als de centrale (middelste) laag van het Vacutex wondverband verzadigd is, wordt het overtollige wondvocht verplaatst naar de 3e, buitenste laag. Vanuit deze laag zal het wondvocht verdampen of (bij heel veel exsudaat) worden geabsorbeerd door een secundair (super) absorberend wondverband

Voordelen

- Aanzienlijke reductie van oppervlakkig en dieper gelegen oedeem in en rondom de wond. Hierdoor verbetert de microcirculatie en de bloedvoorziening in en rondom de wond waardoor de wondgenezing aanzienlijk zal versnellen
- Verhoging van lokaal (1mm) en dieper gelegen (3-6mm) zuurstof % in en rondom de wond. Hierdoor zal sneller granulatieweefsel aangemaakt worden
- Levert een bijdrage aan het mechanisch debridement in de wond. Door het verwijderen van debris uit de wond creëer je de noodzakelijke beginsituatie voor een optimaal genezingsproces van de wond

Indicaties

- Diabetische wonden
- Decubituswonden
- Veneuze beenulcera
- Fistels
- Brandwonden
- Acute/gesloten wonden met oedeem problemen

Contra-indicaties

- Arteriële bloedingen
- Als cliënten allergisch zijn voor polyester
- Op vaseline gebaseerde verbanden i.c.m. Vacutex blokkeren de capillaire werking van het verband
- Maligniteit in de wond
- Onbehandelde osteomyelitis
- Niet-enterale fistels en niet-geëxploreerde fistels
- Necrotisch weefsel waarin korstvorming aanwezig is
- Vrij liggende bloedvaten of organen
- Let op bij cliënten die anticoagulantia gebruiken of moeilijke wond hemostase hebben