


# Attends

## Tips bij het gebruik van de “Slip Active”

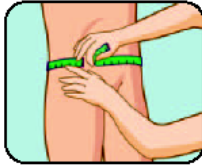



M (75-110 cm)  
L (100-145 cm)

Vouw de heupbanden volledig open.  
= trek aan de stickers.


Voor een goede pasvorm is het belangrijk dat u  
een product met de juiste maat kiest.



Breng de luier zo aan dat de **vochtindicator**  
**recht op de bilnaad** ligt.  
Zorg dat de luier nauwkeurig **aansluit in de**  
**liesplooien**.

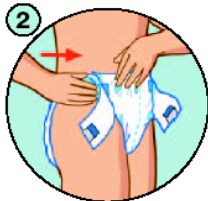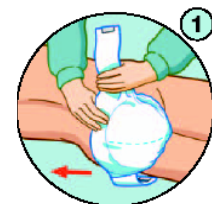

Trek de heupband naar voor en **fixeer deze**  
**langs beide zijden op de klittenband**  
(velcrohoekje).

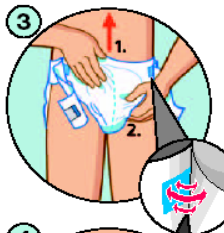

De **definitieve pasvorm aanpassen**:  
Trek het product zorgvuldig omhoog in de  
liesplooien.  
Zorg dat de luier **STRAK tegen het**  
**lichaam** aansluit.



Bevestig nu de uiteinden één voor één met  
de kleefstrips.

Losmaken van de klever kan je door de witte tape van de  
blauwe los te trekken.



- ✓ **Plooi de luier steeds doormidden zodat de anti-lekranden rechtop komen te staan.**
- ✓ **Doe de luier achterstevoren aan wanneer de persoon rechtop staat. Zo zie je beter wat je doet en kan de luier perfect aangebracht worden!**
- ✓ **Het is gemakkelijk om de luier open te scheuren langs de zijkant indien hij volledig verzadigd is. (=vochtindicator is dan twee derden verdwenen)**

[www.attends.be](http://www.attends.be)

Attends BVBA

Haachtsebaan 119/1, 3140 Keerbergen, Tel. 015/50 95 97

# Attends

## Goed om weten

- Kies het absorptievermogen van het product dat volgens individuele noden wordt vereist.
- Kies de correcte maat volgens heup/taille omtrek.
- Denk erover om Attends inlegluiers te gebruiken alvorens de Attends slips, zij bieden een veel grotere discretie.
- Attends slips kan een betere keuze zijn bij personen die luiers onbewust uittrekken.
- Maak dat de waterdichte buitenzijde van de slip niet tegen de huid zit.
- Laat de anatomie van de gebruiker besluiten hoe de heupbanden moeten aangepast worden.
- Als de heupbanden elkaar overlappen kan een kleinere maat een oplossing bieden.
- Controleer de vochtindicator en indien deze voor 2/3 verdwenen is moet het product vervangen worden. Indien niet kan het product opnieuw gebruikt worden.
- Bij het openen van de slip blijft de blauwe tape op de slip en moet enkel de witte losgetrokken worden.
- Droge producten kunnen opnieuw gebruikt worden na toiletbezoek.
- Vermijd op olie gebaseerde verzorgingsproducten en poeders, indien mogelijk. Deze zullen het absorptievermogen van het product beïnvloeden.

## Bij lekkage van een product:

- Controleer of de Attends slip werd aangedaan volgens de instructies eerder vermeld.
- Controleer de maat.
- Verhoog slechts de absorptiecapaciteit van het product wanneer u zeker bent dat het product goed werd aangedaan en na klinische beoordeling.



- Spoel het product niet door in het toilet.
- Volg het afvalbeleid.

Voor meer informatie bezoek onze website op [www.attends.be](http://www.attends.be)

[www.attends.be](http://www.attends.be)

Attends BVBA

Haachtsebaan 119/1, 3140 Keerbergen, Tel. 015/50 95 97