

MASTER
MOBILE
SPRAY



Gebbruiksinformatie

MasterMobile Spray

Herziening 03

Adres: NWT GmbH, Am Obstgut 9, 04425 Taucha
e-Mail: info@nwt.care | Internet: www.nwt.care

Inhoud

1	Belangrijke informatie voor de eerste inbedrijfstelling	6
1.1	Gebruikte symbolen	6
1.2	Algemene veiligheidsinstructies	7
1.3	Omvang van de levering	8
1.4	Verpakking	8
1.5	Recycling	8
2	Beoogd gebruik.....	9
2.1	Omgevingsomstandigheden	10
2.2	Opslag en vervoer	10
3	MasterMobile Spray.....	12
3.1	Voorraanzicht.....	12
3.2	Achteraanzicht.....	13
4	Handstukken.....	14
4.1	Pododent PLUS (L) & Pododent EVO (L)	15
4.2	GALAXY G65s & GALAXY G65Ls	15
5	Bescherming van klanten en gebruikers	16
6	Inbedrijfstelling.....	16
6.1	Het apparaat voorbereiden	16
6.2	Plaatsen en verwisselen van de draai-instrumenten	17
6.2.1	GALAXY G65s & GALAXY G65Ls.....	18
6.2.2	Pododent PLUS (L) & Pododent EVO (L).....	19
6.3	De watertank vullen	20
6.4	Aansluiten van de voetschakelaar	20
6.5	Aansluiten van de voedingseenheid	20
7	Bediening - MasterMobile	21
7.1	Bedieningspaneel	22
7.2	Geheugenfunctie	23
7.3	Snelheidsregeling met de voetschakelaar	23
7.4	Toetsblokkering Aanraakscherm	23
7.5	Opvoerstand	24
7.6	De spuitzak vervangen.....	24
8	Bediening - Handstuk	25
8.1	Handstuk - Pododent PLUS (L).....	26
8.1.1	Veranderen van de roterende instrumenten	26
8.1.2	Het handstuk loskoppelen van de motoreenheid	26
8.1.3	Bevestiging van het handstuk op de motoreenheid	26
8.2	Handstuk - Galaxy 65s & Galaxy 65Ls	27
8.2.1	Veranderen van roterende instrumenten	27
8.2.2	Het handstuk loskoppelen van de motoreenheid	27
8.2.3	Bevestiging van het handstuk op de motoreenheid	27
9	Reiniging en verzorging	28
9.1	Reiniging en ontsmetting - Afdeling voetverzorging	28

9.2	Reiniging en desinfectie - Handstukken	29
9.2.1	Reinigen van de lichtgeleiders - Pododent Plus L, Galaxy G65Ls	29
9.2.2	Onderhoud van de sproeifunctie	30
9.2.3	Reiniging en desinfectie - Pododent EVO (L)	30
9.2.4	Reiniging en desinfectie - Pododent PLUS (L), Galaxy 65s, Galaxy 65Ls	31
9.3	Reiniging, desinfectie en opslag van roterende instrumenten	33
10	Onderhoud	33
11	Accessoires en reserveonderdelen	34
12	Technische gegevens	34
13	Garantie	35
14	Verwijdering	35
15	Mogelijke foutmeldingen	36

Beste klant,

Dank u voor het vertrouwen dat u in ons stelt door de *MasterMobile Spray* aan te schaffen. Het is vervaardigd en getest volgens strenge kwaliteitscriteria.

Om het apparaat op een correcte en veilige manier te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing aandachtig leest voordat u het apparaat in gebruik neemt.

De *MasterMobile Spray* behoort tot de categorie paramedische apparaten die geschikt zijn voor cosmetische toepassingen in de voetverzorging. Het compacte apparaat met natte technologie is gebaseerd op de nieuwste technologie.

Alle machinefuncties worden getoond en bediend op het touch display. Zo kunt u gemakkelijk de geselecteerde snelheid, de draairichting van de frees en de hoeveelheid verstuiving controleren en eventueel wijzigen.

Met de voetbediening kunt u uw handen vrij houden voor uw werk en het motortoerental wijzigen door de voet te bedienen.

Wij wensen u veel succes en plezier met uw *MasterMobile Spray*.

Uw
NWT GmbH

1 Belangrijke informatie voor de eerste inbedrijfstelling

De gebruikersinformatie is een integraal onderdeel van de voetverzorgingseenheid en moet in de buurt worden bewaard. Als u het voetverzorgingsapparaat doorgeeft aan derden, geef dan ook de gebruikersinformatie door, want deze bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en het gebruik van het apparaat.

Om de vele voordelen van het apparaat te leren kennen en de veiligheid van het apparaat te waarborgen, is het absoluut noodzakelijk deze gebruikersinformatie en de daarin opgenomen veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen alvorens het apparaat in gebruik te nemen.

Controleer na het uitpakken of het apparaat compleet is volgens de leveringsomvang en tijdens het transport niet is beschadigd. Neem bij twijfel onmiddellijk contact op met uw contractpartner.

1.1 Gebruikte symbolen



Voorzichtig, Attentie. Belangrijke informatie.
Dit symbool wijst op gevaar voor personen of voor het apparaat.



Voorzichtig Netspanning! Gevaar voor elektrische schokken.



Verwijzingen naar aanvullende informatie in de gebruiksinformatie.



Verwijderingsbiljet

1.2 Algemene veiligheidsinstructies



- *Gebruik het apparaat alleen in perfecte staat en alleen in de zin van het beoogde gebruik.*
- *De gebruiker moet alle toepasselijke richtlijnen en wetten toepassen en naleven, alsmede de toepasselijke nationale voorschriften, met name de toepasselijke voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk en maatregelen ter voorkoming van ongevallen.*
- *Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u te controleren of de stroomsterkte en de netspanning van de stroombron overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.*
- *Sluit het apparaat alleen aan op een geschikt stopcontact. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voedingseenheid.*
- *Schakel het apparaat bij storingen onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem in dat geval contact op met uw contractpartner.*
- *Als de snelheidsinstelling (touch display) of de displayelementen schade vertonen of niet meer goed functioneren, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Schakel het apparaat onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw installateur.*
- *Als er vloeistoffen of andere vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld. Neem contact op met uw erkende dealer voordat u het apparaat verder gebruikt.*
- *Ongeoorloofd openen van het apparaat of manipuleren van het handstuk is niet toegestaan. Bij ongeoorloofd openen van het apparaat of het handstuk vervalt de garantie.*
- *De garantie vervalt eveneens indien de in de gebruiksaanwijzing vermelde verbruiksmaterialen niet worden gebruikt, indien de klant of andere onbevoegden met het apparaat knoeien, indien het apparaat wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, indien de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of oneigenlijk gebruik.*
- *In geval van abnormale werking van de voetverzorgingseenheid of het handstuk, het gebruik ervan onmiddellijk staken en contact opnemen met uw contractant.*
- *Alle handstukken, micromotoren en instrumenten zijn ontworpen en gebouwd voor hun specifieke toepassingen. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan menselijk weefsel, voortijdige slijtage, vernietiging van de instrumenten en gevaar voor de klant, de gebruiker of derden.*
- *Als de watertoevoer, de sproeiopwekking of de motor van het handstuk worden verstoord, moet de voetverzorging onmiddellijk worden onderbroken.*

1.3 Omvang van de levering

De leveringsomvang omvat:

1 stuk	Pedicure machine
1 stuk	Handstuk
1 stuk	Externe voedingseenheid
1 stuk	Gebruiksaanwijzing
1 stuk	Watertank

Voor meer informatie over technische gegevens, accessoires, verbruiksartikelen, reserveonderdelen en servicepartners kunt u contact opnemen met uw contractpartner.

1.4 Verpakking

De verpakking beschermt het apparaat tegen schade tijdens het vervoer. De verpakking is gemaakt van waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd.



Wij raden u aan de verpakking en de opvulstukken te bewaren voor retourzending in geval van onderhoud of reparatie.

1.5 Recycling

Als u zich van de verpakking wilt ontdoen, zorg er dan voor dat deze naar soort wordt afgevoerd. Maak hiervoor gebruik van de lokale mogelijkheden voor het inzamelen van papier, karton en lichte verpakkingen. Oude apparaten horen niet bij het huishoudelijk afval en moeten als elektronisch afval worden afgevoerd.

2 Beoogd gebruik

Als paramedisch apparaat is de *MasterMobile Spray* bedoeld voor cosmetische toepassingen in de voetverzorging.

Het handstuk van het apparaat is geschikt voor roterende instrumenten zoals frezen en slijpmachines. Het wordt gebruikt in de volgende gebieden en toepassingen:

- Slijpen en frezen of schoonmaken en polijsten van nagels
- Verwijderen van eelt, eelt en nagels

Het gebruik van het toestel in andere gebieden en toepassingen is op eigen risico en kan potentieel gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en eigendommen.



- *De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of verkeerde bediening.*



- *Bij onjuist gebruik, opening of wijziging van het apparaat vervalt elke aanspraak op garantie.*

2.1 Milieuomstandigheden

Operatie

Temperatuurbereik	+10 tot +35	°C
Relatieve vochtigheid, niet condenserend; geen tropische bescherming	30 tot 85	%
Luchtdruk	860 tot 1060	mbar

Transport

Temperatuurbereik	-10 tot +50	°C
Relatieve vochtigheid, niet condenserend, geen tropische bescherming	10 tot 85	%
Luchtdruk	500 tot 1060	mbar

Opslag

Temperatuurbereik	-10 tot +50	°C
Relatieve vochtigheid, niet condenserend, geen tropische bescherming	10 tot 85	%
Luchtdruk	500 tot 1060	mbar

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.



- *Bij omgevingsomstandigheden buiten de toegestane functiegrenzen moet de toepassing onmiddellijk worden onderbroken en het apparaat worden uitgeschakeld.*

2.2 Opslag en vervoer


Voor een juiste opslag van het product, gelieve de opslagvoorwaarden in acht te nemen. Het apparaat moet in de buitenverpakking (originele doos) worden opgeslagen of vervoerd.



- *Voor het transport bij temperaturen onder het vriespunt moet het apparaat volledig van water worden ontdaan, d.w.z. ook alle interne waterwegen, totdat er geen spray meer uit de handstukken komt, omdat anders schade (vorstschade) niet kan worden uitgesloten.*

3 MasterMobile Smitbus

3.1 Vooraanzicht

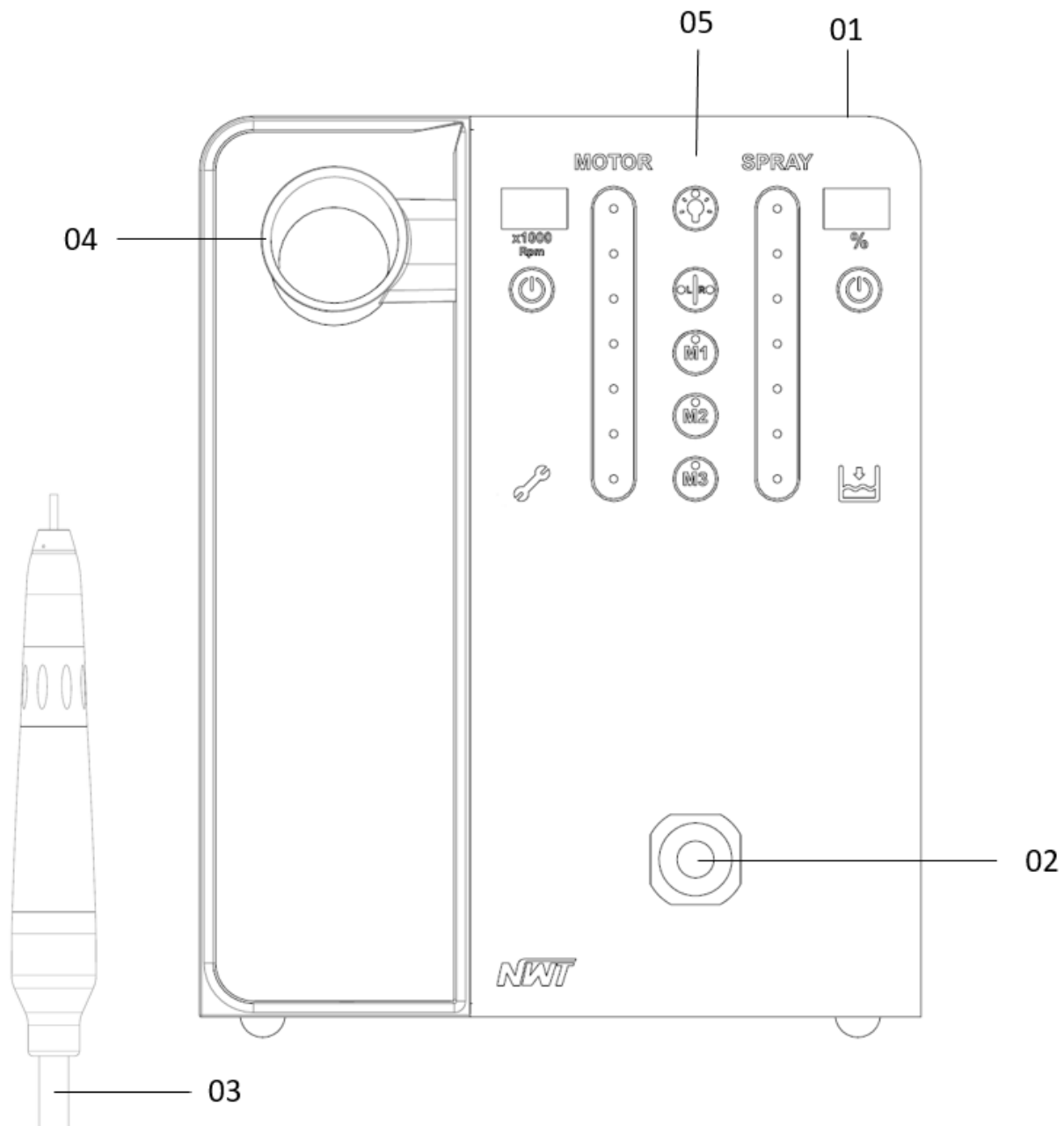

01 Pedicure machine


02 Aansluiting slang handstuk

03 Handstuk met slang

04 Handstukhouder

05 Touch display met bediening

3.2 Achteraanzicht

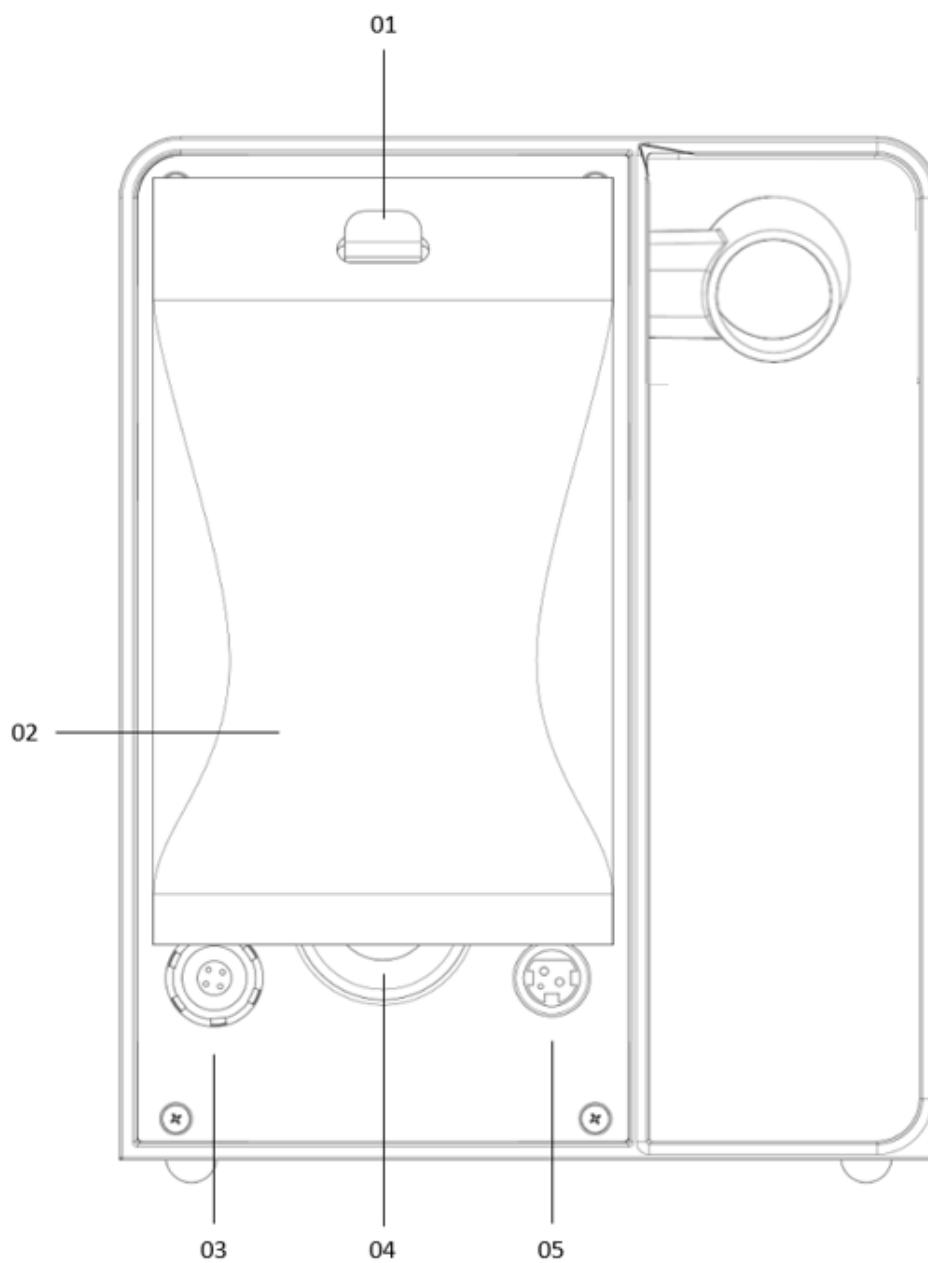

01 Haak voor het bevestigen van de spuitzak

02 Spuitzak

03 Aansluiting - Voetschakelaar

04 Naald-insteekverbinding voor spuitzak

05 Aansluiting - externe voedingseenheid


4 Handstukken

Veiligheidsinstructies voor het gebruik van het handstuk




- *Alleen roterende instrumenten met een cilindrische asdiameter van 2,35 mm mogen worden gebruikt. Meer informatie vindt u in DIN EN ISO 1797-1. Neem ook de instructies van de fabrikant in acht over maximumsnelheid, reiniging, desinfectie en sterilisatie van de roterende instrumenten.*
- *Controleer het handstuk voor gebruik op trillingen, geluid en oververhitting. Als zich onregelmatigheden voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw erkende dealer.*
- *De gebruiker is verantwoordelijk voor regelmatig onderhoud en inspectie van het handstuk.*
- *Onjuist gebruik leidt tot slechte werkresultaten en risico's op letsel.*
- *Volg de instructies van de fabrikant voor de afzonderlijke handstuktypes.*
- *Gebruik het handstuk niet terwijl u de draairichting wilt veranderen. Wacht tot de draairichting is veranderd voordat u verder gaat.*
- *Instrumenten van gereedschapsstaal lopen het risico van corrosie! Gebruik daarom voor reiniging en desinfectie uitsluitend reinigings- en desinfectiemiddelen met corrosiebescherming. De instrumenten moeten onmiddellijk na reiniging en desinfectie worden gedroogd.*
- *Stel het handstuk niet bloot aan mechanische schokken. Laat het handstuk niet vallen, dit kan een storing veroorzaken.*
- *Gebruik het handstuk niet zonder een braam, slijpsteen of dummy pin, omdat het handstuk dan mogelijk niet goed werkt.*
- *Als de spuitlucht van het handstuk uitvalt, stop dan onmiddellijk de toepassing. Vervang het handstuk of neem contact op met uw aannemer voor reparatie of onderhoud van het handstuk.*
- *Als het apparaat is uitgerust met een handstuk met een geïntegreerde LED-lichtbron, mag u het licht nooit rechtstreeks in de ogen schijnen, omdat dit het oog kan beschadigen. Kijk daarom niet in het licht en schijn het niet in de ogen van de cliënt.*

4.1 Pododent PLUS (L) & Pododent EVO (L)

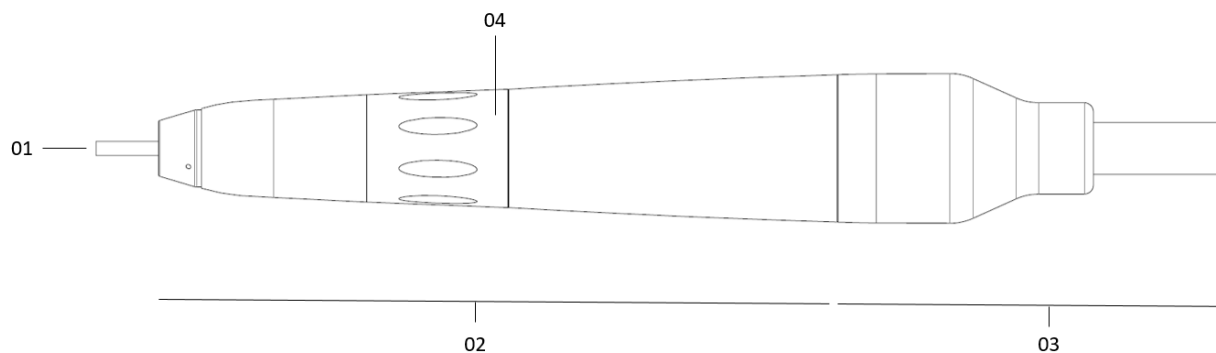

- | | |
|----|--|
| 01 | Draaiend instrument |
| 02 | Handstuk (deelbaar - Plus (L), <i>niet deelbaar</i> - EVO (L)) |
| 03 | Motoreenheid met kabel |
| 04 | Borgring |

4.2 GALAXY G65s & GALAXY G65Ls

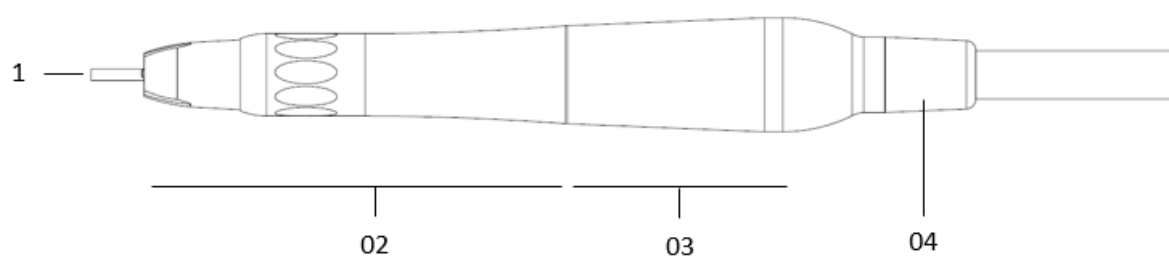

- | | |
|----|----------------------------------|
| 01 | Draaiend instrument |
| 02 | Handstuk met borgring (deelbaar) |
| 03 | Micromotor |
| 04 | Handstukslang |

5 Bescherming van klanten en gebruikers

Ter bescherming van klanten, gebruikers en derden moeten de volgende punten in acht worden genomen:



- *Gebruik het apparaat alleen in perfecte staat en alleen in de zin van het beoogde gebruik.*
- *Draag voor uw eigen veiligheid geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het aanbrengen in overeenstemming met de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.*
- *Controleer de slang van het handstuk regelmatig op mogelijke schade om een eventuele vermindering van het spuitvermogen in een vroeg stadium op te sporen en een eventuele verhoogde stofbelasting te voorkomen.*
- *Let er tijdens de behandeling op dat er geen losse voorwerpen (doeken, watten, kleding, haar, sieraden, enz.) in het behandelveld terechtkomen en in de draaiende instrumenten verstrikt kunnen raken.*
- *Reinig het toestel na elk gebruik en voor elke klantenwissel.*
- *Voor of na een langere periode van niet-gebruik moet het apparaat ook worden gereinigd en onderhouden.*
- *Laat de voorgeschreven service- en onderhoudswerkzaamheden regelmatig uitvoeren om duurzaam gebruik en waardebehoud te garanderen.*

6 Inbedrijfstelling

6.1 Voorbereiding van de eenheid

Controleer eerst de geschiktheid van de ruimte op de plaats van gebruik, vooral met betrekking tot de stroomvoorziening, de vlakheid van het installatieoppervlak, de reinheid van de ruimte en de klimaatomstandigheden - pak het apparaat pas uit als de ruimte geschikt is.

Veiligheidsvoorschriften voor de inbedrijfstelling van het apparaat



- *Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, controleer dan de buitenste verpakking van het apparaat op mogelijke uitwendige schade. Indien transportschade wordt geconstateerd, neem dan contact op met uw contractpartner en verduidelijk de verdere procedure.*
- *Zorg ervoor dat het apparaat op een geschikte stabiele vlakke ondergrond wordt gebruikt en niet kan omvallen.*
- *Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven op de behuizing niet worden afgedekt en vrij blijven.*
- *Het apparaat moet zodanig worden opgesteld dat het in geval van storing gemakkelijk van het net kan worden losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken.*
- *Warmtebronnen zoals direct zonlicht en radiatoren in de directe omgeving van de besturingseenheid kunnen de koeling negatief beïnvloeden. Plaats de besturingseenheid daarom niet in de buurt van warmtebronnen.*
- *Het apparaat is niet bestemd voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving of in natte ruimten.*

6.2 Plaatsen en vervangen van de roterende instrumenten

Veiligheidsinstructies voor het gebruik van roterende instrumenten



- Raak geen draaiende instrumenten aan, er bestaat gevaar voor letsel!
- Gebruik alleen roterende instrumenten met een maximale diameter van 6 mm.
- Gebruik alleen diamantscharen of scharen met een roestvrijstalen schacht.
- Voor instrumenten die niet tegen corrosie beschermd zijn, moeten ontsmettingsmiddelen en reinigingsmiddelen met corrosiebescherming worden gebruikt.
- Vermijd contact met H₂O₂ (waterstofperoxide). Harde metalen instrumenten worden aangetast en beschadigd.
- Draaiende instrumenten van hard metaal en instrumenten die niet roestbestendig zijn, kunnen in de thermische desinfecteur worden aangetast. Dit kan leiden tot verkleuring en vroegtijdige slijtage.
- Klem instrumenten en slijpinstrumenten zo diep mogelijk af (neem zo nodig de instructies van de fabrikant in acht).
- Vermijd kantelen of heffen bij het inbrengen van de roterende instrumenten, omdat dit het risico van breuk kan vergroten.
- Breng de instrumenten op snelheid voordat u ze op de huid of de nagel aanbrengt.
- Te grote contactkrachten kunnen door oververhitting schade aan de huid of de nagels veroorzaken.
- Het aanhouden van de snelheidsaanbevelingen van de fabrikant voor de betreffende instrumenten leidt tot de beste werkresultaten. Overschrijding van de maximaal toegestane snelheid van de instrumenten (frezen en slijpmachines) kan leiden tot beschadiging of vernietiging van de instrumenten en/of het handstuk.
- Voor de maximaal toelaatbare snelheid wordt verwezen naar de specificaties van de fabrikant van de respectieve instrumenten.
- Gebruik om veiligheidsredenen geen vette, versleten of defecte instrumenten die niet soepel lopen, omdat anders een stevige passing in de spantanghouder van het handstuk niet kan worden gegarandeerd. Laat roterende instrumenten met dergelijke kenmerken onmiddellijk vervangen.
- Steek alleen droge instrumenten in het handstuk.
- Alleen roterende instrumenten met een cilindrische asdiameter van 2,35 mm mogen worden gebruikt. Verdere informatie is te vinden in DIN EN ISO 1797-1.
- De roterende instrumenten moeten worden opgeslagen op een droge plaats bij kamertemperatuur in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen blootstelling aan zonlicht en warmte, om ze te beschermen tegen besmetting en invloeden van buitenaf.
- Roterende instrumenten moeten worden opgeslagen in geschikte standaards, trays of andere containers.


6.2.1 GALAXY G65s & GALAXY G65Ls



- *Verwissel of plaats nooit draaiende instrumenten voordat de micromotor volledig tot stilstand is gekomen.*

Ga als volgt te werk om de roterende instrumenten te veranderen:


- (1) Schakel de micromotor uit voordat u het draaiend instrument verwisselt.
- (2) Om het instrument te kunnen verwijderen, draait u de "*vergrendelring*" op het handstuk in de richting van de markering totdat u het vergrendelpunt voelt.
- (3) Verwijder het draaiend instrument (eventueel met blinde pin) uit de klauwplaat.
- (4) Steek nu het nieuwe draaigereedschap (b.v. een geschikte frees) zo diep mogelijk in de klauwplaat tot de aanslag voelbaar is.
- (5) Om het draaiende instrument weer vast te zetten, draait u de "*borgring*" in de richting van de markering totdat u voelt dat hij vastklikt. De twee markeringen moeten nu weer samenvallen.
- (6) Controleer of het draaiende instrument goed past, zodat het tijdens de behandeling niet kan losraken.

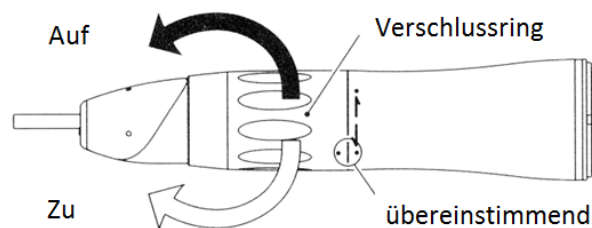


6.2.2 Pododent PLUS (L) & Pododent EVO (L)

Ga als volgt te werk om de roterende instrumenten te veranderen:


- (1) Schakel de micromotor uit voordat u het draaiend instrument verwisselt.
- (2) Om het instrument te kunnen verwijderen, draait u de "*vergrendelring*" op het handstuk naar "**OPEN**".

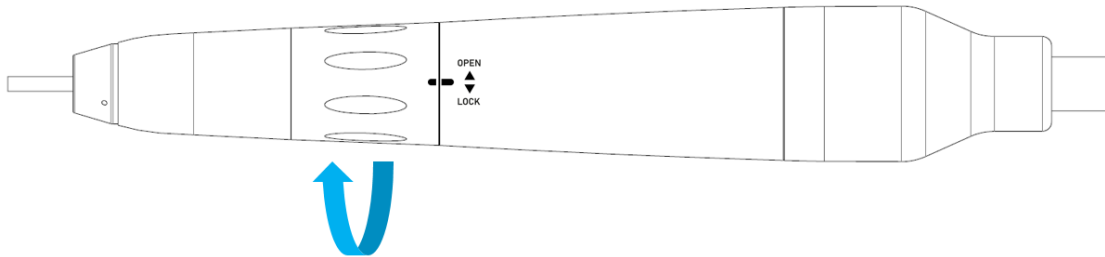

- (3) Verwijder het draaiend instrument (eventueel met blinde pin) uit de klauwplaat.
- (4) Steek nu het nieuwe draaigereedschap (b.v. een geschikte frees) zo diep mogelijk in de klauwplaat tot de aanslag voelbaar is.

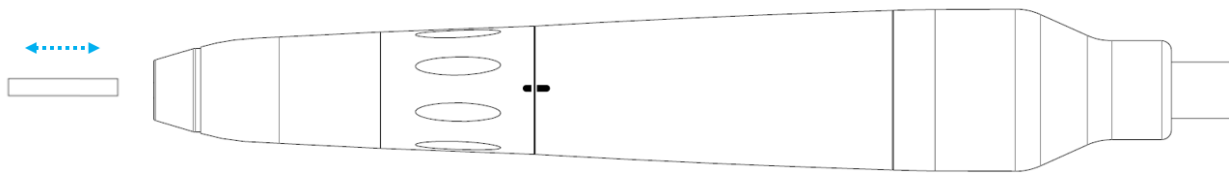

- (5) Om het draaiende instrument weer vast te zetten, draait u de "*borgring*" in de richting van de "**LOCK**"-markering totdat u voelt dat hij vastklikt. De twee markeringen moeten nu weer samenvallen.

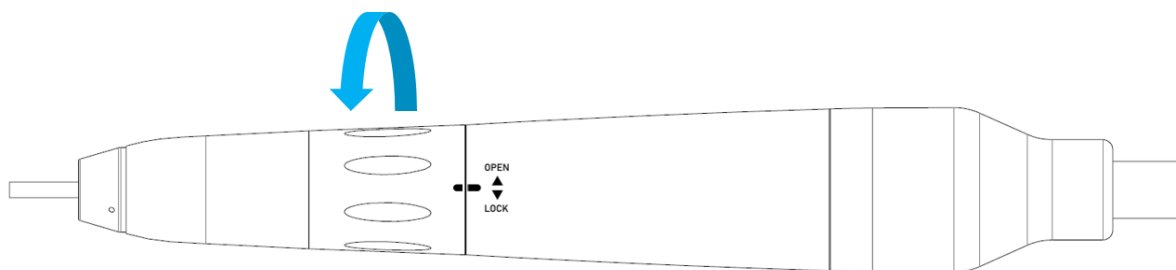

- (6) Controleer of het draaiende instrument goed past, zodat het tijdens de behandeling niet kan losraken.

6.3 De watertank vullen

Ga als volgt te werk om het waterreservoir aan te sluiten:


- (1) Bedien de aftapkraan voordat u het waterreservoir verwijdert om de overdruk weg te nemen.
- (2) Verwijder het waterreservoir naar achteren terwijl u de ontgrendeling bedient.
- (3) Schroef het deksel los en vul de watertank met sproeivloeistof.
- (4) De volgende vloeistoffen kunnen worden gebruikt om de watertank te vullen:
 - a. Gedestilleerd water
 - b. Mengsel van gedestilleerd water en ethanol (80/20% vol./vol.)
 - c. Podiasprayliquid Plus (gebruiksklare oplossing)
- (5) Schroef na het vullen van het waterreservoir het deksel handvast. Sluit het reservoir met de twee koppelingen weer aan op de koppelingspluggen aan de achterkant van het apparaat. Zorg ervoor dat beide koppelingen goed vastzitten.



- *Zorg ervoor dat het waterreservoir altijd schoon is, anders kan vuil de sproeifunctie van het handstuk belemmeren.*

6.4 Aansluiting voetschakelaar

Steek de stekker van de voetschakelaar in de aansluiting op het achterpaneel van het toestel voordat u het toestel bedient. De aansluiting van de voetschakelaar is gemarkeerd met het volgende symbool.

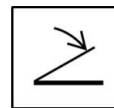

- *Houd er rekening mee dat u de voetschakelaar alleen op het apparaat mag aansluiten of loskoppelen als de hoofdschakelaar aan de achterkant van het apparaat in de stand OFF staat.*


6.5 Aansluiting van de voedingseenheid



- *In Europa wordt een netspanning van 230V, 50Hz gebruikt. Controleer voor het inschakelen van het apparaat of de specificatie op het typeplaatje van de voedingseenheid overeenkomt met deze waarde.*

Ga als volgt te werk om de voedingseenheid aan te sluiten:

- (1) Sluit de meegeleverde netadapter aan op het stopcontact aan de achterkant van het apparaat. Het stopcontact van de netadapter is gemarkeerd met het volgende symbool.
- (2) Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

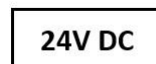

- *Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingseenheid. Gebruik de voedingseenheid niet als deze zichtbaar beschadigd is.*

7 Bediening - MasterMobile

Veiligheidsvoorschriften voor de bediening en het gebruik van het apparaat




- *Controleer de voeding regelmatig op beschadigingen. In geen geval mag het apparaat worden gebruikt met een beschadigde voedingseenheid als gevolg van knelling, knikken, schuren of andere invloeden. Als u schade aan de voedingseenheid vaststelt, stop dan onmiddellijk uw werkzaamheden, schakel de hoofdschakelaar van de besturingseenheid uit en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat u een vervangende voedingseenheid hebt voordat u verder werkt of neem contact op met uw aannemer.*
- *Bij omgevingsomstandigheden buiten de toelaatbare functiegrenzen moet de voetverzorging onmiddellijk worden onderbroken en het apparaat worden uitgeschakeld.*
- *Voldoende ventilatie van het toestel is noodzakelijk om te voorkomen dat er te veel warmte in het toestel ontstaat. Plaats het toestel daarom niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren.*
- *Zorg ervoor dat er geen vocht of vloeistoffen in het toestel komen.*
- *Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact en trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen!*
- *Om veiligheidsredenen mag het apparaat niet ingeschakeld blijven als er geen toezicht is. In dat geval moet de hoofdschakelaar altijd worden uitgeschakeld.*
- *De gebruiker moet zich vóór elk gebruik vergewissen van de functionele veiligheid en de goede staat van het apparaat.*
- *Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en onbevoegden!*
- *In overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenverordening moet de elektrische installatie in commercieel gebruikte ruimten regelmatig worden geïnspecteerd. Jaarlijkse veiligheidskeuring van het apparaat volgens VDE 0701 en VDE 0702 (herhalingskeuring).*
- *Zorg ervoor dat het handstuk is uitgeschakeld voordat u het in de handstukhouder plaatst.*



- *Vocht in het apparaat kan gevaarlijke lekstromen veroorzaken; dit houdt het risico in van een storing in het apparaat en een elektrische schok! Werk daarom niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid en bescherm het apparaat tegen elke vorm van vocht.*

7.1 Bedieningspaneel

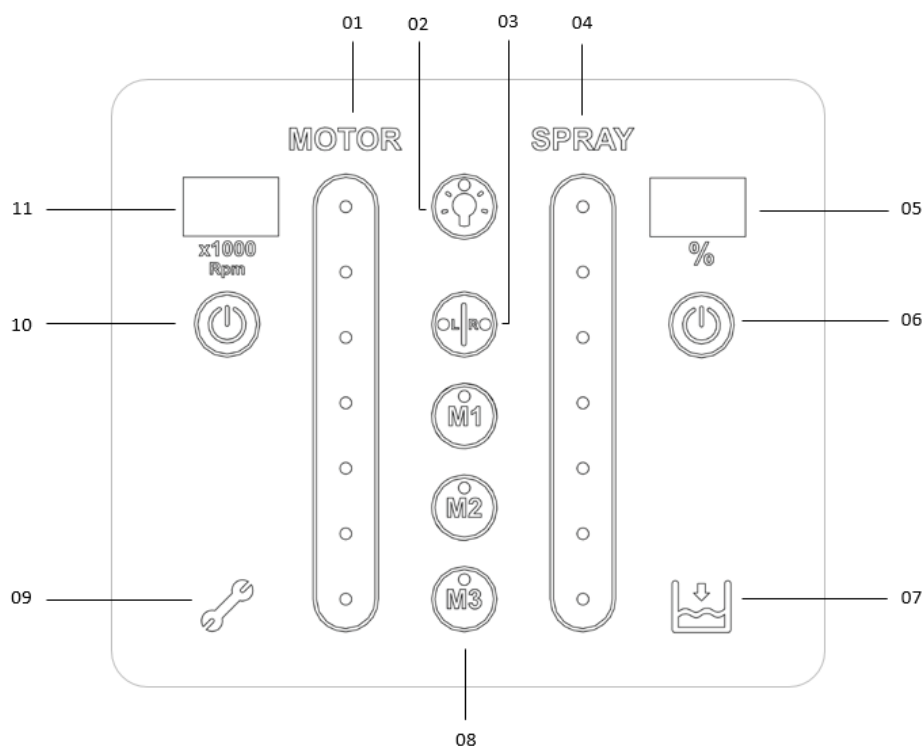

Nee.	Symbol	Functie
01	Het instellen van de Motortoerental	Verhoog en verlaag de snelheid van de micromotor door langs de schaal te vegen
02	LED-licht	In- en uitschakelen van het LED-lampje op het handstuk
03	Draairichting veranderen	Veranderen van de draairichting (rechts/links)
04	Het instellen van de Spuitvolume	Verhoog en verlaag de hoeveelheid spray door langs de schaal te vegen
05	Digitale weergave van de spuihoeveelheid	Weergave van de spuihoeveelheid in procenten
06	Spray	In- en uitschakelen van de spray
07	Waarschuwingsspray	Licht op wanneer de watertank leeg is
08	Geheugenfunctie	Selectie van geheugenfunctie M1, M2, M3
09	Waarschuwing Onderhoud	Licht op zodra de bedrijfsuren voor regulier onderhoud zijn bereikt.
10	Micromotor	In- en uitschakelen van de micromotor
11	Digitale weergave van de snelheid van de micromotor	Weergave van de snelheid in stappen van 1000



- Gebruik het handstuk niet als u de draairichting wilt veranderen. Wacht tot de draairichting is veranderd voordat u verder gaat.

7.2 Geheugenfunctie

Met de geheugenfunctie kunnen verschillende snelheden van de micromotor met de bijbehorende spuithoeveelheid worden opgeslagen. De volgende instellingen zijn in de fabriek voorgedefinieerd. U kunt deze instellingen achteraf zelf aanpassen.

	M1	M2	M3
Snelheid	5.000 rpm	20.000 rpm	40.000 rpm
Spuit hoeveelheid	0 %	50 %	20 %
Draairichting	rechts	links	rechts

De geheugenfunctie wijzigen

Om de waarden in de geheugenfunctie te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- (1) Schakel het toestel in.
- (2) Stel de gewenste combinatie van snelheid en spuitvolume in.
- (3) Druk gedurende drie seconden op de gewenste geheugenplaats M1, M2 of M3. Uw ingestelde combinatie wordt nu opgeslagen in de geselecteerde geheugenplaats.

7.3 Snelheidsregeling met de voetschakelaar

Een tweede manier om de snelheid van de micromotor te regelen is het gebruik van de voetschakelaar. De software detecteert automatisch of er een voetschakelaar op het apparaat is aangesloten of niet. Met de progressieve voetschakelaar kunt u de gewenste snelheid continu verhogen of verlagen.

7.4 Toetsblokkering Aanraakscherm

Als u het touch display wilt reinigen, kunt u het gedurende 30 seconden vergrendelen. Om de toetsblokkering te activeren drukt u drie seconden op de AAN/UIT-toets van de micromotor [10] - dan is het touchdisplay 30 seconden geblokkeerd.

7.5 Boost-modus



Voordat u de spoelmodus activeert, haalt u het handstuk uit de houder en legt u het in een bakje om het water op te vangen dat tijdens de procedure naar buiten komt. Zorg er ook voor dat de watercontainer nog minstens halfvol is.

Bij nieuwe apparaten zijn de interne leidingpaden nog zonder vloeistof. Om de leidingen snel met sproeivloeistof te vullen voordat u **het apparaat voor het eerst inschakelt, gaat u als volgt te werk:**

1. Schakel het toestel in.
2. Om de boost-modus te activeren, drukt u gedurende 3 seconden op de toets "Wijziging draairichting" (zie figuur 5 - nummer 03).
3. Wanneer de boost-stand actief is, telt de digitale display stap voor stap op van 0 tot 99, ter illustratie van de toename van het pompvermogen. Laat de boost-modus actief totdat er spuitvloeistof uit het handstuk komt.
4. Om de boost-modus te verlaten, drukt u nogmaals kort op de toets "Draairichting wijzigen" (zie figuur 5 - nummer 03).



Zorg ervoor dat eventueel uit het handstuk ontsnappende spray wordt opgevangen en het apparaat niet bevochtigt!



Elke dag vóór de eerste voetverzorging moet het apparaat gedurende ongeveer 30 seconden in de boost-functie worden gebruikt om het resterende water uit de slangen te spoelen.

7.6 De spuitzak vervangen

Wanneer de spuitzak leeg is, wordt de gebruiker gewaarschuwd door het volgende verlichte symbool op de voorkant van het apparaat:



Controleer nu het vulniveau van de spuitzak en vervang de spuitzak indien nodig.

Ga als volgt te werk om de spuitzak te vervangen:

- (1) Schakel het apparaat uit voordat u de spuitzak verwisselt.
- (2) Trek de spuitzakconnector van de koppellen aan de achterkant van het apparaat en verwijder de spuitzak van de bevestigingshaak.
- (3) Gooi de spuitzak op de juiste wijze weg.
- (4) Verwijder de beschermkap van de aansluiting van de nieuwe spuitzak.
- (5) Steek de stekker van de spuitzak op de koppellen aan de achterkant van het apparaat en hang de spuitzak aan de haak aan de achterkant.
- (6) Schakel het apparaat weer in - het apparaat is nu weer klaar voor gebruik.

Het LED display voor vervanging van de spuitzak gaat automatisch uit nadat een nieuwe spuitzak is aangesloten.

8 Bediening - Handstuk

Veiligheidsinstructies voor het gebruik van roterende instrumenten



- *Alleen roterende instrumenten met een cilindrische asdiameter van 2,35 mm mogen worden gebruikt. Verdere informatie is te vinden in DIN EN ISO 1797-1.*



- *Om het risico van letsel te voorkomen, mag u nooit roterende instrumenten wisselen of plaatsen voordat de micromotor volledig tot stilstand is gekomen. Hetzelfde geldt voor de voetschakelaar, die niet bediend mag worden tijdens het verwisselen van instrumenten.*
- *Raak geen draaiende instrumenten aan, er bestaat gevaar voor letsel!*
- *Gebruik alleen roterende instrumenten met een maximale diameter van 12 mm.*
- *Gebruik alleen diamantscharen of scharen met een roestvrijstalen schacht.*
- *Voor instrumenten die niet tegen corrosie beschermd zijn, moeten ontsmettingsmiddelen en reinigingsmiddelen met corrosiebescherming worden gebruikt.*
- *Vermijd contact met H₂O₂ (waterstofperoxide). Harde metalen instrumenten worden aangetast en beschadigd.*
- *Draaiende instrumenten van hard metaal en instrumenten die niet roestbestendig zijn, kunnen in de thermische desinfectator worden aangetast. Dit kan leiden tot verkleuring en voortijdige slijtage.*
- *Klem instrumenten en slijpinstrumenten zo diep mogelijk af (neem zo nodig de instructies van de fabrikant in acht).*
- *Vermijd kantelen of heffen bij het inbrengen van de roterende instrumenten, omdat dit het risico van breuk kan vergroten.*
- *Breng de instrumenten op snelheid voordat u ze op de huid of de nagel aanbrengt.*
- *Te grote contactkrachten kunnen door oververhitting schade aan de huid of de nagels veroorzaken.*
- *Het aanhouden van de snelheidsaanbevelingen voor de betreffende instrumenten leidt tot de beste werkresultaten. Overschrijding van de maximaal toegestane snelheid van de instrumenten (frozen en slijpmachines) kan leiden tot beschadiging of vernietiging van de instrumenten en/of het handstuk.*
- *Voor de maximaal toelaatbare snelheid wordt verwezen naar de specificaties van de fabrikant van de respectieve instrumenten.*
- *Gebruik om veiligheidsredenen geen vette, versleten of defecte instrumenten die niet soepel lopen, omdat anders een stevige passing in de spantanghouder van het handstuk niet kan worden gegarandeerd. Laat roterende instrumenten met dergelijke kenmerken onmiddellijk vervangen.*
- *Steek alleen droge instrumenten in het handstuk.*
- *De roterende instrumenten moeten worden opgeslagen op een droge plaats bij kamertemperatuur in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen blootstelling aan zonlicht en hitte, om ze te beschermen tegen besmetting en invloeden van buitenaf.*
- *Roterende instrumenten moeten worden opgeslagen in geschikte standaards, trays of andere containers.*

8.1 Handstuk - Pododent PLUS (L)


8.1.1 Veranderen van de roterende instrumenten

Zie punt 6.2.2.

8.1.2 Het handstuk loskoppelen van de motoreenheid

Ga als volgt te werk om het handstuk los te koppelen van de motoreenheid:

- (1) Maak het handstuk los door het recht van de motorunit af te trekken - niet draaien of buigen.

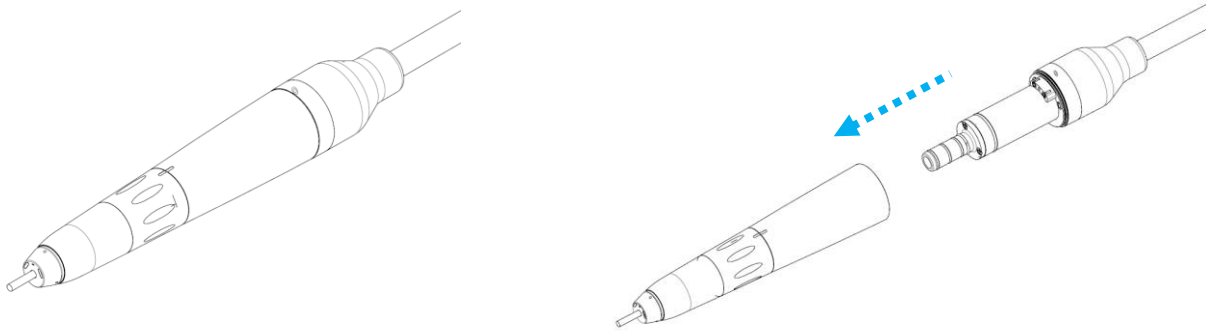


- (2) Het handstuk is nu gescheiden van de motoreenheid en kan worden gereinigd.

8.1.3 Bevestiging van het handstuk op de motoreenheid

Ga als volgt te werk om het handstuk op de motoreenheid te bevestigen:

- (1) Druk het handstuk zo ver mogelijk op de motoreenheid.
- (2) Draai vervolgens het handstuk tot de juiste uitlijning van de capillaire buizen tussen het handstuk en de motoreenheid is bereikt.
- (3) Duw nu het handstuk verder op de motoreenheid totdat u voelt dat het handstuk in de motoreenheid grijpt.

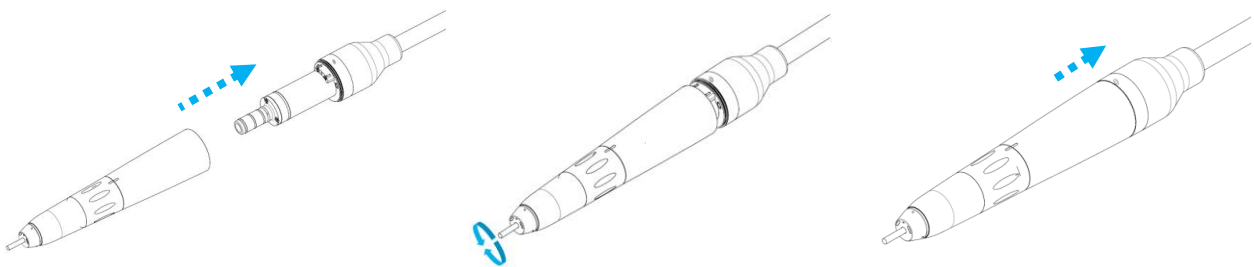

8.2 Handstuk - Galaxy 65s & Galaxy 65Ls

8.2.1 Verandering van roterende instrumenten

Zie punt 6.2.1

8.2.2 Het handstuk loskoppelen van de motoreenheid

Ga als volgt te werk om het handstuk los te koppelen van de motoreenheid:

- (1) Maak het handstuk los door het recht van de motorunit af te trekken - niet draaien of buigen.
- (2) Het handstuk is nu gescheiden van de motoreenheid en kan worden gereinigd.

8.2.3 Bevestiging van het handstuk op de motoreenheid

Ga als volgt te werk om het handstuk op de motoreenheid te bevestigen:

- (1) Druk het handstuk zo ver mogelijk op de motoreenheid.
- (2) Draai vervolgens het handstuk tot de juiste uitlijning van de lichtgeleiders tussen het handstuk en de motorunit is bereikt. (Galaxy 65Ls)
- (3) Duw nu het handstuk verder op de motoreenheid totdat u voelt dat het handstuk in de motoreenheid grijpt. (Galaxy 65Ls)

9 Reiniging en verzorging

Het apparaat, de motoren, de handstukken en de roterende instrumenten moeten worden gereinigd en onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt overeenkomstig de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Bij alle schoonmaakwerkzaamheden waarbij contact met besmette voorwerpen niet kan worden uitgesloten, moet beschermende werkkleding (bv. prikbestendige handschoenen) worden gedragen. Niet-steriliseerbare en/of niet-desinfecteerbare voorwerpen mogen niet met deze handschoenen worden aangeraakt. Wanneer het werk wordt onderbroken, moeten de handschoenen worden uitgetrokken.

Om een maximale reinheid en persoonlijke en arbeidsveiligheid tijdens de behandeling te garanderen, moeten de volgende reinigungs-aanbevelingen in acht worden genomen.

Intervallen voor reiniging en desinfectie

Met verandering van klant	Desinfectie van alle onderdelen die tijdens het gebruik zijn aangeraakt of met de klant in contact zijn gekomen. Dit omvat in het bijzonder het handstuk incl. het gebruikte instrument.
Aan het einde van de werkdag	Alle punten zoals voor de klantenwissel, + Reiniging en desinfectie van het handstuk volgens de geldende hygiënevoorschriften en
Aan het einde van de werkweek	Maak de watertank leeg en schoon, + met de watertank leeg en het spuitvolume op maximum ingesteld, blaast u de spuitkanalen leeg tot er geen spuit meer uit het handstuk komt.

9.1 Reiniging en ontsmetting - Voetverzorgingseenheid

Reinig de behuizing (incl. slang) met een met reinigingsmiddel bevochtigde doek (**niet nat**). Voor de reiniging adviseren wij een desinfectiemiddel op waterbasis; geschikte producten zijn verkrijgbaar op onze website www.nwt.care of bij uw contractpartner. Neem de aanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht.



- *Voor elke reiniging het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen - anders bestaat er gevaar voor elektrische schokken!*



- *Gebruik geen alcoholische, oplosmiddelhoudende of agressieve reinigingsmiddelen.*

9.2 Reiniging en desinfectie - Handstukken

Reiniging en ontsmetting gaan gepaard met een grote verantwoordelijkheid. Om ervoor te zorgen dat de reiniging goed en passend wordt uitgevoerd, moet erop worden toegezien dat de verantwoordelijke personen over voldoende kwalificaties en opleiding beschikken.



- *Voor elke reiniging het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen - anders bestaat er gevaar voor elektrische schokken!*




- *Gebruik geen alcoholische, oplosmiddelhoudende of agressieve reinigingsmiddelen. De voorgeschreven reinigingsintervallen in acht nemen!*
- *Reinig het handstuk NOOIT in kokend water, met chemicaliën, draadborstels of ultrasoon geluid. Plaats het handstuk NOOIT in desinfecterende of ultrasone baden. Plaats of dompel het handstuk NOOIT onder in vloeistof, anders kan het handstuk beschadigd raken.*
- *De motor mag niet gesmeerd of geolied worden.*

9.2.1 Reiniging van de lichtgeleiders - Pododent Plus L, Galaxy G65Ls

Als het licht vervaagt, reinigt u het uiteinde van de lichtgeleider met een in alcohol gedrenkt wattenstaafje.

Reinigen van de lichtgeleider

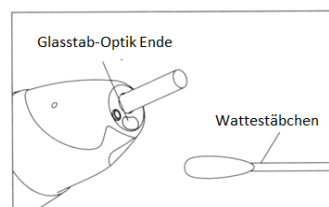


- *Gebruik geen puntig gereedschap met scherpe randen om het uiteinde van de lichtgeleider te reinigen. Dit kan het gepolijste oppervlak beschadigen en de lichttransmissie verminderen. Als het uiteinde van de lichtgeleider beschadigd is, neem dan contact op met uw aannemer.*

9.2.2 Onderhoud van de sproeifunctie



Voordat u de spoelmodus activeert, haalt u het handstuk uit de houder en legt u het in een bakje om het water op te vangen dat tijdens de procedure naar buiten komt. Zorg er ook voor dat de watercontainer nog minstens halfvol is.

- (1) Vul de watertank regelmatig met gedestilleerd water. Zorg ervoor dat er geen vuildeeltjes in de watertank achterblijven.
- (2) Vul het waterreservoir met een ethanoplossing ("PODIASPRAY LIQUID PLUS") om het sproeisysteem te ontsmetten.
- (3) De uitstroomopeningen aan de punt van het handstuk moeten vrijgehouden worden, zodat het naar binnen spuitende water er weer uit kan. Dit kan gebeuren met een naald of een paperclip. Anders kan het handstuk door het binnendringen van water worden beschadigd.

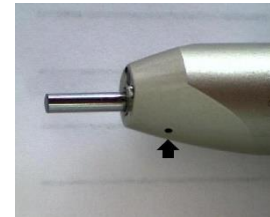

Zorg ervoor dat de spray die uit het handstuk komt, wordt opgevangen en het apparaat niet nat maakt! Droog de watercontainer binnenin niet af met een doek, zodat er geen textielvezels of andere deeltjes in de container kunnen komen.

9.2.3 Reiniging en desinfectie - Pododent EVO (L)

Ga voor het reinigen en desinfecteren van de handstukken als volgt te werk:

-
- Reinig en desinfecteer alle externe oppervlakken van het handstuk met een in een desinfectiemiddel gedrenkte doek om deeltjes en resten te verwijderen. Wij bevelen ontsmettingsmiddelen op waterbasis aan.
 - Let op de door de fabrikant opgegeven belichtingstijden
 - Controleer alle onderdelen op reinheid en integriteit
-

Geschikte producten zijn verkrijgbaar bij NWT of uw contractpartner.

9.2.4 Reiniging en desinfectie - Pododent PLUS (L), Galaxy 65s, Galaxy 65Ls

Gebruik voor de reiniging de aanbevolen reinigings- en ontsmettingsmiddelen:



Toepassing:

- Schud het flesje 3-4 keer om de inhoud goed te mengen.
- Schroef de spuitkop op de houder van de spuitbus.
- Duw nu het handstuk op de spuitkop tot aan de aanslag.
- Houd de punt van het handstuk boven een absorberend oppervlak.
- Houd het handstuk stevig vast zodat het niet valt door de spuitdruk.
- Druk ongeveer 3 seconden op de spuitknop totdat de inhoud uit de punt van het handstuk komt.

Geschikte producten zijn verkrijgbaar bij NWT of uw contractpartner.



Houd de spuitbus altijd verticaal.



De gebruiksinformatie van de fabrikant van de oliespray moet in acht worden genomen.

Volg voor reiniging en desinfectie de onderstaande reinigingsstappen:

1. voorbereiding, demontage en reiniging van de buitenkant

- Verwijder het roterende instrument van het handstuk
 - Maak het handstuk los van de motorunit (Pododent PLUS (L), Galaxy G65s, Galaxy G65Ls).
 - Verzamel alle te verwerken onderdelen in een ruimte die uitsluitend bestemd is voor besmette instrumenten.
 - Om deeltjes en resten te verwijderen, reinigt en desinfecteert u alle onderdelen op alle externe oppervlakken van het handstuk met een in een desinfectiemiddel gedrenkte doek. Wij bevelen ontsmettingsmiddelen op waterbasis aan.
 - Gebruik geen staalborstel!
-

2. interieurreiniging

- Handmatige reiniging van het handstuk gebeurt met een spoel- en reinigungsoplossing die gedurende 3 seconden van achteren in het klemsysteem wordt gespoten.
 - Let op de door de fabrikant opgegeven belichtingstijden
 - Gebruik geen staalborstel!
 - Controleer alle onderdelen op reinheid en integriteit
 - Blaas resten en reinigingsmiddelen zo mogelijk uit met perslucht
-

3. desinfectie

- Handmatige ontsmetting gebeurt met een ontsmettingspray die gedurende 3 seconden van achteren in het klemsysteem wordt gespoten.
 - Let op de door de fabrikant opgegeven belichtingstijden
 - Blaas het ontsmettingsmiddel uit, indien mogelijk met perslucht
-

4. onderhoud en reparatie

- Na reiniging en desinfectie wordt de kleminrichting geolied met een oliespray (bijv. QuickLUB van NWT) die gedurende 3 seconden van achteren in het klemsysteem wordt gespoten.
 - Na het oliën het spanapparaat gedurende 1 minuut verticaal naar beneden plaatsen, zodat de overtollige olie gericht via de spuitneus kan ontsnappen.
 - Voer een functionele test uit.
-

5. autoclaveren

- Indien nodig kan het handstuk worden gesteriliseerd in een autoclaaf van klasse B bij 134°.
-

6. opslag

- Bewaar het handstuk in een gesloten kast, beschermd tegen stof, vocht en temperatuurschommelingen.
-



- *Verwarm of koel het handstuk langzaam. Een snelle temperatuursverandering kan de lichtgeleider doen breken.*

9.3 Reiniging, ontsmetting en opslag van roterende instrumenten



Het is van essentieel belang de gebruiksaanwijzingen van de fabrikanten van de roterende instrumenten en de reinigings- en ontsmettingsmiddelen op te volgen.

Roterende instrumenten moeten vakkundig worden opgewerkt volgens de geldende hygiënevoorschriften of volgens de instructies van de fabrikant.


Instrumenten van gereedschapsstaal lopen het risico van corrosie! Gebruik daarom uitsluitend reinigings- en desinfectiemiddelen met corrosiebescherming voor instrumenten van gereedschapsstaal. Droog gereedschapsstalen instrumenten onmiddellijk na reiniging en desinfectie.

10 Onderhoud

Laat de voorgeschreven service- en onderhoudswerkzaamheden regelmatig uitvoeren om duurzaam gebruik en waardebehoud te garanderen.

Onderhoudshandstukken	Elke 250 bedrijfsuren
Onderhoud van de voetverzorgingseenheid	Elke 500 bedrijfsuren

Nadat het vereiste aantal bedrijfsuren is bereikt, licht het volgende symbool op als onderhoudsmelding in het touch display.

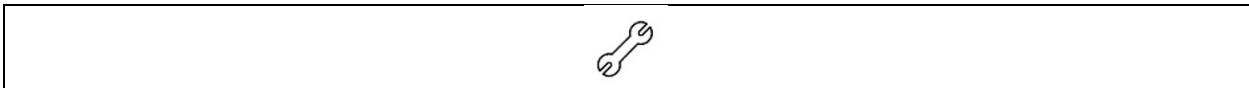

Neem contact op met uw contractpartner om het onderhoud correct te laten uitvoeren door een erkende specialist.



- *Onderhoud en reparatie mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd vakpersoneel. Bij wijzigingen en reparaties door onbevoegd personeel vervalt elke garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant.*



- *De veiligheidscontroles moeten ten minste om de 12 maanden worden uitgevoerd: Visuele controle van het toestel en de accessoires, functietest van het toestel.*

Als fabrikant kunnen wij ons alleen verantwoordelijk achten voor de veiligheidseigenschappen van het apparaat als onderhoud en reparaties worden uitgevoerd door de fabrikant of een door de fabrikant uitdrukkelijk geautoriseerd reparatiebedrijf, de voorgeschreven onderhoudsintervallen in acht worden genomen en het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.

Een andere voorwaarde is dat onderdelen die de veiligheid van het apparaat beïnvloeden, alleen door originele onderdelen worden vervangen. Technische servicedocumenten staan ter beschikking van de door de fabrikant geautoriseerde bedrijven voor onderhoud en reparatie.

11 Accessoires en reserveonderdelen

Roterende instrumenten - Frees	Vind op onze website www.nwt.care
Spuitzak	56870
Voetschakelaar - AAN/UIT (digitaal)	55314.5
Voetschakelaar - traploos (progressief)	55314.4
Snijmachine testmeter	35154
Transportzak	39000.2
Detergenten en ontsmettingsmiddelen	Vind op onze website www.nwt.care
QuickLUB	10310
Spuitkop Galaxy 65 & Galaxy 65L	10301
Spuitkop Pododent PLUS (L), Pododent EVO (L)	10301.1

Verdere accessoires vindt u op onze website www.nwt.care.

12 Technische gegevens

Mechanische gegevens

Afmeting (HxBxD)	205 mm x 160 mm x 220 mm
Gewicht, inclusief handstuk	2,5 kg

Elektrische gegevens

Nominale spanning	110-230 V AC / 50/60 Hz
Stroomverbruik	100 W
Beschermingsklasse	Klasse II

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsmodus	Continue werking
Snelheid micromotoren	5.000 - 40.000 tpm

13 Garantie

De garantie bedraagt 1 jaar of maximaal 500 bedrijfsuren, exclusief verbruiksartikelen en slijtageonderdelen zoals filterzakken, motorfilters, afdichtringen, kogellagers, enz.

De garantie wordt verlengd met nog eens 500 bedrijfsuren, maar in totaal niet langer dan de oorspronkelijke 12 maanden, indien het aanbevolen onderhoud van het apparaat tijdig is uitgevoerd. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de oorzaak van eventuele problemen vast te stellen en te analyseren.



De garantie vervalt,

- *indien de in de gebruiksaanwijzing voorgeschreven vloeistoffen en verbruiksgoederen niet worden gebruikt,*
- *als de klant of andere onbevoegden met het apparaat of het handstuk knoeien,*
- *als het apparaat voor andere dan de bedoelde doeleinden wordt gebruikt,*
- *als de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of oneigenlijk gebruik.*

14 Verwijdering

Neem de volgende instructies voor het weggooien van het apparaat in acht, aangezien er besmettelijke stoffen zoals weefselresten en slijpstofresten aanwezig kunnen zijn op de behuizing, de onderdelen van het hulpstuk en de filters.



- Apparaten met dit symbool mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid! U bent wettelijk verplicht om oude apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval af te voeren (Europese richtlijn 2012/19/EU). Meer informatie over de verwijdering van uw apparaat kunt u gratis krijgen bij uw contractpartner bij wie u het apparaat heeft gekocht.

15 Mogelijke foutmeldingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregelen
Snijder draait niet	<ul style="list-style-type: none"> • Is het toestel ingeschakeld? • Defect in kabel of motor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de hoofdschakelaar is ingeschakeld. • Neem contact op met uw aannemer of klantenservice.
Zwak spuitvolume	<ul style="list-style-type: none"> • De spuitbus is leeg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vul de spuittank.
Het apparaat werkt niet, Geen weergave op de Bedieningsfront.	<ul style="list-style-type: none"> • Is het netsnoer niet goed aangesloten? • Het stopcontact heeft geen netspanning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. • Controleer de functie van de Uitlaat.



- *Neem bij andere problemen of storingen contact op met uw contractpartner of de fabrikant. Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door erkende specialisten.*

EC Certificate

mdc medical device certification GmbH

Notified Body 0483
herewith certifies that

**NWT GmbH
Am Obstgut 9
04425 Taucha
Germany**

for the scope

portable devices for dental treatment, electric micromotor for
dental handpieces, dental hand pieces and turbines

has introduced and applies a

Quality System

for the design, manufacture and final inspection.

The mdc audit has proven that this quality system
meets all requirements according to

**Annex II – excluding Section 4
of the Council Directive 93/42/EEC**

of 14 June 1993 concerning medical devices.

The surveillance will be held as specified in Annex II, Section 5.

Valid from	2021-05-08
Valid until	2024-04-01
Registration no.	D1415900008
Report no.	P20-01936-192231
Stuttgart	2021-05-08



Head of Certification Body





EG-verklaring van overeenstemming

EG-verklaring van overeenstemming

De fabrikant

De fabrikant

NWT GmbH

Am Obstgut 9

04425 Taucha

Duitsland

verklaart op eigen verantwoordelijkheid de afgifte van de verklaring van overeenstemming voor het voetverzorgingshulpmiddel

verklaart op eigen verantwoordelijkheid de afgifte van de verklaring van overeenstemming voor het hulpmiddel voor verzorging van levensmiddelen

MasterMobile Spray

Product en handelsnaam

Product en handelsnaam

Referentie

Referentie

- | | |
|---|--------|
| • MasterMobile Spray - Pododent Evo | 9220 |
| • MasterMobile-spray - Pododent Evo L | 9220.1 |
| • MasterMobile Spray - Pododent Plus | 9220.4 |
| • MasterMobile-spray - Pododent Plus L | 9220.6 |
| • MasterMobile Spray - NT 100 niet-optisch | 9220.2 |
| • MasterMobile Spray - NT100 LED | 9220.3 |

NWT GmbH verzekert dat het voetverzorgingsapparaat waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft, voldoet aan alle relevante eisen van de richtlijnen 2014/30/EG, 2014/35/EU, 2011/65/EU en 2006/42/EG.

NWT GmbH verzekert dat het door de conformiteitsverklaring gedekte verzorgingsmiddel voor levensmiddelen voldoet aan alle relevante eisen van de richtlijnen 2014/30/EG, 2014/35/EU, 2011/65/EU en 2006/42/EG.

Bij ongeoorloofde wijzigingen aan het product verliest deze verklaring haar geldigheid.

In geval van ongeoorloofde wijzigingen aan het product verliest deze verklaring haar geldigheid.

Jaar van CE-markering

2023, 2024

Jaar van de CE-markering

Taucha, 01.04.2023

NWT GmbH

Dieter Bauch
Manager