

WIST JE DAT...

- B. Braun naast zijn klassieke butyl weefsellijm nu ook een octyl weefsellijm heeft.
- Je incisies tot 25cm kan sluiten met de Histoacryl® Flexible.
- Histoacryl® Octyl polymeriseert in 30 seconden.
- Histoacryl® al bestaat sinds 1968.
- Histoacryl® niet in de koelkast hoeft.
- Histoacryl® een barrière is tegen bacteriën.



HISTOACRYL® GAMMA

CNK CODE	OMSCHRIJVING
1050052	Histoacryl® weefsellijm blauw 5 amp 0,5ml
1050044	Histoacryl® weefsellijm blauw 10 amp 0,5ml
1050060	Histoacryl® weefsellijm transparant 5 amp 0,5ml
1050071	Histoacryl® weefsellijm transparant 10 amp 0,5ml
1051250P	Histoacryl® Flexible 5 amp 0,5ml
10520000	Histoacryl® Octyl micro 10 amp 0,5ml
10520010	Histoacryl® Octyl 10 amp 1ml
1050165	Histoacryl® Lapfix X5
1052008	Histoacryl® Lapfix X1

B. Braun Medical N.V. | Lambroekstraat 5b | 1831 Diegem | België
+32 (0)2 712 86 50 | customercare.be@bbraun.com | www.bb Braun.be

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.

V05/2022

NOW EVEN MORE...
FLEXIBLE, QUICK AND EASY



HISTOACRYL® OCTYL (MICRO)

Histoacryl® Octyl en Histoacryl® Octyl Micro zijn steriele, vloeibare topische weefsellijmen met een hoge viscositeit, een monomere 2 octyl cyanoacrylaat formulering en de kleurstof D&C Violet 2. De verhoogde viscositeit van de Histoacryl® Octyl en Histoacryl® Micro heeft als voordeel dat de weefsellijm op de gewenste plaats kan aangebracht worden.

Indicaties:

- SLUITEN VAN DE HUID: chirurgische incisies (incl. incisies van minimaal invasieve chirurgie).
- SLUITEN van eenvoudig, grondig gereinigde snijwonden door trauma.
- GEBRUIK kan in combinatie met huidhechtingen.

Voordelen:

- Snelle polymerisatie (30 seconden).
- Sterk en flexibel.
- Makkelijk in gebruik.
- Veilig en patiëntvriendelijk.



HISTOACRYL®

De weefsellijm Histoacryl® bestaat uit n-butyl-cyanoacrylaat. Om de dikte van de aangebrachte laag gemakkelijk te kunnen beoordelen, wordt Histoacryl® blauw gekleurd met de kleurstof D&C violet nr. 2. Er is ook een doorzichtige versie zonder kleurstof verkrijgbaar, waardoor de lijm heel geschikt is voor gebruik in het gezicht.

Indicaties:

- SLUITEN VAN DE HUID: Dichten van huidwonden zonder spanning (incl. schone chirurgische incisies en incisies van minimaal invasieve chirurgie) en eenvoudige, grondig gereinigde, trauma-geïnduceerde snijwonden.
- SCLEROTHERAPIE: Sclerotherapie van grote slokdarm- of fundusvarices.
- MESH FIXATIE: Fixatie van meshes, vooral bij liesbreukchirurgie.

Voordelen:

- Makkelijk in gebruik, beschikbaar in 2 kleuren (blauw en transparant).
- Ready-to-use flacon.
- Te bewaren op kamertemperatuur.



HISTOACRYL® FLEXIBLE

De weefsellijm Histoacryl® Flexible bestaat uit n-butyl-cyanoacrylaat en een weekmaker. Voor een makkelijke beoordeling van de dikte van de aangebrachte laag, is Histoacryl® Flexible blauw gekleurd met D&C violet nr. 2 kleurstof.

Indicatie:

- SLUITEN VAN DE HUID: geschikt voor het sluiten en beschermen van de huid van incisies tot maximaal 25cm in een breed scala van chirurgische disciplines. Sluiting van minimaal gespannen huidwonden van schone chirurgische incisies en eenvoudige, grondig gereinigde, door trauma veroorzaakte scheurwonden. Microbiologische barrière bij de sluiting van schone chirurgische huidwonden, eenvoudige, grondig gereinigde scheurwonden en door trauma veroorzaakte scheurwonden.

Voordelen:

- Sluiten van incisies tot 25cm.
- Vlot aanbrengen van de lijm.
- Vormt een antimicrobiële barrière.

