

# 1 klik is genoeg!



**1 klik** om aan te spannen en te prikken

**Weergave van het aantal** resterende lancetten

**11 prikdieptes** voor alle huidtypes




**Hendeltje** om van lancet te wisselen

**6 lancetten** in een lancettenhouder



## Plaats een lancettenhouder.

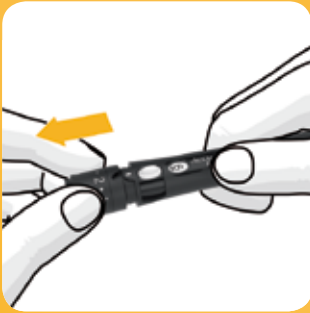

Verwijder het beschermkapje.



Plaats een lancettenhouder.



Plaats het beschermkapje terug.

## Een druppeltje bloed bekomen.



Kies de aangepaste prikdiepte.



Aanspannen en prikken met slechts 1 klik.



Duw het hendeltje één keer van voor naar achter.



Nieuwe lancettenhouder

Gebruikte lancettenhouder

Gebruik alle 6 lancetten alvorens de lancettenhouder te verwijderen. Eens verwijderd, kan de lancettenhouder niet meer terug worden ingebracht om hygiënische redenen.

## Ontdek wat mogelijk is.



[www.accu-chek.be](http://www.accu-chek.be)



[www.facebook.com/accuchekbe](https://www.facebook.com/accuchekbe)



0800 93 626



[www.youtube.com/AccuChekBelgium](https://www.youtube.com/AccuChekBelgium)

ACCU-CHEK en FASTCLIX zijn handelsmerken van Roche. © 2015 Roche Diagnostics

Roche Diagnostics Belgium NV/SA  
Schaarbeeklei 198  
B-1800 VILVOORDE

**ACCU-CHEK®**