




## SLIP CLASSIC


Attends Slip Classic is een reeks all-in-one producten geschikt voor zware urine- en/ of ontlastingsincontinentie.




### Gebruiksaanwijzing

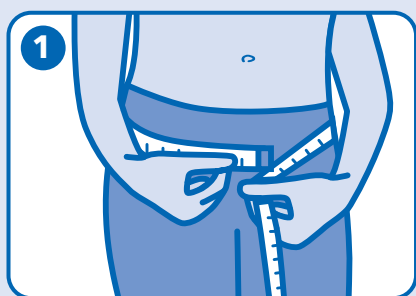


1 Om de juiste maat te kiezen, meet u uw heupomvang en taille. Aan de hand van de grootste omtrek kunt u de juiste maat bepalen.

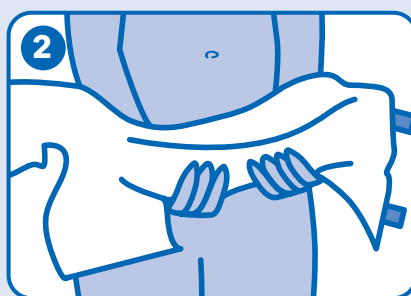


2 Vouw een voorzichtige komvorm over de lengte van de inlegger waardoor de anti-lekrandjes in de juiste positie komen te staan.

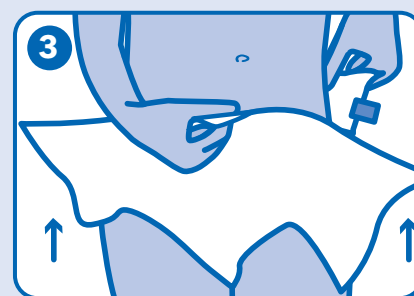

3 Positioneer de slip tussen de benen zodat het goed en comfortabel aansluit op het kruis. Gebruik eventueel de vochtindicator om het product correct te centreren.

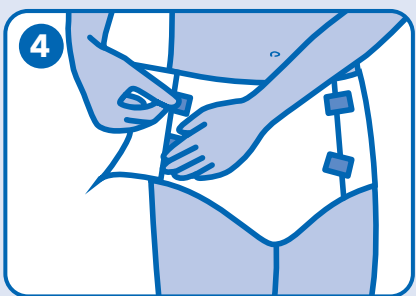

4 Streck de heupbanden voorzichtig om het middel naar de voorzijde van de slip en sluit de plakstrips zodanig dat de slip goed aansluit.

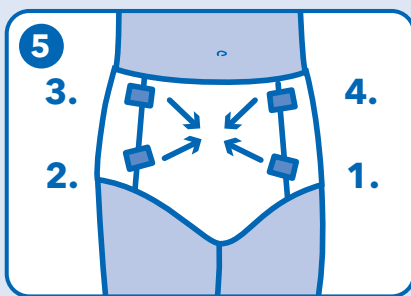

5 Bevestig de plakstrips zoals hiernaast op het plaatje weergegeven. De onderste plakstrips (1 en 2) als eerste en iets naar boven gericht. Vervolgens de bovenste plakstrips (3 en 4) en iets naar onderen gericht zodat er een goede aansluiting rondom het middel ontstaat. Wanneer u de slip losmaakt dan dienen de blauwe plakstrips op hun plaats te blijven en alleen de witte plakstrip losgemaakt te worden.

## SLIP CLASSIC

### Hints en Tips

#### Productkeuze

- Overweeg ook het gebruik van geschikte inleggers/broekjes in plaats van alleen Slips. Deze zijn in gebruik zeer discreet.
- Selecteer de maat die u nodig heeft volgens uw heupomvang en taille. Aan de hand van de grootste omtrek kunt u de juiste maat bepalen.
- Slips kunnen een effectieve beheeroptie bieden voor mensen die de anatomische gevormde inleggers niet willen of kunnen gebruiken.

#### Aantrekken

- Open de zijkanten afzonderlijk voordat u de slip aantrekt, door elke zijkant uit te klappen en naar buiten te openen, totdat ze alle vier volledig zijn geopend.
- Zorg dat het uitstaande materiaal van de beenelastieken aan de buitenzijde van de Slip blijft. Op deze manier komt de waterdichte buitenzijde niet in contact met de huid.
- Zorg ervoor dat bij het aanbrengen van de slip de plakstrips aan de achterzijde zitten. Zodoende weet u zeker dat de slip juist aangebracht wordt.
- Bevestig bij het aanbrengen van de slip de onderste plakstrips (1 en 2) als eerste en iets naar boven gericht. Vervolgens de bovenste plakstrips (3 en 4) en iets naar onderen gericht zodat er een goede en comfortabele aansluiting ontstaat.
- Indien de slip wordt aangebracht bij een liggende persoon dan is dezelfde volgorde van aanbrengen van toepassing als bij een staande positie. Om ervoor te zorgen dat de Slip blijft in positie, plaats een hand op de achterkant van de Slip bij het draaien van de cliënt.
- Gebruik de vochtindicator om het product correct te centreren.

#### Verwisselen

- Controleer de vochtindicator - indien deze voor meer dan de helft (60%) gekleurd is van geel naar blauw of als het product ontlasting bevat, moet de Slip vervangen worden.
- U kunt de Slip hergebruiken door de hersluitbare plakstrips indien de Slip bij het toiletteren schoon en droog is.
- Wanneer u de slip losmaakt dan dienen de blauwe plakstrips op hun plaats te blijven en alleen de witte plakstrip losgemaakt te worden.

#### Bij doorlekken

- Controleer nogmaals of het product juist is aangebracht en of de juiste absorptiecapaciteit is gekozen.
- Controleer nogmaals of u de juiste maat hebt gekozen.

#### Verwijderen

- Rol vervolgens het gebruikte product op en deponeer het bij het restafval.
- Spoel de Slip na gebruik nooit door het toilet.



**Huidverdraagzaamheid**  
dermatologisch goedgekeurd door proDERM, Instituut voor Toegepast Dermatologisch onderzoek