

Vacutex™


Quelques exemples de l'application de Vacutex[™]

Vacutex[™] peut être découpé à n'importe quelle forme et adapté à la plupart des plaies spécifiques, pour les plaies superficielles, profondes, minées ainsi que pour les fistules

Ceci nécessite

- Le choix de la taille correcte du pansement Vacutex[™]
- Des ciseaux
- Si besoin un pansement de plaie silicone
- Eventuellement un pansement absorbant
- Du matériel de fixation non-occlusif

Plaie minée après colostomie

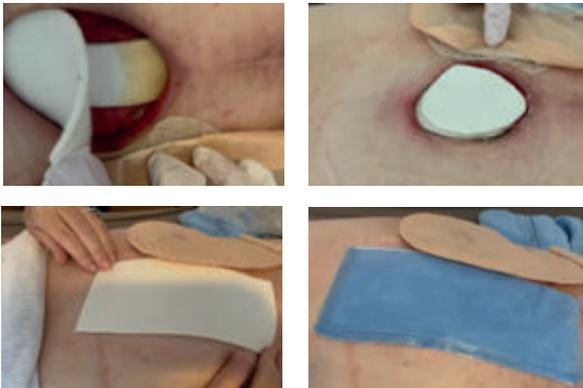

- Remplissez la partie minée de la plaie avec du Vacutex[™] coupé sur mesure, assurez que le pansement Vacutex[™] touche le fond de la plaie
- Puis après mettez un autre pansement Vacutex[™] (coupé sur mesure), remplissez la plaie avec du Vacutex[™] jusqu'au niveau de la peau
- Puis mettez un pansement Vacutex[™] qui couvre largement la surface de la plaie
- Finalement, mettez un pansement (super-) absorbant et fermez avec un pansement non-occlusif

Application de Vacutex™ en combinaison avec Multidex®

- Appliquez le Multidex® gel ou poudre directement dans le lit de la plaie
- Mettez un pansement silicone si nécessaire
- Puis mettez un pansement Vacutex™ qui couvre largement la surface de la plaie
- Finalement, mettez un pansement (super-) absorbant et fermez avec un pansement non-occlusif



Fixer Vacutex™ avec un sparadrap



Fixer le Vacutex avec une forme de « papillon »

Différentes façons d'appliquer et de fixer Vacutex™, par exemple pour les escarres



Drain (1*40 cm)



ou



Coupé comme si on épluche une pomme en spirale en fonction de la forme de la plaie



Appliquer, par exemple, un hydrocolloïde pour protéger les bords de la plaie



Pansement (pansement (super-) absorbant-absorbant)

En combinaison avec un drain ou une poche stoma de



Cas: contact direct avec l'os ou le tendon



- En cas de contact direct avec l'os ou le tendon, appliquez d'abord un pansement en silicone
- Appliquez ensuite Vacutex™
- Si nécessaire, appliquez des pansements (super) absorbants
- Puis fermez avec un pansement non-occlusif

Utilisation de Vacutex™ sous thérapie de compression

- Coupez le Vacutex™ légèrement plus petit que le lit de la plaie (2-3 mm)
- Remplissez la plaie avec le nombre de couches de Vacutex nécessaire pour atteindre niveau de la peau, ensuite couvrez la plaie avec un pansement entier de Vacutex pour protéger les bords de la plaie
- **Pour une plaie superficielle; Coupez un Vacutex™ de forme ovale (coupez les angles) et l'appliquez sur la plaie (cela évitera les marques de pression sur les pointes/extrémités du pansement sous la thérapie de compression)**
- Appliquez un pansement (super) absorbant par dessus si nécessaire
- Fixez si nécessaire
- Appliquez la thérapie de compression


Utilisation de Vacutex™ dans les plaies avec hypergranulation

- Si une hyper granulation se développe, continuez le traitement avec Vacutex™! L'hypergranulation disparaîtra pendant le traitement.



Enlever le Vacutex™

- Trempez Vacutex™ dans du sérum physiologique ou dans une solution de lavage des plaies, puis retirez délicatement

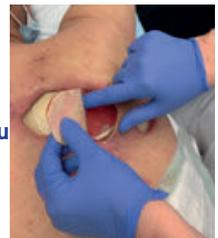

Qu'est-ce VACUTEX™

Le pansement Vacutex™ crée un effet de vide au moyen de la fonction capillaire. Il n'est pas identique au TPN mais possède un mécanisme autologue/similaire au TPN.

Il se compose d'une structure à 3 couches de filaments de polyester et de polyester-coton.

Vacutex™ n'est ni un pansement en mousse, ni un pansement (super) absorbant ni une hydrofibre.

Cliniquement, Vacutex™ est le premier pansement capable d'influencer de manière significative les niveaux d'oxygène, d'exsudat et d'œdème dans et autour de la plaie. Vacutex™ ne séchera pas la plaie complètement, mais laisse un niveau bas d'humidité dans la plaie sans mouiller la plaie.


Principe de fonctionnement



1 Aspiration continue



2 Drainage

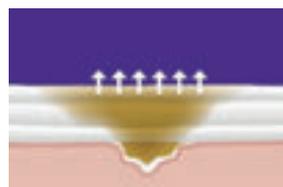

3 Drainage et évacuation

Indications: Ulcères diabétiques du pied, escarres, ulcères veineux de jambe, fistules, brûlures, plaies chirurgicales. Vacutex™ peut parfaitement être utilisé en combinaison avec un hydrogel.

Contre-indications

Vacutex™ ne doit pas être utilisé:

- Dans les saignements artériels
- Si les patients sont allergiques au polyester
- Les pansements à base de vaseline en combinaison avec Vacutex™ bloquent l'action capillaire du pansement
- Malignité de la plaie
- Ostéomyélite non traitée
- Fistules non entérales et fistules inexplorées
- Tissu nécrotique dans lequel des croûtes sont présentes
- Des vaisseaux sanguins ou des organes libres
- *Prudence chez les patients qui prennent des anticoagulants ou qui ont une hémostase de plaie difficile*

Manuel d'utilisation abrégé Vacutex™

- **En général** : 2 à 3 changements de pansement par semaine
- Couper le pansement Vacutex™ 2-3 mm plus petit que les bords de la plaie pour des **plaies profondes**. (De cette façon, les bords de la plaie peuvent se développer ensemble pendant le traitement.) Appliquez le nombre de couches de Vacutex™ requis jusqu'au niveau de la peau, afin que la plaie soit complètement remplie, et couvrez avec un pansement entier de Vacutex™ qui couvre tous les bords de la plaie.
- **Pour les plaies minées** : Appliquer Vacutex™ dans toutes les parties minées à partir du lit de la plaie, laissez au minimum 5 cm de Vacutex™ à l'extérieur de la plaie minée. Couvrez la partie extérieure de Vacutex™ avec un autre petit Vacutex™ afin d'accélérer l'évacuation de l'exsudat.
- **En cas de contact direct avec l'os ou le tendon**, appliquez d'abord un pansement en silicone. Ensuite le pansement Vacutex™. Couvrir la plaie et la peau environnante intacte avec une couche supplémentaire de Vacutex™
- **Pour les plaies très exsudatifs**. S'il y a beaucoup de liquide qui sort de la plaie : mettez un pansement (super-) absorbant sur le pansement Vacutex™. Une fois le pansement super absorbant saturé, laissez le pansement Vacutex™ et appliquez un nouveau pansement (super-) absorbant
- **En cas d'hypergranulation**, n'arrêtez pas Vacutex™, continuez le traitement, vous verrez que l'hypergranulation disparaît
- Vacutex™ peut être utilisé **sous traitement compressif** (ex. pour les ulcères veineux de jambe) : Utilisez une couche non adhérente (silicone) comme couche de contact principale, car les bandages de compression peuvent durer jusqu'à une semaine (3, 5 ou même 7 jours)
- **Avec une plaie plus profonde sous compression**, empilez le Vacutex™ au niveau de la peau. Couvrez d'un pansement absorbant. Avec une plaie superficielle, si vous décidez d'appliquer Vacutex™ sur les bords de la plaie, assurez-vous que le Vacutex™ est appliqué généreusement sur la plaie et coupé en ovale (coupez les angles), cela évitera de nouvelles marques de pression à cause des angles

