

CLEANWND®

Pads prêts à l'emploi pour un nettoyage et débridement faciles de la plaie et de la zone autour de la plaie.



COMPOSITION

Hyaluronate de sodium
Phospholipide
Gel Aloe Vera

CNK CODE	CODE PRODUIT	DESCRIPTION PRODUIT	TAILLES	EMBALLAGE	UNITÉ DE VENTE
4180220	2015A	CLEANWND® pads de débridement	15 x 20cm	1 pad/sachet	1 boîte avec 10 pads



Protex Healthcare NV
Blommestraat 2,
8800 Roeselare, Belgium
info@protexhealthcare.com
www.protexhealthcare.com

CLEANWND®

Pads prêts à l'emploi pour un nettoyage et débridement faciles de la plaie et de la zone autour de la plaie.



CLEANWND®

Pads prêts à l'emploi pour un nettoyage et débridement faciles de la plaie et de la zone autour de la plaie.

QU'EST-CE QUE CLEANWND® ?

CleanWND® est un pad non tissé et imprégné, qui agit comme un système innovant de débridement et de thérapie pour les plaies complexes. Il extrait les débris et l'exsudat de la plaie de façon complète et pratiquement indolore. Le pad élimine les squames et la kératose de la peau environnante.



CleanWND® est fabriqué à l'aide de la « méthode de l'aiguille » et contient des fibres courtes, lui permettant de recueillir facilement les débris de la plaie pendant le débridement mécanique et sans laisser de peluches ou de fibres résiduelles dans le lit de la plaie ou sur la peau environnante.

COMMENT FONCTIONNE LE PAD CLEANWND® ?

Les pads CleanWND® sont imprégnés de hyaluronate de sodium et de phospholipide.

L'hyaluronate de sodium est un composant important de la matrice extracellulaire de la peau et joue un rôle significatif dans le métabolisme du derme, la cicatrisation de la blessure et la réparation des tissus.

Les phospholipides favorisent le nettoyage de la peau et remplacent les phospholipides qui ont été perdus dans les tissus endommagés de la plaie et de la peau environnante.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

Les pads CleanWND® sont déjà imprégnés, de sorte qu'aucun liquide supplémentaire n'est nécessaire pour nettoyer la plaie.

Facile à utiliser.

Enlève les débris de la plaie, les squames et la kératose de la peau environnante.

Efficace, rapide et simple.

Réduit les coûts et le temps.

Taux d'acceptation élevé par les patients, utilisation presque indolore.

Convient pour une utilisation sur des plaies complexes.



MODE D'EMPLOI

Ouvrir l'emballage à l'endroit indiqué et extraire le pad. Utiliser le pad pour nettoyer et débrider la blessure. Le pad CleanWND® n'a pas de face supérieure ou inférieure. Utiliser un pad CleanWND® par plaie pour effectuer le débridement. Le pad CleanWND® est déjà imprégné, l'utilisation d'un autre liquide de nettoyage est donc superflue. Après utilisation, jeter le pad comme déchet clinique.

INDICATIONS

Pour le nettoyage/débridement de plaies complexes telles que:

ULCÈRES DE PIED DIABÉTIQUE

ULCÈRES VEINEUX DE JAMBE ESCARRES DE DÉCUBITUS

BLESSURES COMPLEXES /

BLESSURES TRAUMATIQUES

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur des plaies de grande taille.