


Contour.
Bloedglucosemeter
XT




Korte Handleiding

Uw CONTOUR®XT-meter

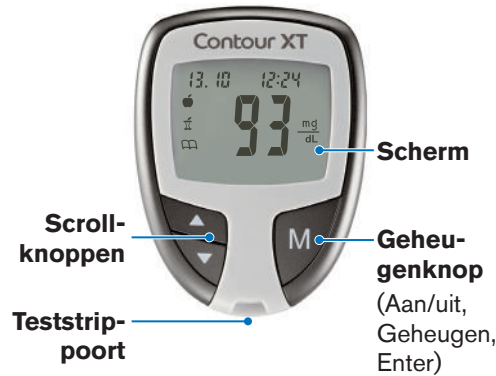

Gebruik alleen de CONTOUR®NEXT-teststrip

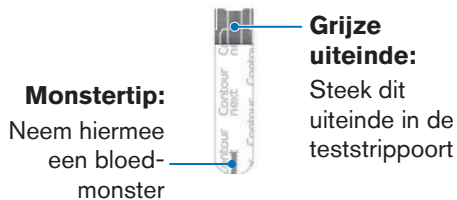

Testen

Raadpleeg uw CONTOUR®XT-gebruikershandleiding en de bijsluiter van het prikapparaat voor volledige instructies. ⚠ LET OP: Het in de kit geleverde prikapparaat is bedoeld voor gebruik bij één enkele patiënt.

Gereedmaken voor de test

1. Voor de test de handen goed wassen en drogen.

2. Steek het grijze uiteinde van de teststrip in de teststrip-poort van de meter.



3. De meter wordt aangezet en er verschijnt een teststrip met een knipperende bloeddruppel op het scherm van de meter. Dit geeft aan dat de meter klaar is voor de test.

4. Verwijder de punctiedop van het prikapparaat.

5. Maak het ronde beschermdopje van het lancet los door het een kwartslag te draaien, maar verwijder het niet.



6. Steek het lancet stevig in het prikapparaat totdat het niet verder kan.



7. Draai het ronde beschermdopje van het lancet.



8. Plaats de punctiedop terug.



9. Stel de draaiknop van de punctiedop in op de door u gewenste prikdiepte.



Verkrijgen van de bloeddruppel

1. Druk het prikapparaat stevig tegen de prikplaats en druk op de vrijgaveknop.




2. Wrijf over uw hand en vinger in de richting van de prikplaats zodat er een druppel bloed ontstaat.

Het testen van uw bloed

1. Gebruik uitsluitend CONTOUR NEXT-teststrips met de CONTOUR XT-meter.

2. Houd het uiteinde van de teststrip in de bloeddruppel. Het bloed wordt de teststrip ingezogen.


3. Houd de strip in de bloeddruppel totdat de meter piept.

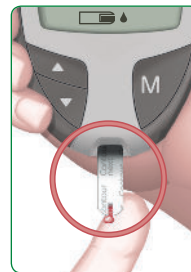

Vingerprik

4. Uw resultaat wordt na 5 seconden getoond.

5. Om de meter uit te schakelen verwijdert u de teststrip. Gooi de teststrip weg als medisch afval.

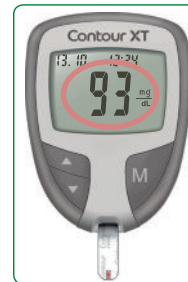

Raadpleeg de uitgebreide instructies in de bijsluiter van het prikapparaat voor het verwijderen van het lancet uit het prikapparaat.

De symbolen op het prikapparaat dienen uitsluitend ter illustratie. Voor in vitro diagnostisch gebruik

Hebt u hulp nodig?
0800 97 212 (BE)
800 27 254 (LUX)
www.ascensiadiabetescare.be



Mogelijk biologisch risico

Alle systemen waarmee de bloedglucose wordt bepaald, worden beschouwd als biologisch gevaarlijk.

Professionele zorgverleners of personen die gebruikmaken van dit systeem moeten de infectiecontroleprocedure volgen zoals die goedgekeurd is door hun instelling.

Alle producten of voorwerpen die met menselijk bloed in aanraking komen, moeten zelfs nadat ze schoongemaakt zijn, behandeld worden alsof ze infectieziekten zouden kunnen verspreiden.

De gebruiker moet de aanbevelingen voor het voorkomen van door bloed overdraagbare ziekten in de gezondheidszorg opvolgen zoals deze zijn aanbevolen voor potentieel besmettelijke menselijke monsters.

Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing voor volledige instructies.

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rechten voorbehouden. Ascensia, het Ascensia Diabetes Care-logo, Clinilog, Contour, Glucofacts en het No Coding-logo zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

De geavanceerde opties gebruiken

Het instellen van de geavanceerde opties

Om de geavanceerde opties in uw meter in te stellen en zo uw voordeel te doen met maaltijd-markeringen en andere beschikbare functies:

1. Druk op **M** om uw meter aan te zetten.
2. Houd dan **▲** of **▼** 3 seconden ingedrukt.
3. L-1 gaat knipperen.
4. Druk op **▲** of **▼** om naar L-2 te gaan.
5. Druk ter bevestiging op **M**.



Ontdek hoe deze extra mogelijkheden van de meter u kunnen helpen om met uw diabetes om te gaan.

Neem contact op met de Klantenservice

0800 97 212 (BE)

800 27 254 (LUX)

www.ascensidiabetescare.be

www.patents.ascensia.com




Nadat u een test heeft uitgevoerd en de resultaten ervan hebt gezien, gebruikt u de markeringen op het display:

| RESULTATEN MARKEREN | U ZIET | INSTELLEN | U ZIET | WAT HET BETEKENT | GEBRUIK HERINNERINGSSIGNAAL |
|---|---|------------------|---|--|--|
| Vóór eten Markeert een resultaat verkregen vóór een maaltijd. Druk op ▲ of op ▼ |  (Knippert) | Druk op M |  | Het resultaat is aangegeven als afkomstig van een vóór de maaltijd verrichte test. Druk opnieuw op M om een herinneringssignaal in te stellen om na de maaltijd een test te verrichten. | <p>Als het herinneringssignaal klinkt, wordt de meter aangezet en ziet u het resultaat van de vóór de maaltijd uitgevoerde test.</p>  <p>Druk eenmaal op ongeacht welke knop om het herinneringssignaal uit te zetten en tweemaal om de meter uit te zetten.</p> <p>Doe nog een bloedtest en markeer deze met een  "na de maaltijd"-teken (zie tabel links).</p> |
| Na eten Markeert een resultaat verkregen na een maaltijd. Druk op ▲ of op ▼ |  (Knippert) | Druk op M |  | Het resultaat is aangegeven als afkomstig van een na de maaltijd uitgevoerde test. | |
| Logboek Markeert een resultaat als uniek of als in een bepaald opzicht anders. Druk op ▲ of op ▼ |  (Knippert) | Druk op M |  | Resultaat wordt in het geheugen als uniek gemarkeerd. U kunt dit in uw dagboek noteren. | |

 Stelt een herinneringssignaal in (van te voren ingesteld op 2 uur) om een test na de maaltijd uit te voeren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige instructies voor het gebruik van de markeringen en het aanpassen van de tijdstellingen van de herinneringssignalen.

Foutcodes en -symbolen

Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing voor een volledige lijst met foutcodes.

| | |
|---|---|
| E1  | Temperatuur te hoog of te laag. |
| E2  | Er was een probleem met het volledig vullen van de teststrip. Test opnieuw met een nieuwe teststrip. |
| E3  | De meter heeft gemerkt dat een al eerder gebruikte teststrip of een onjuiste controlevloeistof is gebruikt. Test opnieuw met een nieuwe teststrip. |
| E11 | Abnormaal resultaat. Test opnieuw met een nieuwe teststrip. |

 **ASCENSIA**
Diabetes Care

Gedistribueerd door:
Ascensia Diabetes Care NV-SA
Pegasuslaan 5
BE-1831 Diegem (Machelen)
Tel. 0800 97 212 (BE)
Tel. 800 27 254 (LUX)
info@ascensidiabetescare.be
www.ascensidiabetescare.be
www.diabetes.ascensia.com



 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

90004055
Rev. 06/19