

# MULTIDEX®

Een effectieve behandeling voor complexe wonden!

# MULTIDEX®

Een effectieve behandeling voor complexe wonden!



## VERPAKKINGSEENHEID

Multidex® is beschikbaar als gel (voor licht tot matig exsuderende wonden) en als poeder (voor matig tot sterk exsuderende wonden).

CNK CODE	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	INHOUD	EENHEID
4179982	46-701EU	Multidex® Powder Wound Filler	45 gram	1 Tube
4180212	46-703EU	Multidex® Powder Wound Filler	12 gram	5 Tubes
4179966	46-712EU	Multidex® Gel Wound Filler	85 gram	1 Tube
4179974	46-710EU	Multidex® Gel Wound Filler	14 gram / 15 ml	1 Doos / 10 stuks



Protex Healthcare NV  
Blommestraat 2,  
8800 Roeselare, Belgium  
info@protexhealthcare.com  
www.protexhealthcare.com

Multidex® is a DeRoyal® product



Multidex are trademarks or registered trademarks of DeRoyal Industries, Inc. Multidex® is a registered trademark of DeRoyal Industries, Inc. Copyright© 2019, DeRoyal. All rights reserved. All products shown are legally marketed in accordance with United States laws and regulations but may not be available for sale in all countries.



# MULTIDEX®

Een effectieve behandeling voor complexe wonden!

## WAT IS MULTIDEX® WONDVERBAND?

Multidex® is een wondverband in gel- of poedervorm op basis van Maltodextrine en Vitamine C voor de behandeling van complexe wonden.

### GEL



licht tot matig exsuderende wonden

### POEDER



matig tot sterk exsuderende wonden

## WERKING

Multidex® creëert een vochtig wondmilieu, wat uitdroging van de wond voorkomt en gunstig is voor de groei van nieuw granulatieweefsel en epitheliale proliferatie.

**Maltodextrine** stimuleert autolytisch debridement in de wond door het aantrekken van witte bloedcellen die debris en bacteriën verteren door phagocytose en van fibroblasten die collageen vormen en de groei van granulatieweefsel bevorderen.

De **Vitamine C** in Multidex® creëert een pH van 4.2 in de wond. Dit ondersteunt het bacteriedodend en bacteriostatisch mechanisme voor sommige aërobe/anaërobe, gram negatieve/gram positieve bacteriën. Vitamine C is tevens noodzakelijk voor collageensynthese.

## SAMENSTELLING

### Multidex® bevat:

Maltodextrine NF (D – Glucose Polysaccharide)

1% ascorbine zuur / Vitamine C

De gel bevat tevens water en glycerine.

## KENMERKEN / VOORDELEN

Voor gebruik bij al dan niet geïnfecteerde, oppervlakkige tot diepe, droge tot vocht afgevend complexe wonden.

Levert een significante bijdrage aan het autolytisch debridement.

Ondersteunt sterke afname en beheersing van (intens) geurende wonden < 24 - 72 uur.

Mengt snel en vult alle wondoneffenheden op, waaronder o.a. ondermijningen.

Creëert en ondersteunt een optimaal vochtig wondmilieu.

Geen systemische opname, dus ook geschikt voor diabetische patiënten.

Niet toxisch, natuurlijke ingrediënten.

Betaalbaar & gebruiksvriendelijk.

## TOEPASSINGEN

Veneuze beenulcera

Diabetische voet ulcera

Geïnfecteerde wonden

Oppervlakkige / diepe wonden

Decubitus wonden

Tweedegraads brandwonden

## VERBANDWISSEL FREQUENTIE

3x per week