




SLIP ACTIVE


Attends Slip Active zijn alles-in-één producten ontworpen voor zware urine- en/of ontlastingsincontinentie.




Gebruiksaanwijzing

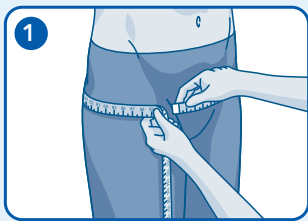


1 Meet de omvang van heup en taille en kies de grootste omtrek van deze twee om de juiste maat te bepalen.

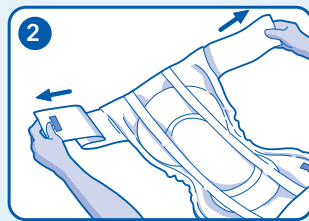

2 Vouw het product volledig open en plaats het uiteinde met de heupbanden en de plakstrips naar de achterkant. Zorg ervoor dat de zachte, absorberende bovenlaag zich aan de bovenkant bevindt.

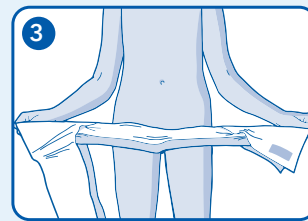


3 Vouw het product in de lengte voorzichtig tot een bootvorm, zodat dat de anti-lekrandjes recht op staan.

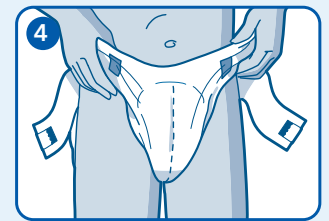


4 Plaats het product tussen de benen zodat het goed en comfortabel aansluit op het lichaam en in de liesstreek. Gebruik de vochtindicator om het product te positioneren en te centreren.



5 Breng de heupbanden voorzichtig naar de voorkant van het product. Gebruik de blauwe plakstrips om het product aan beide zijden vast te maken.

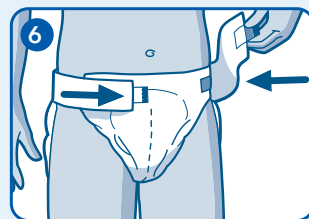

6 Bevestig de plakstrips stevig op het product. Wanneer u het product losmaakt, verwijder dan de witte plakstrip van de blauwe plakstrip. De blauwe plakstrips moeten op de waterdichte onderlaag blijven zitten.

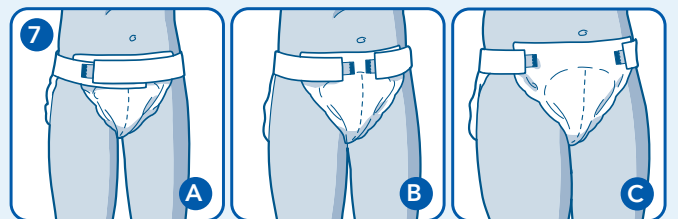

7 Afhankelijk van de lichaamsbouw van de gebruiker kunnen de heupbanden:
A. Elkaar overlappen
B. Dichtbij elkaar zitten
C. Dichtbij de rand van de slip worden vastgemaakt

SLIP ACTIVE

Hints en Tips

Productkeuze

- Overweeg Attends inleggers/broekjes te gebruiken in plaats van Slips. Deze bieden meer discretie.
- Selecteer de juiste maat door de omvang van heup en taille te meten. Kies de grootste omtrek om de juiste maat te bepalen.
- Selecteer het absorptieniveau op basis van de hoeveelheid urineverlies. Begin met een lager absorptiegetal alvorens over te gaan naar een hoger absorptieniveau.
- Slips bieden een effectieve oplossing voor mensen die anatomisch gevormde inleggers niet willen of kunnen gebruiken.

Aanbrengen

- Zorg ervoor dat de elastische beenopeningen naar buiten gevouwen zijn - dit voorkomt dat de waterdichte buitenlaag in contact komt met de huid.
- Zorg ervoor dat de heupbanden met de plakstrips zich aan de achterzijde bevinden - zo weet u dat het product op de juiste manier wordt aangebracht.
- Als het product wordt aangebracht in een liggende positie, volg dan dezelfde volgorde als voor het aanbrengen in staande positie. Om ervoor te zorgen dat het product op zijn plaats blijft, plaatst u een hand op de achterkant van het product wanneer u de persoon draait.
- Gebruik de vochtindicator om het product correct te centreren.

Verwisselen

- Controleer de vochtindicator - indien deze voor meer dan de helft (60%) vervaagd is of als het product ontlasting bevat, moet deze vervangen worden.
- Droge en schone producten kunnen na het toiletteren opnieuw worden gebruikt.
- Wanneer u het product wilt losmaken, open dan alleen de witte plakstrips, de blauwe plakstrips moeten op hun plaats blijven.
- Reinig de huid volgens voorschrift en van voor naar achter.
- Gebruik alleen voorgeschreven crèmes en breng aan volgens de instructies van de fabrikant.

Lekkage

- Controleer of het product correct is aangebracht.
- Controleer de maat van het product.

Verwijderen

- Rol het product na gebruik op en deponeer volgens de plaatselijke richtlijnen.
- Spoel het product na gebruik nooit door het toilet.



Huidverdraagzaamheid
dermatologisch goedgekeurd
door SGS proderm,
Instituut voor Toegepast
Dermatologisch Onderzoek